

SINGLE USE SKIN STAPLERS  
**WITH STAINLESS STEEL STAPLES**



アポーズ™ ULCスキンステープラー

Medtronic

## 特徴

- ステープレの幅が選択可能
- ステープレの高さが選択可能
- 透明なカートリッジ

## 利点


- 様々な閉創に対応できます
- 整容性を高めます
- ステープレの残数が確認できます

## アポーズ™ ULC スキンステープラーを使用する際の位置決め


アポーズ™ ULC スキンステープラーは様々な角度で使用されることを想定して設計されています。エジェクター・スプリングを内蔵することにより、打針後、自動的にスキンステープラー本体の向きに関わらず、ステープルがアゴ部から放たれます。

## ステープルの不形成を防ぐために

正確なステープルを形成するために、ステープルの背面は平坦でくぼみをもつデザインになっています。スキンステープラーを正しく使用するためには、トリガーを完全に握りこんでから戻してください。ハンドルの握りこみ不足は、ステープルの不形成と組織の不十分な寄せ合わせにつながります。

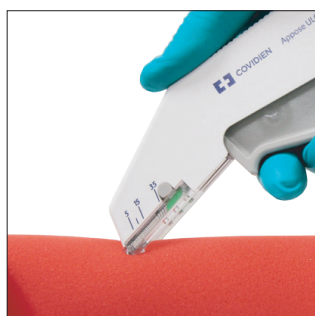

ハンドルを最後までしっかりと握りこみ完全に戻してから、アゴの先端を組織から離してください。

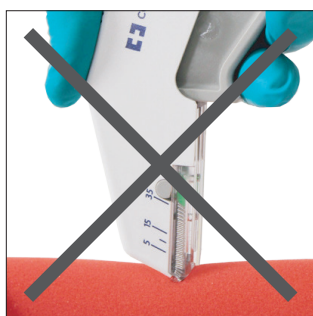

ステープルが組織に打たれるまで、本体を持ち上げたり、前後左右にひねらないでください。

## ステープル形状

	サイズ		ワイヤーゲージ
	閉鎖前	閉鎖後	
35R (レギュラー)	10.87mm 2.9mm	5.88mm 4.1mm	0.57mm
35W (ワイド)	13.0mm 3.25mm	6.5mm 4.1mm	0.56mm

ステンレススティールステープルの組成：ニッケル・クロム含有

製品コード	製品名
803512	Apoose™ ULC レギュラー 35 針入り
803712	Apoose™ ULC ワイド 35 針入り

※ 詳細に関しては添付文書を熟読の上、ご使用ください。

# Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

販売名:アポーズ ULC 35  
医療機器認証番号:22100BZX00117000  
クラス:II

ct-st-sk-appo(01)  
1801.pdf.esy