

Medtronic

Single use skin staplers with stainless steel staples

アポーズ™ ULC スキンステープラー



アポーズ™ ULC スキンステープラー

特徴

- ステープルの幅が選択可能
- ステープルの高さが選択可能
- 透明なカートリッジ

利点

- 様々な閉創に対応できます
- 整容性を高めます
- ステープルの残数が確認できます

アポーズ™ ULC スキンステープラーを使用する際の位置決め

アポーズ™ ULC スキンステープラーは様々な角度で使用されることを想定して設計されています。エジェクター・スプリングを内蔵することにより、打針後、自動的にスキンステープラー本体の向きに関わらず、ステープルがアゴ部から放たれます。

ステープルの不形成を防ぐために

正確なステープルを形成するために、ステープルの背面は平坦でくぼみをもつデザインになっています。スキンステープラーを正しく使用するためには、トリガーを完全に握りこんでから戻してください。ハンドルの握りこみ不足は、ステープルの不形成と組織の不十分な寄せ合わせにつながります。



ハンドルを最後までしっかりと握りこみ完全に戻してから、アゴの先端を組織から離してください。



ステープルが組織に打たれるまで、本体を持ち上げたり、前後左右にひねらないでください。

ステープル形状

	サイズ		ワイヤー ゲージ
	閉鎖前	閉鎖後	
35R (レギュラー)	10.87mm 2.9mm	5.88mm 4.1mm	0.57mm
35W (ワイド)	13.0mm 3.25mm	6.5mm 4.1mm	0.56mm

ステンレススティールステープルの組成：ニッケル・クロム含有



アポーズ™ ULC レギュラー 35 針入り

製品コード：803512

アポーズ™ ULC ワイド 35 針入り

製品コード：803712



プレミアム™ リムーバー

製品コード：150462

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：アポーズ ULC 35
販売名：プレミアムリムーバー

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2023 Medtronic. Medtronic 及び Medtronic ロゴマークは、Medtronic の商標です。TM を付記した商標は、Medtronic company の商標です。

医療機器認証番号：22100BZX00117000 クラス：II
医療機器認証番号：224AABZX00088000 クラス：II

ct-st-sk-ppo(02)
2311.fk.SI-A1336