

外挿式バイトブロック

ストリームガード

通常の気管チューブに対応

ストリームガード・ラウンド(L)




予め気管チューブにストリームガード・ラウンドを装着します。
(気管内挿管後に装着することも可能です)



インフレーションラインを挟まない位置にストリームガード・ラウンドをセットします。



気管チューブを挿管し、ストリームガード・ラウンドが適切な位置になるよう調整します。

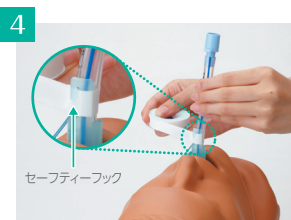

ストリームガード・ラウンドを気管チューブに固定します。
セーフティフックにテープを引っ掛けて2周以上巻きつけ、しっかりと固定してください。
固定後、施設のプロトコールに従って気管チューブを患者様へ固定してください。


*ストリームガード・ラウンドLも同様の手順です。

〈サイズは2種類あります〉



ストリームガード・ラウンド

品番：1301
仕様：外挿式バイトブロック(円形断面)／未滅菌個装
適合サイズ：気管チューブID=7.0～8.5
包装：20個入
JANコード：4580320710071
製造国：日本

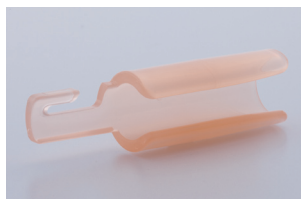

ストリームガード・ラウンドL

品番：1303
仕様：外挿式バイトブロック(円形断面)／未滅菌個装
適合サイズ：気管チューブID=8.0～9.5
包装：20個入
JANコード：4580320710095
製造国：日本

カフ上部吸引ライン付気管チューブに対応

ストリームガード・オーバル(L)




気管チューブの吸引ライン、インフレーションラインのない部分(カフ側)にストリームガード・オーバルを装着します。
(気管内挿管後に装着することも可能です)



ストリームガード・オーバルをスライドさせて、吸引ライン、インフレーションラインを写真のように覆う位置へ移動させます。
(移動後、吸引ライン、インフレーションラインが正常に機能することを確認してください)




気管チューブを挿管し、ストリームガード・オーバルが適切な位置になるよう調整します。

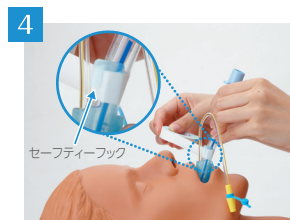

ストリームガード・オーバルを気管チューブに固定します。
セーフティフックにテープを引っ掛けて2周以上巻きつけ、しっかりと固定してください。
固定後、施設のプロトコールに従って気管チューブを患者様へ固定してください。

*ストリームガード・オーバルLも同様の手順です。

〈サイズは2種類あります〉

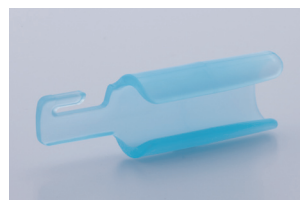

ストリームガード・オーバル

品番：1302
仕様：外挿式バイトブロック(長円形断面)／未滅菌個装
適合サイズ：カフ上部吸引ライン付気管チューブID=7.0～8.0
包装：20個入
JANコード：4580320710088
製造国：日本



ストリームガード・オーバルL

品番：1304
仕様：外挿式バイトブロック(長円形断面)／未滅菌個装
適合サイズ：カフ上部吸引ライン付気管チューブID=8.0～9.0
包装：20個入
JANコード：4580320710101
製造国：日本

☐ この製品は一人患者用です。 ☐ この製品は薬事法第2条第4項適用外です。 ☐ 改良のため仕様は予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。