

ノロウイルス抗原キット



イムノキャッチ[®]-ノロ Plus


糞便中のノロウイルス抗原の検出
(ノロウイルス感染の診断の補助)



Plusになって、さらに使いやすく

- 直腸便と排泄便に対応した共用綿棒です。

- 検体採取とリリース性に優れた「ハイドラブロック」を採用。

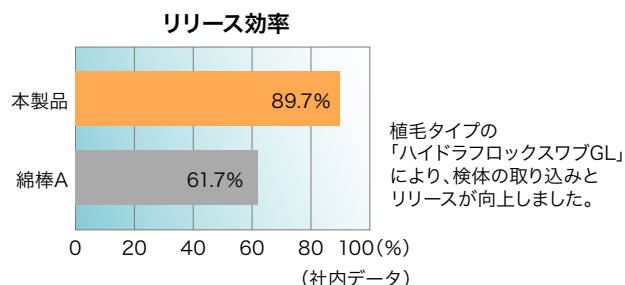

- 院内での持ち運びがしやすい輸送用チューブにより、院内感染リスクを低減します。



排泄便は
緑色の目印を
目安に採取

- 採便用シート「水洗用トレールペーパー」で、便のとりやすさに配慮しました。



便器に浮かべて排便、採便後は
そのまま流せる水溶性の採便シートです。

操作方法

詳細は最新の電子化された添付文書をご参照ください



イムノキャッチ®-ノロ Plus

検体採取

滅菌綿棒（直腸便・排泄便採取用）で検体を採取します


排泄便の場合

綿球の3分の1（緑色の目印の手前まで）を目安に採取



直腸便の場合

綿球全体で採取

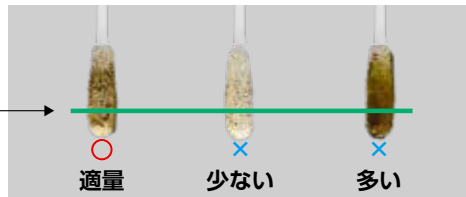


測定

試料を調製し 反応容器に3滴滴下します


1

検体抽出液のキャップを外して採便後の綿棒を浸し、綿棒をもみながら攪拌

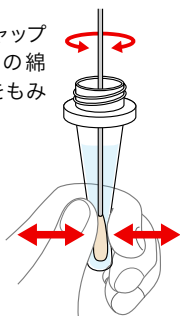

2

綿棒を搾りながら引き抜く

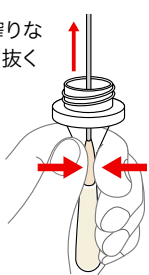

3

フィルターチップをしっかりと装着



4

ゆっくりと逆さまにし、反応容器に3滴滴下



判定



15分後にラインの有無を判定します

陽性



赤色のコントロールラインとテストラインの両方が出現した場合


判定に従い、赤色のテスト(T)ラインが薄くても肉眼で確認されたら「陽性」と判定してください

陰性



赤色のコントロールラインのみが出現した場合

無効・再検査

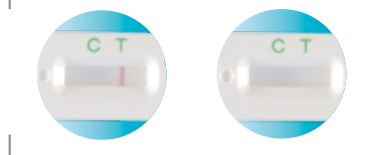

コントロールラインが出現しない場合

相関性

■ 他社製品との相関

		他社 イムノクロマト製品		
		陽性	陰性	合計
イムノキャッチ®-ノロ Plus	陽性	67	7 ^{*1}	74
	陰性	0	93	93
	合計	67	100	167

陽性一致率: 100.0% (67/67)

陰性一致率: 93.0% (93/100)

全体一致率: 95.8% (160/167)

^{*1} RT-PCR法ですべて陽性

■ 排泄便と直腸便との相関

		排泄便		
		陽性	陰性	合計
直腸便	陽性	48	2 ^{*2}	50
	陰性	6 ^{*3}	41	47
	合計	54	43	97

陽性一致率: 88.9% (48/54)

陰性一致率: 95.3% (41/43)

全体一致率: 91.8% (89/97)

^{*2} RT-PCR法で1検体が陽性、1検体が陰性

^{*3} RT-PCR法ですべて陽性

(イムノキャッチ®-ノロ Plus 添付文書データ)

製品情報

キット構成

反応容器 10個
検体抽出液 (略名: EX、キャップ: 緑色) 5本×2

付属品

滅菌綿棒 (直腸便・排泄便採取用) 10本
フィルターチップ (緑色: 糞便用) 10個
採便シート (水洗用トレールペーパー) 10枚
スタンド 1個

製品概要

製品名 イムノキャッチ®-ノロ Plus
包装単位 10回分
貯蔵方法 室温保存
有効期間 2年間
製品コード E-ET05

【別売品】

一般医療機器 医科用検体

ハイドラフロックスワブGL

包装単位 10本×3袋
貯蔵方法 室温保存
有効期間 3年間
製品コード 8-ET05
届出番号 13B2X10572000010
製造販売業者 株式会社スギヤマゲン

※詳細は最新の電子化された添付文書をご参照ください

本試薬の使用上又は取扱上の注意については、最新の「電子化された添付文書」をご参照ください
イムノキャッチシリーズについては「Eiken POCT SITE」(<http://www.eiken.co.jp/POCT/index.html>)をご覧ください

製造販売元



栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木143番地

4383 CPMK2

2023年10月作成