



より早く、より確かに

判定
10分

SARSコロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット

クイックチェイサー[®] SARS-CoV-2/Flu A,B

体外診断用医薬品 承認番号 30300EZ00090000

SARS-CoV-2

A型インフルエンザ

B型インフルエンザ

3つのウイルスを 同時検出



A型インフルエンザ陽性例

検体の抽出効率を高める特殊構造の抽出容器



ひとつの抽出液で 複数項目の検査が可能

試料の調製

本品で調製した試料と他のクイックチェイサー[®]での試料相互使用の関係は右記のとおりです。

製品名	検体	
	鼻咽頭ぬぐい液	鼻腔ぬぐい液 ^{*2}
SARS-CoV-2/FluA,B	○	○
Adeno	○ ^{*1}	×
RSV	○ ^{*1}	×


適用検体：○

^{*1} 使用目的は「鼻腔ぬぐい液」として承認

^{*2} 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し、採取した鼻腔ぬぐい液

テストプレート

ライン出現位置

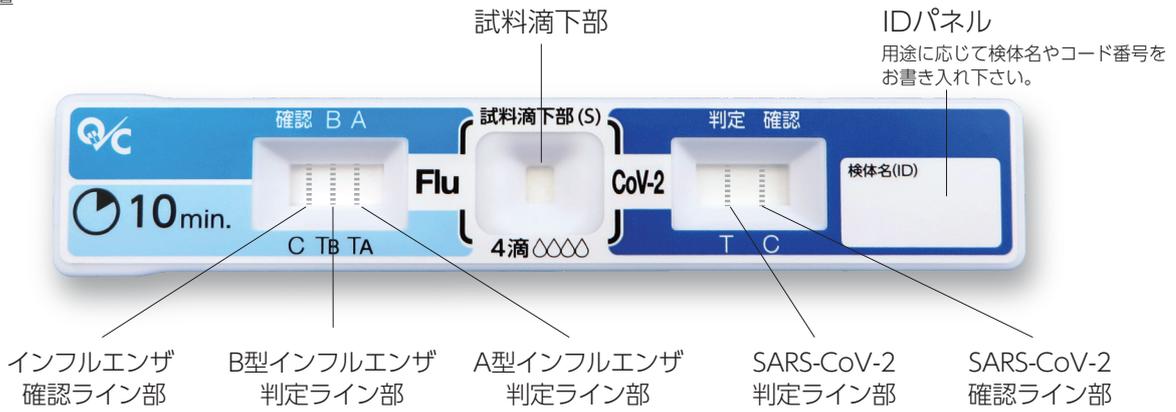


判定


〈陽性〉

判定ライン部及び確認ライン部ともにラインが出現した場合を陽性と判定して下さい。


A型
インフルエンザ
陽性

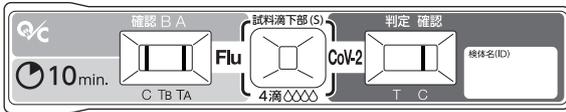

SARS-CoV-2
陽性

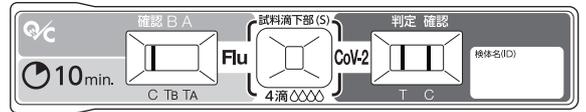

B型
インフルエンザ
陽性

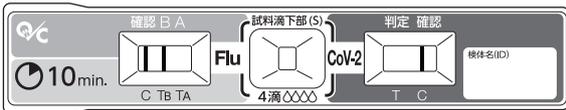

〈陰性〉

確認ライン部にのみラインが出現した場合を陰性と判定して下さい。

陰性



クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B

品番/68600 10回用


テストプレート10テスト
抽出液0.5mL×10本

【付属品】

- ・ニプロスポンジスワブ10本
(届出番号:27B1X00045000092)
- ・フィルター(抽出液用)10個
- ・フィルターキャップ10個



検体

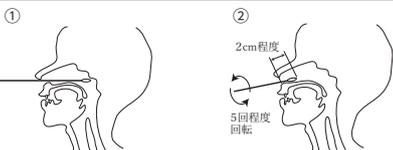

反応時間 10分
貯法 1~30℃
有効期間 24ヵ月

GS1
データマトリクス



添文ナビご使用の方は

記載のGS1データマトリクスでPMDAへ登録された添付文書を直接閲覧することが出来ます。

(添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」日本製薬団体連合会、医療機器産業連合会、GS1 Japanが共同で開発した医療従事者用のアプリケーション)

製造販売元

株式会社 ミズホメディー

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4
<https://www.mizuho-m.co.jp>

学術担当窓口 お客様専用 ☎ 0120-12-4636

月~金(祝日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

「クイック チェイサー」「スマートQCリーダー」は(株)ミズホメディーの登録商標です。

9-08-2309-01-04