



商品の詳しい情報は
こちらから▶

SARAYA

ニトリルグローブ エクステン

PPEホルダー使用でさらに便利

サラヤ PPE ホルダー (ステレンス製)
手袋・エプロン用

※ホルダーの裏には強カマグネット付

商品コード: 51088

サイズ(mm): W244 × D105 × H141
入数: 12

PPEホルダー使用例



カラー

ブルー

ホワイト



仕様

※ブルー・ホワイト共通

サイズ	XS	S	M	L
全長 (mm)	≥ 240			
手のひら幅 ±5 (mm)	75	85	95	105
厚み (mm)	指先: 0.10 ± 0.02 手のひら: 0.08 ± 0.02			
ピンホール品質基準	AQL 1.5			
引張り強度 (MPa)	老化前 ≥ 26 老化後 ≥ 24			
最大伸長度 (%)	老化前 ≥ 500 老化後 ≥ 400			


※パッケージに表記のある「XLサイズ」は海外向けの取扱いサイズとなります。ご了承ください。

着脱方法

※手袋を外すときは、汚染面が素手に触れないように注意し、廃棄後は手指衛生をしっかりと行うことが重要です。

着け方

外し方

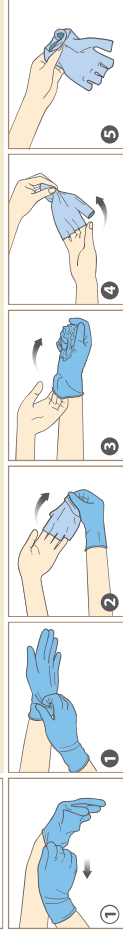

品名	内容量 / 規格	1箱入数	商品コード	JANコード
サラヤニトリルグローブ エクステン	200枚入 / XS	10	50966	49-87696-50966-5
	200枚入 / S		50967	49-87696-50967-2
	200枚入 / M		50968	49-87696-50968-9
	200枚入 / L		50969	49-87696-50969-6
サラヤニトリルグローブ エクステン	200枚入 / XS	10	50945	49-87696-50945-0
	200枚入 / S		50946	49-87696-50946-7
	200枚入 / M		50947	49-87696-50947-4
	200枚入 / L		50948	49-87696-50948-1

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上り上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■記載内容は2023年8月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東区湯里 2-2-8
<https://www.saraya.co.jp/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間: 平日 9:00~18:00)

Nitrile Examination Gloves



Personal Protective Equipment

ブルー/ホワイト 各200枚入



優れた伸縮性＆フィット感

- 優れたバリア性
(耐薬品性、血液不浸透性、抗がん剤耐性)
- パウダーフリー・ラテックスフリー
- 指先滑り止め加工
- めくれ上がり防止カフ
- 食品衛生法適合
- 未滅菌
- 左右兼用
- ディスプレイザブル(単回使用)



用途

湿性生体物質に接触する可能性のある場合や傷・粘膜に触れる場合など、様々な場面でお使いいただけます。

- 採血 ●創傷処置 ●注射剤のミキシング ●汚物・吐物処理 ●器材の洗浄・消毒 ●気管吸引
- 環境整備 ●末梢血管カテーテル留置 ●尿道カテーテル挿入 ●検体の取り扱いなど

その他、介護現場、食品加工、化学実験など、様々な用途に適応します。



手袋を衛生的に 取り出せる箱設計

手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。



サラヤニトリルグローブエクステンド 物性データ (各サイズ共通)

バリア性

試験項目	評価結果
水酸化ナトリウム (40%) : EN374-3	>480 分
ホルムアルデヒド (37%) : EN374-3	>120 分
過酸化水素 (30%) : EN374-3	ブルー : 30 分 ホワイト : 10 分
血液由来病原体透過性 : ASTM F1671	合格

抗がん剤耐性試験 : ASTM D6978-05

試験薬剤	濃度	透過時間
カルムスチン	3.3mg/mL	ブルー : 6 分 ホワイト : 5 分
シスプラチン	1.0mg/mL	>240 分
シクロホスファミド	20.0mg/mL	>240 分
タカールバジン	10.0mg/mL	>240 分
ドキシルビシン塩酸塩	2.0mg/mL	>240 分
エトポシド	20.0mg/mL	>240 分
フルオロウラシル	50.0mg/mL	>240 分
メトトレキサート	25.0mg/mL	>240 分
マイトマイシン C	0.5mg/mL	>240 分
バクリタキセル	6.0mg/mL	>240 分
チオテパ	10.0mg/mL	ブルー : 29 分 ホワイト : 46 分
ピンクリスチン塩酸塩	1.0mg/mL	>240 分

刺激と感作性 : ISO-10993-10

試験項目	評価結果
一次皮膚刺激 クローブが接触する皮膚への刺激評価	無刺激
感作性試験 クローブからの抽出物による、皮膚感作 (Type IV: 遅延型過敏症発症反応) について評価	目に見える変化なし

安心の
安定供給！

自社工場でのニトリル手袋の
製造体制を構築。
高い品質と安定供給を
実現します。

自社工場の
紹介動画は
こちらから




<当社工場の特徴>

★製造機能に加え保管倉庫も隣接。急激な需要増にも対応します。

★排ガス・排水処理などに高性能設備を導入し、環境負荷の低減に配慮しています。



【製造ライン】

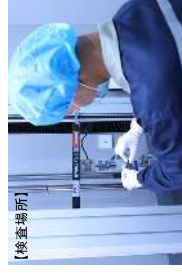

【検査場所】



【自社工場外観図】