



アデノウイルスキット

イムノキャッチ[®] - Adeno

咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のアデノウイルス抗原の検出（アデノウイルス感染の診断の補助）



イムノキャッチ[®] - Strep A*と
検体抽出液の共用が可能（咽頭ぬぐい液の場合）

*一般的名称：A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット 承認番号：30500EZ00045000



痛みの少ないスポンジスワブ[®]を採用




反応時間は5分

操作方法

詳細は最新の電子化された添付文書をご参照ください

測定

試料を調製し反応容器に3滴滴下します

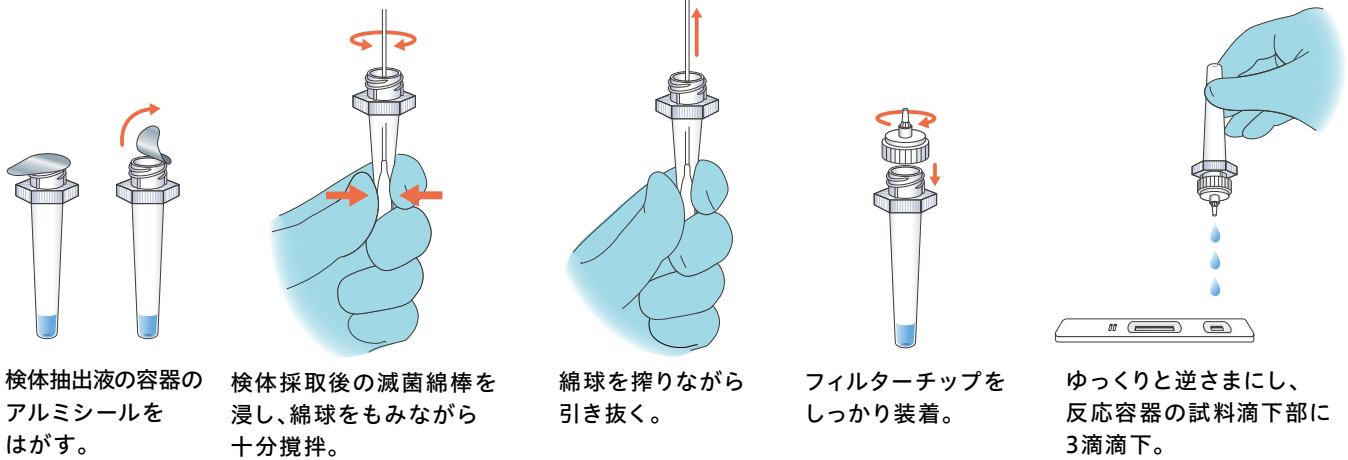

検体抽出液の容器のアルミシールをはがす。

検体採取後の滅菌綿棒を浸し、綿球をもみながら十分攪拌。

綿球を搾りながら引き抜く。

フィルターチップをしっかりと装着。

ゆっくりと逆さまにし、反応容器の試料滴下部に3滴滴下。

判定

5分後にラインの有無を確認します



赤色のコントロールラインとテストラインの両方が出現した場合

判定に従い、赤色のテスト (T) ラインが薄くても肉眼で確認されたら「陽性」と判定してください



赤色のコントロールラインのみが出現した場合



コントロールラインが出現しない場合

関連性

■ 他社製品との相関

① 咽頭ぬぐい液検体

		他社製品 (既承認品) イムノクロマトグラフィー法		
		陽性	陰性	合計
イムノキャッチ®-Adeno	陽性	69	4 ^{*1}	73
	陰性	3 ^{*2}	65	68
	合計	72	69	141

陽性一致率: 95.8% (69/72)
陰性一致率: 94.2% (65/69)
全体一致率: 95.0% (134/141)

^{*1} PCR法ですべて陽性
^{*2} PCR法ですべて陽性

② 鼻腔ぬぐい液検体

		他社製品 (既承認品) イムノクロマトグラフィー法		
		陽性	陰性	合計
イムノキャッチ®-Adeno	陽性	80	5 ^{*3}	85
	陰性	0	62	62
	合計	80	67	147

陽性一致率: 100% (80/80)
陰性一致率: 92.5% (62/67)
全体一致率: 96.6% (142/147)

^{*3} PCR法ですべて陽性

(イムノキャッチ®-Adeno 添付文書データ)

製品情報

製品名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード
イムノキャッチ®-Adeno	10回分 ■ キット構成 反応容器 ----- 10個 検体抽出液 ----- 10本 [付属品] 滅菌綿棒 (咽頭用) ----- 10本 フィルターチップ ----- 10個 スタンド ----- 1個	室温保存	12ヵ月間	E-ET07

別売品: 滅菌綿棒 (鼻腔用: TYPE R)
一般医療機器 医科用捲綿子
ニプロスポンジスワブ®
包装単位 ----- 50本 (10本×5袋)
製品コード ----- 8-ET07
医療機器届出番号 ----- 27B1X00045000092
製造販売業者 ----- ニプロ株式会社

本試薬の使用上又は取扱い上の注意については、最新の「電子化された添付文書」をご参照ください。
POCT製品については「Eiken POCT SITE」(<https://www.eiken.co.jp/POCT/index.html>)をご覧ください。

製造販売元



栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木143番地

4417 AMK

2024年1月作成