

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット



イムノキャッチ[®] - Strep A

咽頭ぬぐい液中のA群β溶血連鎖球菌抗原の検出 (A群連鎖球菌感染の診断の補助)



抽出操作は簡便ワンステップ

抽出試薬の用時調製や静置時間は必要ありません



**イムノキャッチ[®] - Adeno*と
検体抽出液の共用が可能** (咽頭ぬぐい液の場合)

*一般的な名称: アデノウイルスキット 承認番号: 30500EZ00036000



痛みの少ないスポンジスワブ[®]を採用




反応時間は5分

操作方法

詳細は最新の電子化された添付文書をご参照ください

測定

試料を調製し反応容器に3滴滴下します

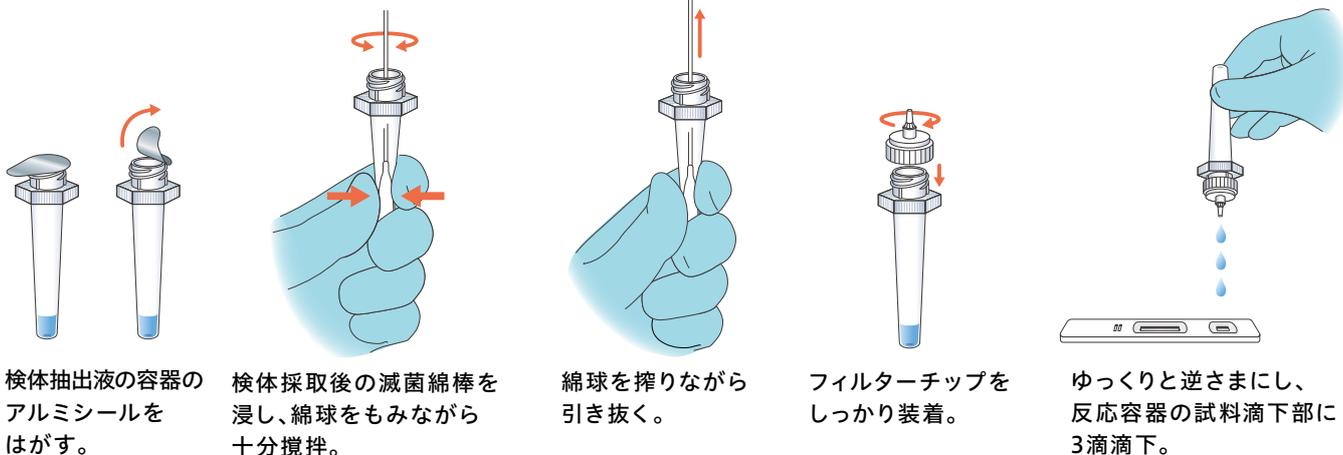

検体抽出液の容器のアルミシールをはがす。

検体採取後の滅菌綿棒を浸し、綿球をもみながら十分攪拌。

綿球を搾りながら引き抜く。

フィルターチップをしっかりと装着。

ゆっくりと逆さまにし、反応容器の試料滴下部に3滴滴下。

判定

5分後にラインの有無を確認します



陽性
赤色のコントロールラインとテストラインの両方が出現した場合

判定に従い、赤色のテスト (T) ラインが薄くても肉眼で確認されたら「陽性」と判定してください



陰性
赤色のコントロールラインのみが出現した場合



無効(再検査)
コントロールラインが出現しない場合

相関性

■ 他社製品との相関

① 他社製品1

		他社製品1 (既承認品) イムノクロマトグラフィー法		
		陽性	陰性	合計
イムノキャッチ®-Strep A	陽性	52	0	52
	陰性	0	58	58
	合計	52	58	110

陽性一致率: 100% (52/52)
陰性一致率: 100% (58/58)
全体一致率: 100% (110/110)

② 他社製品2

		他社製品2 (既承認品) イムノクロマトグラフィー法		
		陽性	陰性	合計
イムノキャッチ®-Strep A	陽性	51	1 ^{*1}	52
	陰性	0	58	58
	合計	51	59	110

陽性一致率: 100% (51/51)
陰性一致率: 98.3% (58/59)
全体一致率: 99.1% (109/110)

*1 培養法で陽性

(イムノキャッチ®-Strep A 添付文書データ)

製品情報

製品名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード
イムノキャッチ®-Strep A	10回分 ■ キット構成 反応容器 ----- 10個 検体抽出液 ----- 10本 [付属品] 滅菌綿棒 (咽頭用) ----- 10本 フィルターチップ ----- 10個 スタンド ----- 1個	室温保存	12ヵ月間	E-ET08

本試薬の使用上又は取扱い上の注意については、最新の「電子化された添付文書」をご参照ください。
POCT製品については「Eiken POCT SITE」(<https://www.eiken.co.jp/POCT/index.html>)をご覧ください。

製造販売元



栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木143番地

4415 AMK

2024年1月作成