

エコーパッド

OJ-06(F)/OJ-06S(F) (胸部電極用)

OJ-09(F) (四肢用)

用途 心電図検査用



メンテナンスにかかる手間を大幅に削減

エコーパッドはケラチンクリームと同様のはたらきをもつ電解質のパッドです。吸着電極にかぶせるだけですぐにご使用いただけます。1日1回交換してください。ケラチンクリームのように電極や皮膚に残らないので、1患者終了毎のふき取りは必要なく、すぐに次の検査が可能です。また、クリーム形状ではないため、吸着電極のゴム部への吸い込みもありません。洗浄などのメンテナンス作業が軽減できます。

●エコーパッド（胸部電極用）

成人用



OJ-06(F)
511383820
化粧箱（20pc120個入）
¥6,640

小児用




OJ-06S(F)
511383830
化粧箱（2*15pc180個入）
¥9,500

ご使用方法



1) アルミシートを破り、パッドを取り出します。

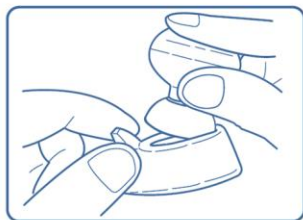

2) パッドの耳を引っ張りながら電極に被せます。



3) 電極全体が均等に覆われるように形を整えてください。

●組み合わせ電極



胸部電極
TEE-01RA（成人用） 510189320
単/高化銀電極
1袋6個入 ¥13,200



胸部電極
TE-01-6C（成人用） 511102460
1袋6個入 ¥6,350



胸部電極
TE-01（成人用） 51Y833600
耐水性の強い合成ゴムを使用しています。
1袋6個入 ¥4,700



胸部電極
TE-13A(S)（小児用） 51Y833700
1袋6個入 ¥4,150



※取り付けイメージ

●エコーパッド（四肢電極用）



OJ-09(F)
511383840
化粧箱（30pc120個入）
¥6,660

ご使用方法




1) パッドを袋から取り出し、タブをつまんで保護紙からはがします。



2) パッドを電極に合せて貼り、保護フィルムの上からなぞります。



3) タブの剥離紙をはがします。

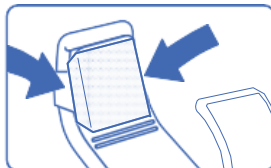

4) パッドの両端を折り曲げ、電極に固定させます。



5) パッドから保護フィルムをはがします。

●組み合わせ電極



エーカークリップ
TEE-43RG（成人用） 510189310
単/高化銀電極
1袋4個入 ¥10,400



エーカークリップ
TE-43-4C（成人用） 511102470
1袋4個入 ¥9,000



エーカークリップ
TE-43（成人用） 51S360008
2段階の強度切替えが出来ます。「サニード」等を利用してモニタやポリグラフ等に接続できます。
1袋4個入 ¥7,200



エーカークリップ
TE-36A（小児用） 51Y833000
1袋4個入 ¥12,000



※取り付けイメージ