

KaWe 駆血帯 取扱説明書

この度は、KaWe 駆血帯をご購入いただき、誠にありがとうございます。

KaWe 駆血帯を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意



注意

1. 本品は、駆血帯です。使用目的以外に使用しないでください。
2. クリップ A 部・B 部が破損・変形したり、伸縮ベルトが損傷している場合は、使用しないでください。
3. 長時間本品を装着したままにしないでください。
4. 装着中、圧迫状態を確認してください（周辺皮膚の損傷、圧迫部遠位の色、体温等）。
5. 自動洗浄機、消毒器での洗浄消毒はしないでください。
6. 滅菌はしないでください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造



注文コード	品番	商品名
361-001-02	12.10110.031	KaWe 駆血帯

3. 一般的な使用方法とその注意事項

- 1) 伸縮ベルトを腕、又は脚の任意の部位に巻き、クリップ A 部をカチッと音がするまで B 部に差し込み、固定します。
- 2) 伸縮ベルトの端を矢印方向へまっすぐ引っ張って、必要なところまで締め付けます。
- 3) 取り外す際は、クリップ A 部をしっかりと押し込んで伸縮ベルトの締め付けを徐々に緩めます。その後リリースボタンを押し、クリップ A 部を B 部から外します。



! 注意

1. 締め付ける際は、クリップ B 部を指で持ち上げながら伸縮ベルトを引いてください。クリップ B 部を皮膚につけたり、上下に振りながら引くと、皮膚を挟むおそれがあります。
2. 緩めずにリリースボタンを押すと、反動でクリップ A 部が眼球や顔等に当たるおそれがあります。

4. 清掃、保管方法に関する事項

- 1) 柔らかいリントフリーの布で清拭し、目視できる汚れを除去してください。
- 2) アルコール等で湿らせたやわらかい布で清拭消毒してください。
- 3) 直射日光を避け、常温常湿で保管してください。

! 注意

1. 自動洗浄機、消毒器での洗浄消毒はしないでください。
2. 滅菌はしないでください。
3. 血液等で污染された場合は廃棄してください。

5. 技術仕様

- 1) 寸法
 - 全 長 : 約 45 cm
 - 幅 : 約 2.5 cm
- 2) 材質
 - クリップ A 部・B 部 : ナイロン
 - 伸縮ベルト : ポリエステル+合成ゴム（ラテックスフリー）

6. アフターサービスとその連絡先に関する事項

輸入業者: **村中医療器 株式会社**

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546

