


●外箱サイズ：横 143mm×縦 42.08mm

# MMI<sup>®</sup> LED ペンライト

各部のなまえと乾電池の入れ方

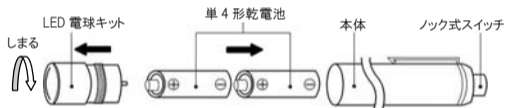

■乾電池：単 4 形×2 本

注文コード

502-014-90 アクアブルー

502-014-91 パーガンティ

502-014-92 グリーン

502-014-93 シルバー

■ランプ：3V 20mA LED 電球

注文コード

502-014-94 ゴールド

502-014-95 スーパー LED 電球キット(MMI-918 用)

## ⚠ 注意

K61-901-005-02

### 安全上のご注意

■ 次のことを守ってください。

- ① 照明が暗くなってきたとき、または照明が点かないときは、予備の電池、LED 電球キットに交換して下さい。
- ② LED 電球キットは、専用のキット(注文コード：502-014-95)を使用して下さい。
- ③ 長時間使わない時は必ず電池を取り出して下さい(電池の液もれ防止のため)。
- ④ 電池の注意表示に従って正しく使用して下さい。
- ⑤ 定期的に点検(点灯、電池の液もれ等)して下さい。
- ⑥ ノック式スイッチは、必要以上に ON-OFF を繰り返すと破損するおそれがあります。ゆっくりスイッチを ON-OFF して下さい。
- ⑦ ノック式スイッチが ON のまま電池を入れて LED 電球キットを取り付けると、電球がちらつくことがあります。いったん OFF にして LED 電球キットを取り付け直して下さい。

### ご使用方法

■ 電池の入れ方：LED 電球キットを回してはらず、電池を 2 本とも LED 電球キット側に (+) 極がくるよう正しく入れて下さい。

(入れる向きを誤ると点灯せず、電池の液もれの原因にもなります)。

■ ノック式スイッチ：押し込むと点灯し(ON)、再度押し込むと消灯します(OFF)。

輸入・販売元 村中医療器株式会社