

ヒーリフト・スムースブーツ

取扱説明書

1. 安全上の注意

ご使用の際は、6～8 時間毎にブーツを外して、虚血による変色がないか確認してください。

2. 製品概要

本品は、かかとにかかる体圧を軽減し、床ずれを防止するようにデザインされています。患者の足にぴったり合うよう装着でき、必要に応じて追加パッドを使用することもできます。

[標準セット]

ヒーリフト・スムースブーツ（ボトムエレベーションパッド、固定ベルト含む） 1 個
追加パッド 1 個



注文コード	商品名	身長(cm)	体重(kg)	ふくらはぎ周(cm)
030-104-01	ヒーリフト・スムースブーツ	152～195	54～113	20～35
030-104-03	ヒーリフト・スムースブーツ Petite(スモールサイズ)	117～162	31～59	15～25

材質:ポリウレタン(ラテックスフリー)

3. 使用方法

- 固定ベルトを外し、開口部を広げます。その際、中に入っている追加パッドを取り出します。
※追加パッドは後で必要になるので保管しておいてください。
- 患者の下肢をボトムエレベーションパッドの上にのせ、かかとを浮かせます。
- 固定ベルトをすねの上からまわしてDリングに通し、折り返してすねのところで固定します。固定ベルトが2本ともしっかり留められていることを確認してください。
※足の甲の部分で固定しないでください。
※締め付けすぎにならないよう注意してください。



- 4) 患者の足がブーツ本体内でフィットしているか確認してください。
 ※かかとのスペースとベッドの間に指が入ることを確認してください。



※感染防止のため、1 患者に 1 個の使用をお奨めします。

【患者の足とブーツをフィットさせるための追加パッドの使用例】

付属の追加パッドは補助具としてご使用ください。追加パッドの片面は粘着面になっていますので、紙シートをはがすと本体に貼り付けることができます。

1. 高さ・幅の調節	2. 長い下腿	3. アキレス腱
かかとがベッドに接触したり、ブーツが大きい場合、追加パッドをボトムエレベーションパッドの上に貼り付けます。	追加パッドを体幹部方向にずらして貼り付けます。	アキレス腱のあたりに赤みが見られる場合、ボトムエレベーションパッドにV字型の切れ込みを入れます。追加パッドも使用する場合は同様に切り込みを入れ、ボトムエレベーションパッドの上に貼り付けます。
		
4. 回転しないようサポート	5. 足底部をホールド	6. DVT ポンプ使用時
追加パッドをブーツの外側に平行にあてがって貼り付けます。	追加パッドを足底部に沿うよう垂直にあてがって貼り付けます。	DVT ポンプのチューブは必ずブーツの外に出してください。チューブを巻きこむと床ずれの原因になることがあります。
		

4. 洗浄方法

中性洗剤を使用してぬるま湯で手洗いをするか、アルコール等で湿らせた布で清拭してください。洗濯機、乾燥機をご使用の際は、固定ベルトをしっかりと締め、洗濯ネットに入れて洗浄してください。

5. 連絡先

村中医療器株式会社
 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
 TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>