

ステッキ


取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

- 1) 杖としての用途以外に使用しないでください。また、本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。
- 2) 杖に亀裂や変形がある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
- 3) お使いになる前に各部を点検してください。
- 4) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなった場合は、新しい足ゴムと交換してください。
- 5) 斜めに杖をついたり、濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところでは、じゅうぶん気をつけてご使用ください。

2. 製品概要

代表的写真

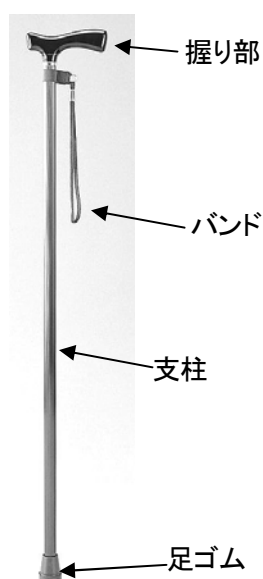


商品名	アルミ製ステッキ, バンド付, 木製握り	木製ステッキ, 光沢あり, バンド付, 木製握り	木製ステッキ, 木目模様, バンド付, 木製握り
注文コード	502-012-01	502-012-02	502-012-21
品番	PW-108	PW-6039	PW-6080A
全長	880mm	880mm	870mm
杖先径	φ 19mm	φ 16mm	φ 16mm
材質	支柱 : アルミニウム合金 握り部 : 木製	木製	木製
重量	275g	255g	260 g

3. 杖の長さの調節

- 1) 足ゴムを支柱から取り外します。
- 2) 切断したい位置にしるしをつけ、木製ステッキはのこぎりで、アルミ製ステッキはパイプカッターで切断します。
- 3) 切り口をやすりでなめらかにして足ゴムを装着します。

【杖の高さの目安】

- 腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- 腰の曲がった方は、曲がった状態で合わせてください。
- 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。

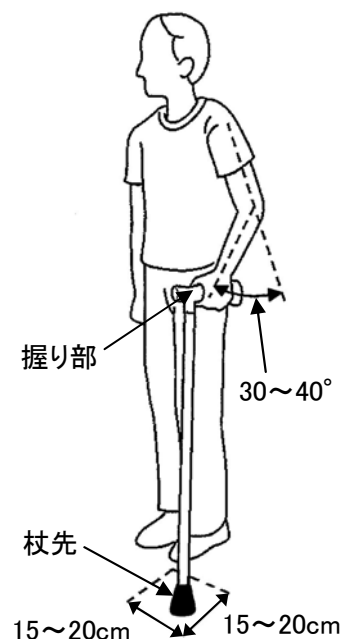

4. お手入れ

- 1) ご使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>