


ソルボフィットバンド手首用

ソルボセインとは、よりすぐれた衝撃吸収素材で一点に力が加わった時、横方向に分散する性質をもっていますのでフィットバンドを装着した時にパット（ソルボセイン）全体に平均的な圧力がえられます。

橈骨と尺骨の手首の内側はパット（ソルボセイン）の間をあけて下さい。それによってうっ血を防げますので、長時間の安定した圧迫固定がえられます。

橈骨と尺骨の内側にパット（ソルボセイン）を合わせて長さを決めて下さい。長い場合はハサミで切って下さい。パットの裏側の両面テープをはがしてバンドに張りつけて下さい。手を開いて装着して下さい。

装着図

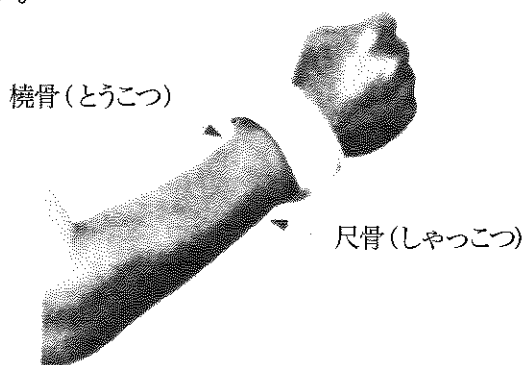

●お問い合わせ先
三進興産株式会社

本社・東京営業所／〒169-0074 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号

新宿フロントタワー ☎03(5338)8590(代) FAX.03(5338)8599

大阪営業所／〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号

中之島セントラルタワー23階 ☎06(4707)2371 FAX.06(4707)2399

<http://www.sorbo-japan.com/>