

フェイスシールド／アイシールド


取扱説明書

1. 安全上の注意


- 1) 本品は、微小な粉塵や水滴等の飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐことを目的としています。使用者の眼や身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。
- 2) 分解、改造等はしないでください。
- 3) フェイスシールドレンズ及びアイシールドレンズ（いずれも以下、レンズ）は使い捨て製品です。レンズ面にキズ・汚れ等が付着すると視界がさえぎられ、事故を引き起こす原因となりますので、適宜新しいレンズと交換してください。
- 4) レンズの縁（レンズの外周の切断面）は厚さが薄いため、皮膚を傷つける等けがをすることがあります。注意してご使用ください。
- 5) 交換する場合は純正品をご使用ください。

2. 一般的な使用方法とその注意事項

【フェイスシールド】

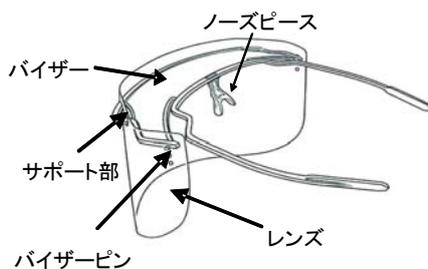

【アイシールド】

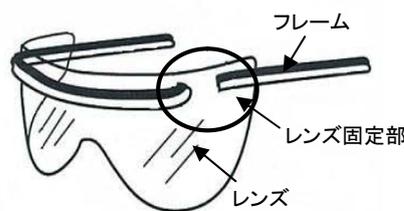

【アイシールドネックストラップ（オプション）】




レンズ：ポリエステルフィルム（静電気防止、曇り止めコーティング）

バイザー：ポリプロピレン ノーズピース：ポリスチレン ネックストラップ：スチレン系熱可塑性エラストマー

フェイスシールドの組立

- ① バイザーの凹面を上にし、ノーズピースを向きに注意して下から差し込みます。

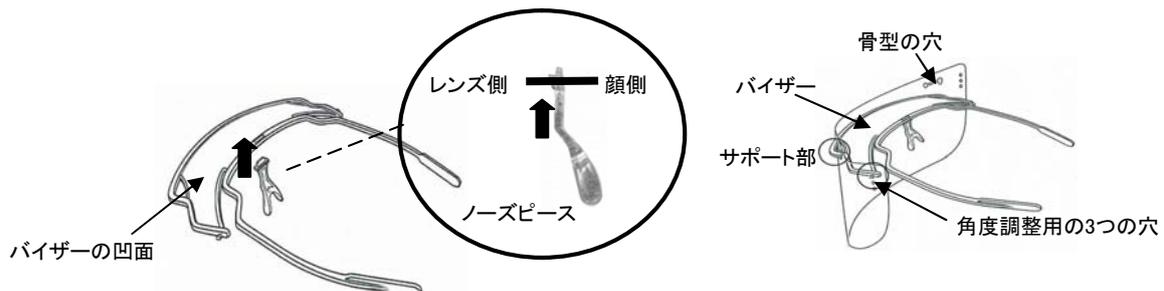

- ② バイザーピンを、レンズの一端（左右いずれでもよい）にある角度調整用の3つの穴のいずれかに差し込みます。
- ③ バイザーのサポート部を、レンズの左上（又は右上）にある骨型の穴にはめ込みます。
- ④ バイザーの縁に沿ってレンズをカーブさせ、もう一端にあるバイザーのサポート部をレンズの骨型の穴にはめ込みます。
- ⑤ 反対側のバイザーピンを、レンズの角度調整用の穴に差し込みます。


⚠ 注意

- 1) バイザーピンをレンズに差し込む位置によって、レンズの角度を調整することが可能です。
- 2) バイザーピンは、左右同じ位置の穴に差し込んでご使用ください。

- ⑥ レンズが、左右サポート部及びバイザーピンにしっかり固定されているか確認してください。

アイシールドの組立

- ① フレームの突起部分を下側にして、フレームの両端をレンズ内側の穴（2箇所）に数センチ差し込みます。
- ② レンズ端を内側に丸め、レンズ外側の穴（両端2箇所）にそれぞれ通します。
- ③ フレームのレンズ固定部まで、レンズをスライドさせます。

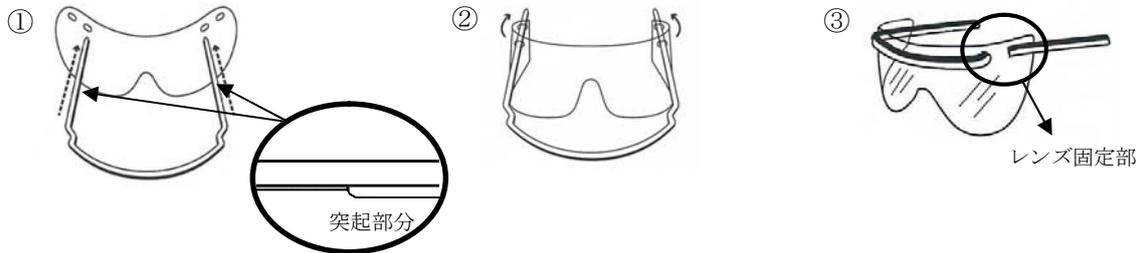**アイシールドネックストラップ(オプション)の取付**

レンズを取り付けた後、フレームの両端にストラップを取り付けます。

⚠ 注意

ストラップは、ねじれないように取り付けてください。

**4. 保管方法に関する事項**

- 1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
- 2) バイザー・ノーズピース・フレームは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤で手洗いし、柔らかい布でキズがつかないように拭き取ってください。
- 3) 消毒する場合は、70%エタノールを含ませた布等で拭いてください。

⚠ 注意

- ①プラスチック用の洗浄剤、消毒剤の使用を推奨します。
- ②超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクター等で洗浄しないでください。
- ③薬液への浸漬、ガス・熱等による滅菌はしないでください。

5. 仕様

フェイスシールド（ノーズピース含む）：約 27g アイシールド：約 8g

6. アフターサービスとその連絡先に関する事項

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>

	商品コード	品番	商品名
フェイスシールド	030-180-11	2452	フェイスシールド`スターキット, バイザー`3 本(ノーズピース付)レンズ` 15 枚入
	030-180-12	2210-100	フェイスシールド`クリアレンズ` (100 枚入)
	030-180-13	2211-100	フェイスシールド`バイザー, ノーズピース付, 10 色`×10 本入
アイシールド	030-180-01	9452	アイシールド`スターキット, フレーム` 10 本(10 色), レンズ` 25 枚入
	030-180-02	9210-250	アイシールド`クリアレンズ` (250 枚入)
	030-180-03	9211-100	アイシールド`フレーム, 10 色`×10 本入
オプション	030-180-21	9505-50	アイシールド`ネックストラップ`, 5 色`×10 本入