

# 折りたたみ式簡易便器

## 取扱説明書



## はじめに

この度は、折りたたみ式簡易便器をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、折りたたみ式簡易便器の正しい取扱方法について説明しています。

折りたたみ式簡易便器を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、お使いになるときにいつでも見られるよう、大切に保管してください。

## 1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意

使用する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁止、注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁止」「注意」の三つに区分して示しています。

図記号の例	
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 <b>禁忌・禁止</b>	人が死亡または重症を負うことが想定されるため、避けるべき患者や使用方法を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
 <b>ポイント</b>	使用上のポイントや、確認いただきたいことを示します。

**いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

 **注意**

1. 本品は、簡易便器またはシャワーチェア（便器を取り外した場合）として使用するものです。それ以外の目的で使用しないでください。
2. 本品の改造をしないでください。
3. 背もたれ及び肘掛けと座面との隙間に頭部等を入れないでください。挟み込むおそれがあります。
4. プッシュボタン用の穴に指等を入れないでください。抜けなくなるおそれがあります。
5. お使いになる前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。破損、変形等の異常がみられた際は使用しないでください。
6. 本品を使用する際は、平らで安定した場所においてください。
7. お湯をはった浴槽内では使用しないでください。本品が浮き上がったりパイプ内に水が入り腐食等の原因となるおそれがあります。
8. 踏み台のように本品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。
9. 座ったまま引きずったり、背もたれに体重をかけすぎないでください。破損や転倒のおそれがあります。
10. 勢いよく座ると破損や変形、転倒のおそれがあります。しっかりと手すりを持ち、ゆっくりと座面の中央に腰掛けてください。立ち上がる際は体を前方に傾けてゆっくりと体重を移動させながら立ってください。

## 2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

### 1) 材質

本体：アルミニウム

座面・背もたれ・肘掛け：発泡ポリウレタン

便器（蓋付）：ポリプロピレン

### 2) 寸法及び重量

幅 61～62×奥行 56～58×高さ 74～84cm

座面サイズ：幅 41×奥行 40cm

座面高：45～55cm

(2.5cm 間隔で 5 段階調節)

背もたれ高：31cm

肘掛け高：21cm

重量：5.8kg



### 3) 耐荷重：120kg

注文コード	品番	商品名
502-022-10	HT2091	折りたたみ式簡易便器, ソフトU字座面(5段階調節,25mmピッチ)

### 補充品

注文コード	品番	商品名
502-022-27	HS9011	足ゴム,グレー,シャワーチェアー・簡易便器用

### 3. 組立方法

- 1) 本体をひっくり返して、両サイドに脚部を開きます。




- 2) 座面下部の便座受けフレームを手前に下ろし、左右の脚の差込シャフトに挿入します。



奥まで  
しっかり挿入する

- 3) 本体を横にして脚部（4本）をパイプの中に差し込みます。

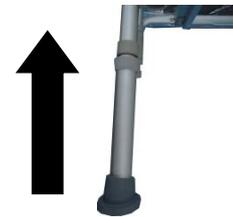

#### 👉ポイント

しっかりと差し込まれていないとガタつきの原因になります。

- 4) 高さを調節する場合は、脚部のプッシュボタンで脚先をすべて同じ高さに調節します。4箇所（4箇所）のプッシュボタンすべてが固定穴から大きく飛び出した状態にします。

プッシュ  
ボタン



#### 👉ポイント

1. プッシュボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。押し込みすぎた場合は、一旦脚部を引き抜き、プッシュボタンをパイプの中から押し出してから再度調節してください。
2. プッシュボタンの突出が不完全な場合、本品が傾き、転倒するおそれがあります。

5) 本体を起こし、座面を手前に下ろします。



6) 足ゴムが外れたりずれたりしないよう、床面と平行になるように足ゴムを回して調整し、しっかりと固定します。

7) 便器は取っ手部を手前にして持ち、座面下部の便座受けフレームのサイドレールに奥まで差し込みます。使用する際は便器の蓋を外します。



### 注意

本品を使用する際は、平らで安定した場所においてください。

#### **4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項**

- 1) 腐食等の原因となりますので、使用後は水を拭き取り、じゅうぶん乾燥させてください。
- 2) 本品についた汚れを落とす場合は、希釈した中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- 3) 足ゴムを交換する際は、足ゴムをねじりながら引っ張り取り外してください。  
交換用の足ゴムを取り付ける際も、ねじりながら確実に奥まで差し込んでください。
- 4) 乾燥した場所で保管してください。
- 5) 耐用期間：1年 [自己認証（当社データ）による]。

#### **5. 保守点検に関する事項**

- 1) 各部に傷、亀裂、ゆがみ、ガタつき、変形等の異常がないことを確認してください。異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 2) 固定にゆるみやガタつきがある場合は、必ず六角ビス等を増し締めしてください。増し締め後もゆるみやガタつきがある場合は絶対に使用しないでください。

#### **6. アフターサービスとその連絡先に関する事項**

輸入業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>