

エルボーリフト・サスペンションパッド


取扱説明書

1. 安全上の注意

ご使用の際は、6～8 時間毎にパッドを外して、装着部の状態を確認してください。

2. 製品概要

本品は、肘を持ち上げることで接触を軽減し、衝撃を和らげ、床ずれを防止するようにデザインされています。

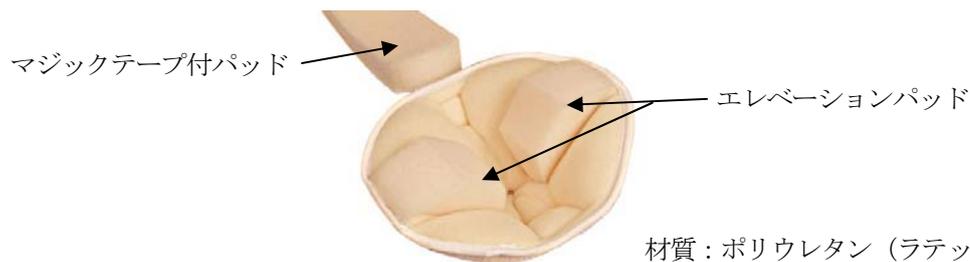

注文コード	品番	商品名
030-104-02	10831727009055	エルボーリフト, サスペンションパッド

3. 使用方法

- マジックテープ付パッドを外して本体を広げます。
- 肘先端部を本体中心の溝に位置するように合わせます。
- 患者の上腕と前腕をエレベーションパッドにあてがい、マジックテープ付パッドを肘の内側にまわします。
※肘先端部がエレベーションパッドに当たらないようにしてください。
- マジックテープ付パッドがゆる過ぎず、また締め過ぎないように注意して、患者の腕にしっかりとマジックテープで固定します。

※感染防止のため、1 患者に 1 個の使用をお奨めします。



4. 洗浄方法

中性洗剤を使用して手洗いすることをお勧めします。洗濯機、乾燥機をご使用の際は、マジックテープ付パッドのマジックテープを本体に固定し、洗濯ネットに入れて洗浄してください。

5. 連絡先

村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>