

## 【取扱説明書】

販売名：サージステイン

### 【警告】

- ・ステンレス製以外の金属への使用については必ずご相談ください。
- ・他の洗剤、薬品等との混合は避けてください。
- ・本製品には消毒、滅菌効果はありません。
- ・使用時にはゴム手袋、マスク、ガウン等を着用してください。
- ・高温、多湿の場所での保存は避けてください。
- ・10分以上の浸漬は避けてください。
- ・廃棄の際は、大量の水といっしょに排水してください。
- ・誤飲防止のために、保管、取り扱いには十分注意してください。
- ・万一飲み込んだ場合には、水を飲ませる等の処置の上、専門医の診断を受けてください。
- ・目に入った場合には、直ちに水で洗い流して専門医の診断を受けてください。
- ・専用の箱から製品を取り出す際には十分に注意してください。
- ・輸送の影響から、ボトルのキャップがゆるんでいることがありますので十分に注意してください。

### 【規格】

7-3004 (4.0%×4本入)

### 【主成分】

プロピルグリコールエーテル、非イオン界面活性剤、リン酸、水

### 【使用用途】

医療用器具、器材用熱やけ・サビ除去剤

### 【使用方法】

- ①原液1に対して温水7(50℃から60℃)の割合で希釈液を作ります。
- ②洗浄後の器具を希釈液に5分間～10分間浸漬し、ブラッシングを行います。
- ③器具を十分にすすぎます。

### 【使用期限】

製造年月日から3年間有効

※製造年月日は、外箱とボトル本体に印刷されています

### 【使用上の注意】

- ステンレス製以外の金属への使用については必ずご相談ください。金属の種類によっては表面に影響が出ることがあります。
- 熱やけやサビを除去した後は、十分に器具をすすぎ洗いしてください。除去剤が付着したまま放置した場合、器具をいためることがあります。

### 【保管方法】

本製品を保管するときには、次の事項に注意すること。

- 1) 水のかからない場所に保管すること。
- 2) 気圧、温度、風通し、日光、ほこりなどにより悪影響の生じるおそれのない場所に保管すること。
- 3) 多量に重ねて保管しないこと。

### 【包装】

製品は受領した時点で無傷であることを十分に注意深く確認してください。また、万が一、包装または製品に傷等がある場合には使用せずに、輸入元：(株)アムテックまでご連絡の上、ご返送をお願いします。

### 【製造元】

米国 Ruhof Corporation.  
393 Sagamore Avenue, Mineola, NY 11501  
TEL:+1-516-294-5888 FAX:+1-516-248-6456

### 【輸入元】

本製品の品質・本質・信頼性・安全性・効果又は性能に対する苦情は輸入元：(株)アムテックへご連絡をおねがいします。

株式会社アムテック

〒168-0081

東京都杉並区宮前 2-10-42 宮前ヴィレッジC-104

TEL:03-3332-7807

FAX:03-3332-7843

### 【発売元】

宮野医療器株式会社

〒650-0017

兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

TEL:078-371-2121(大代表)

FAX:078-371-2309

東京宮野器械株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2-16-7

TEL:03-3816-4575

FAX:03-3814-1566

### 【販売業者】

