


EA4-101 らくらく4点杖

～取扱説明書～

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。
また、読まれたあとは大切に保管してください。

各部の名称と製品仕様

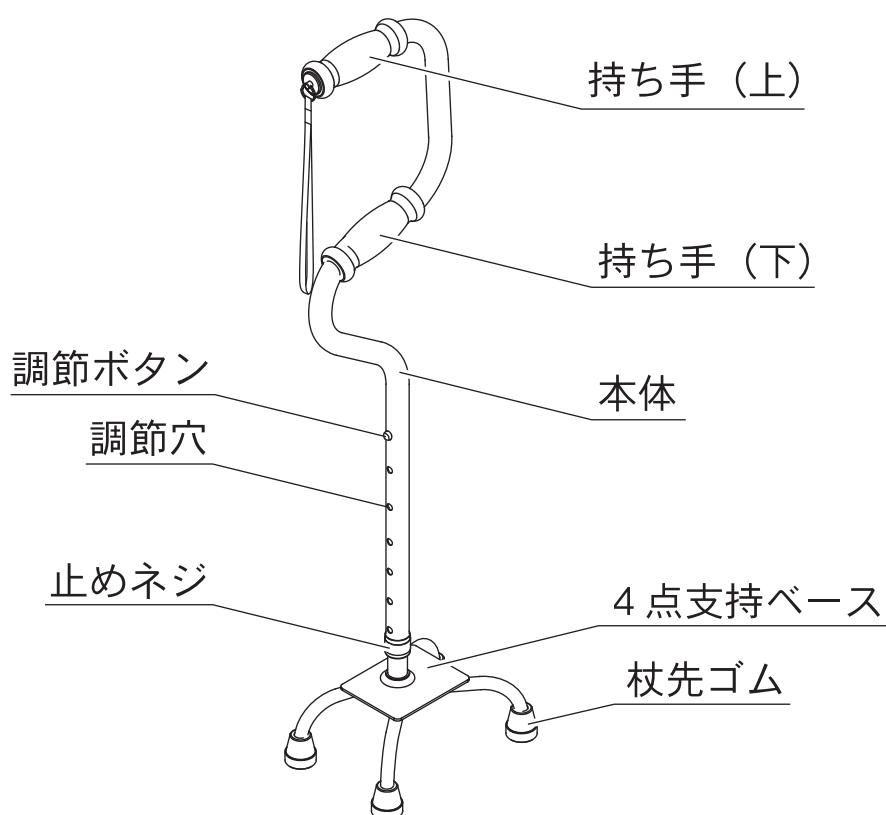

サイズ	77.5 ～ 93cm(7ポジション)	本体材質	アルミ
重量	815 g	4点支持ベース材質	スチール
脚部(接地部)	15.5×23cm	持ち手材質	ポリウレタン

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

福祉用具総合メーカー



株式会社 幸和製作所

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)



0120-508-058

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- この製品は歩行を補助するためのものですので、他の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。



注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 使用者の身体に合った高さに調節してから使用してください。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを時々確認してください。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面や傾斜している場所では、十分注意してください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分注意してください。
- 4点支持ベースを踏んでしまうと、転倒しケガをするおそれがあるため、十分注意して使用してください。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

ご使用後 および 保管方法


- 使用後は、杖先ゴムについた砂などを取り除いてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。

ご使用方法

■長さの調節方法


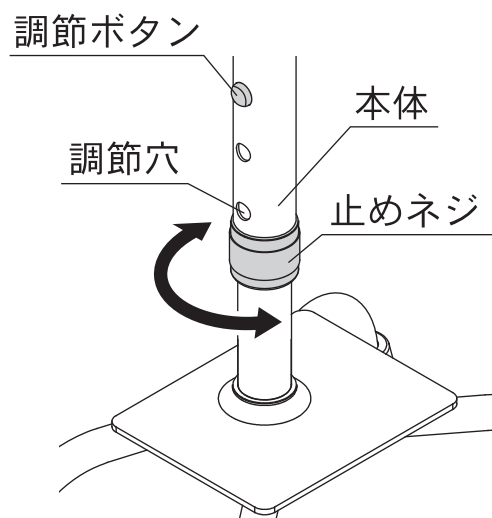


- 1 止めネジをゆるめてください。
(右に回すとゆるみます。)
- 2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、
適度な長さに調節してください。
持ち手(上)が、腰骨の位置にくるぐらい
が適度な長さの目安です。
- 3 止めネジを確実に締めてください。
(左に回すと締まります。)

⚠注意

- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されているか、かならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

■4点支持ベースの向きの変え方(右手仕様・左手仕様)

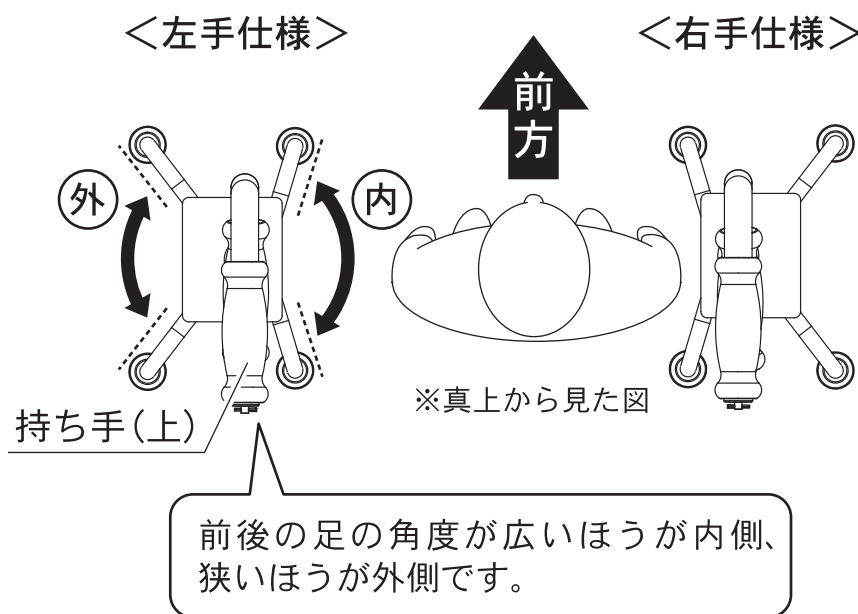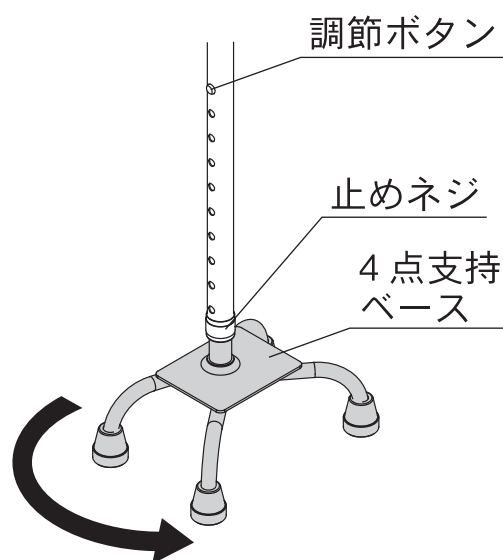

止めネジをゆるめ、調節ボタンを指で押さえながら、4点支持ベースを180度回転させてください。調節ボタンが調節穴より出たことを確認してから、止めネジを確実に締めてください。(※出荷時は右手仕様になっております。)

⚠注意

- 杖が、持ち手に対して正しい仕様になっていることをかならず確認してください。

