

ストリームガード・オーバル(L) (1302.1304) 取扱説明書

本品は気管内挿管時の気管チューブと併用するディスポーザブル・バイトブロックです。

使用方法 下図はストリームガード・オーバル(1302)の写真です。ストリームガード・オーバルL(1304)も同様の手順です。



1
予め気管チューブに本体を装着します。
スリットの広く開いた側から装着すると
スムーズに装着できます。
(気管内挿管後に装着する場合は、先に
インフレーションラインを本体に通し、後に
気管チューブと吸引ラインをつまんでスリ
ットの広く開いた側から装着してゆきます)



2
本体をスライドさせて、吸引ライン、インフ
レーションラインを覆う位置へスライドさせ
ます。
(移動後、吸引ライン、インフレーションライ
ンが正常に機能することを確認してください)



3
気管チューブを挿管し、本体が適切な
位置になるよう調整します。




4
本体を気管チューブに固定します。
セーフティフックにテープを引っ掛けて
2周以上巻き付けて本体をしっかりと固定
します。
固定後、施設のプロトコルに従って
気管チューブを患者様へ固定してください。

※本体装着時はインフレーションライン、吸引ラインを傷つけないよう注意してください。本体装着後、気管チューブの機能に問題ないことを確認、観察してください。

使用上の注意・警告

- 本品は一人患者用です。
- 本品は未滅菌品です。消毒にはアルコール系、次亜塩素酸系消毒剤をご使用下さい。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品であり生命維持を目的とした製品ではありません。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品でありチューブ固定、チューブ保護の確実性を保証するものではありません。
- 咬合等により本体の内径が小さくなる場合、気管チューブの機能を低下させる場合があります。
- 気管チューブの内径が歪む場合があります。気管支ファイバー他を気管チューブ内に挿入される場合は、このことを考慮して挿入されるデバイスのサイズを選択していただく、もしくはストリームガードの使用を控えてください。*
- 専門の医師の指導のもとご使用ください。* *
- 異常が早期に発見できるよう常に監視してください。
- 本体に損傷や変形等異常が認められる場合は直ちに新しいものと交換してください。
- パッケージや本体に破れ、破損等異常が認められる場合には使用しないでください。
- 挿管および患者様への固定に関しては施設のプロトコルに従ってください。
- 雑菌の増殖が考えられますので院内の手順に従って定期的に交換してください。

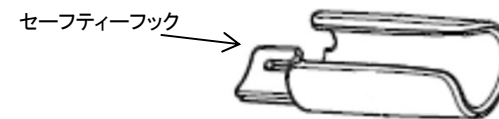

ストリームガード・オーバル (1302)
仕様: 外挿式バイトブロック(長円形断面) / 未滅菌
材質: ポリプロピレン
適合サイズ:
カフ上部吸引ライン付気管チューブID=7.0~8.0
JAN: 4580320710088
製造国: 日本 色: 水色透明

ストリームガード・オーバルL (1304)
仕様: 外挿式バイトブロック(長円形断面) / 未滅菌
材質: ポリプロピレン
適合サイズ:
カフ上部吸引ライン付気管チューブID=8.0~9.0
JAN: 4580320710101
製造国: 日本 色: 黄色透明