

カテリープラス™ 3つの思いやり

カテリープラス™は新開発のウレタンジェル粘着剤がこれまでにない「透湿性」(当社比)を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで両立しました。

ウレタンジェル粘着剤は一般的なアクリル粘着剤の約7倍*の高い透湿性があり、長時間の貼付でも快適です。

*当社調べ(社内データ:保証値ではありません)

高透湿で
さらさら

ウレタンジェル
粘着剤

高固定で
あんしん

低刺激で
やさしい

ウレタンジェル粘着剤をフィルム全面にムラなくコーティングし、皮膚の凹凸にしっかりと密着します。

しなやかに変形するウレタンジェル粘着剤が、はがす時の角質のはく離・損傷を軽減します。

「高透湿」「高固定」「低刺激」の3つの思いやりをさらにプラスした「新しい固定」をご提案します。

その他の特長

優れた柔軟性・伸縮性

伸びが良くしなやかな質感のため、動きの多い箇所への貼付でも違和感の少ない自然な貼り心地です。

高い視認性

貼付部分の状態観察が容易なため、発赤や腫脹・液漏れなどの早期発見が可能です。

はく離時の痛みが少ない






はく離時の痛みを抑えた肌にやさしい貼り心地で、患者の負担を軽減します。(社内データ)

優れた滑り性

滑りの良いフィルム表面により、衣服やリネン等が引っかかりにくくはがれを抑制できます。

防水性・バクテリアバリア性

防水性に優れているため、貼付したままシャワー浴が可能。外部からの細菌の侵入も防ぎます。(社内データ)

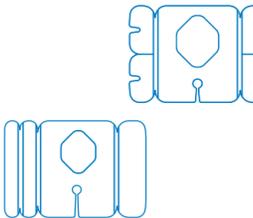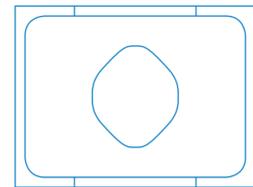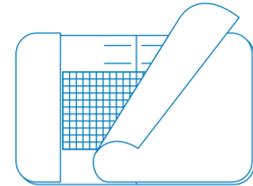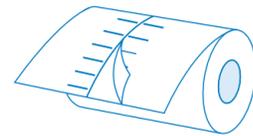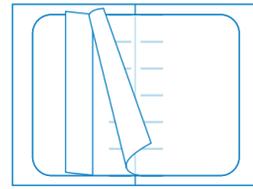

カテリープラス™ CATHEREEPLUS..

EOG滅菌済

品番	サイズ	1箱	標準価格
CPS 0203	25mm×30mm	30枚	3,600円
CPS 0405	40mm×50mm	50枚	6,000円
CPS 0608	60mm×80mm	35枚	6,000円
CPS 0811	85mm×110mm	30枚	6,750円
CPS 1114	110mm×140mm	25枚	6,750円
CPS 1820	180mm×200mm	12枚	6,000円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材(救急絆創膏)
医療機器届出番号：13B2X00218130110

カテリープラス™ロール CATHEREEPLUS..ROLL

未滅菌品

品番	サイズ	1箱	標準価格
CPSP 0510	50mm×10m	1巻	2,800円
CPSP 1010	100mm×10m	1巻	5,000円
CPSP 1510	150mm×10m	1巻	6,800円

カテリープラス™パッド CATHEREEPLUS..PAD

EOG滅菌済

品番	サイズ		1箱	標準価格
	粘着部	パッド部		
CPSP0508	50mm×80mm	25mm×50mm	50枚	7,800円
CPSP0610	60mm×100mm	30mm×65mm	50枚	11,300円
CPSP0812	80mm×120mm	40mm×80mm	25枚	8,300円
CPSP0915	90mm×150mm	50mm×100mm	20枚	8,500円
CPSP0921	90mm×210mm	50mm×160mm	15枚	7,900円

一般医療機器：救急絆創膏(カテーテル被覆・保護材)
医療機器届出番号：13B2X00218211201

カテリープラス™I.V. CATHEREEPLUS..I.V.

EOG滅菌済

品番	サイズ			1箱	標準価格
	粘着部	観察部	カテーテル固定用テープ		
IV0608	60mm×80mm	34mm×39mm	15mm×80mm×3片	35枚	5,800円
IV0811	80mm×110mm	44mm×51mm		30枚	6,500円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：13B2X00218221301

カテリープラス™I.V. スリット CATHEREEPLUS..I.V. SLIT

EOG滅菌済

品番	サイズ			1箱	標準価格
	粘着部	観察部	カテーテル固定用テープ		
IVS0709 (未採用)	70mm×90mm	34mm×39mm	12.5mm×90mm×2片	50枚	8,250円
			25mm×90mm×1片		
IVS0810 (CV用)	80mm×95mm	44mm×51mm	23mm×47.5mm×4片	30枚	7,500円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：13B2X00218221302

TMは商標です。

MADE IN JAPAN

FOR BETTER BEING
いつも笑顔でいたいから —ニチバン—

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

●ホームページ: <http://www.nichiban.co.jp/>

SEN1581AEXD



カテリープラス™

カテリープラス™ ロール

カテリープラス™ パッド

カテリープラス™ I.V.

カテリープラス™ I.V. スリット



Safety
Easy Operation
Accuracy

Safety: 安全な製品づくりを通して安心をお届けします。
Easy Operation: どなたにとっても使いやすい製品を目指します。
Accuracy: 信頼される確かな品質を追求し続けます。
ニチバンは、SEAに基づいた製品づくりにより、医療の発展に貢献します。


業界初 ウレタンジェル粘着剤を採用した

“カテリープラス™”シリーズ



ウレタンジェル粘着剤は、汗などの水分を逃がす透湿性が非常に高い粘着剤です。透湿性が高いと皮膚の浸軟を防ぎ、長期間、安定した固定力を維持し続けます。また、ウレタンジェル粘着剤特有のしっとりとした感触により、はく離時の皮膚へのダメージを軽減します。


カテリープラス™ (ウレタンジェル粘着剤)

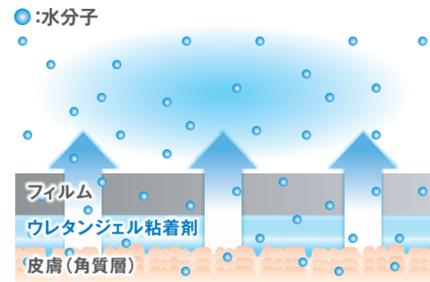

高透湿のウレタンジェル粘着剤により、貼付中に水分(汗など)の貯留がおきにくく、長時間の固定が可能です。


貼付中
(イメージ)

従来品 (アクリル粘着剤)

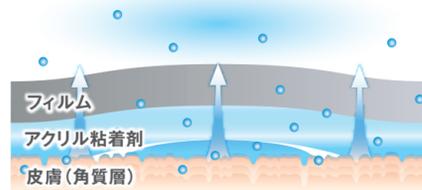

透湿性の低いアクリル粘着剤では、汗の貯留によりテープがはがれやすくなります。


カテリープラス™ (ウレタンジェル粘着剤)

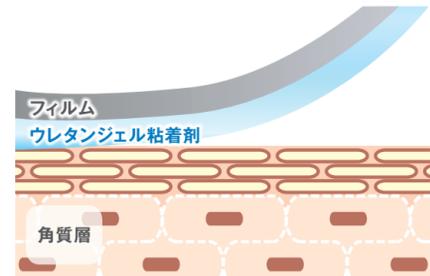

ウレタンジェル粘着剤特有のしっとりとした感触の粘着性と高透湿により皮膚の浸軟を防ぎ、はがす際の皮膚ダメージを軽減します。

はく離時
(イメージ)

従来品 (アクリル粘着剤)

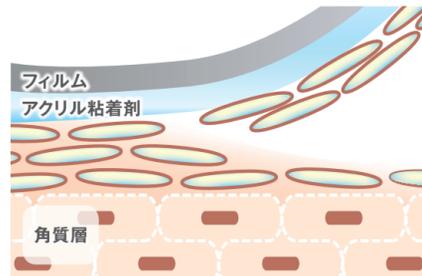

汗の貯留により角質層の結合が緩みやすくなり、剥がす際の角質はく離や表皮はく離が起こりやすくなります。

カテリープラス™シリーズのラインナップ

高透湿フィルムドレッシング

カテリープラス™

新生児のカテーテル固定から創傷保護まで幅広い用途に対応したサイズ



■ センターヒール仕様で手袋をしたままでも取り扱いが簡単です。

用途例




新生児のPICC固定

CV固定

パッド付防水性ドレッシング

カテリープラス™ パッド

高吸収性パッドをつけてやさしく保護

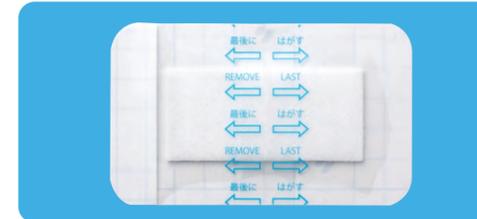

■ 創傷面に固着しにくいパッドで、患部をやさしく保護します。
■ ガーゼ10枚分以上の優れた吸収力をもつ高吸収性パッドで創傷面を保護します。

用途例




傷口の被覆及び保護

術後創の皮膚接合

カテーテル穿刺部固定用ドレッシング

カテリープラス™ I.V.

不織布のひし形ウィンドウとキャリアレスでカテーテル穿刺部をしっかり固定

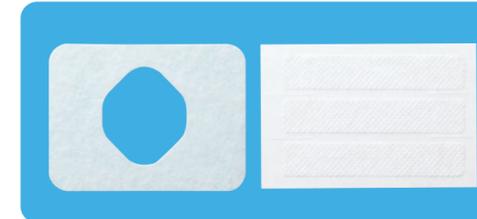

■ ひし形ウィンドウによりフィルム部の中央がわかりやすく、正確に貼ることができます。
■ キャリアレスかつ柔軟性の高いポリウレタン不織布で隙間なくしっかりと密着させることができます。
■ 付属の固定テープは粘着面に触れずに使用でき衛生的。

用途例




末梢部のカテーテル固定

硬膜外カテーテル固定

カテーテル穿刺部固定用ドレッシング

カテリープラス™ I.V. スリット

スリットを固定テープ一体型でさらに使いやすく

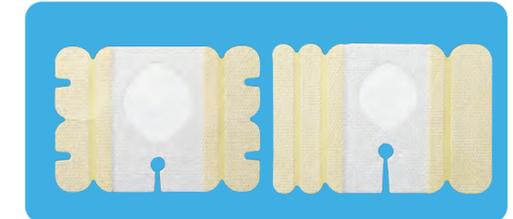

■ CV用と末梢用に合わせた専用サイズ。
■ スリット入りでカテーテルをしっかり固定します。
■ 使いやすい固定テープを一体化。

用途例



CV用

末梢用

高透湿フィルムドレッシング

カテリープラス™ ロール

使いやすさを追求し幅広くご使用いただけるロールタイプ



■ 離型フィルムのはがし口にプレリフト加工を施しているため、離型フィルムを簡単にはがすことができます。

用途例

♡ はがす時の思いやり ♡

「指で押さえて」
「ゆっくり」



カテリープラス™は、右図のどちらの方法でも、肌にやさしくはがせますが、皮膚が伸びないように指で押さえ、なるべくゆっくりとはがすことで、はく離時の痛みや、角質層の損傷を軽減させる効果があります。

※ 皮膚と平行にはがす場合に、まれにフィルムが切れることがあります。そのときはフィルムを折り返してはがしてください。

