

《プツミュ綿棒シリーズ》操作手順①



ハクゾウメディカル株式会社


STEP 1

液面が下になるように傾けてください。



綿棒が見える面が上にくるように持ちます。

STEP 2

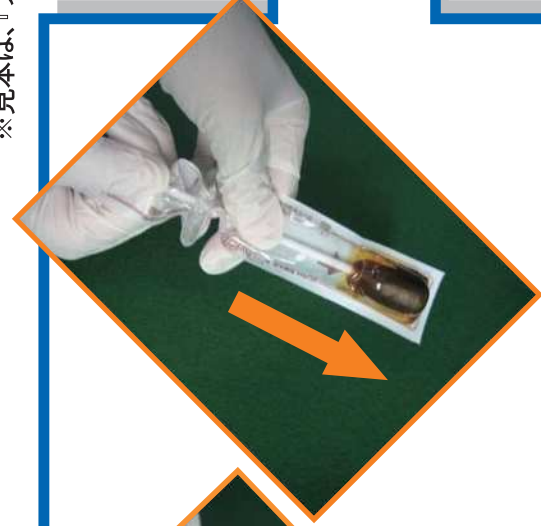

薬液を下に向け、↓の方向に綿棒を押し込み、薬液を含浸させていきます。(※含浸したか確認ください。)

※見本は、『プツミュ綿棒P』No.13-1本

STEP 3



液の逆部分から←→の方向に引っ張っていき、フィルムを開封します。

STEP 4



綿棒を↑の方向に引っ張り、取り出します。

《プツミュ綿棒シリーズ》操作手順②



ハクゾウメディカル株式会社

STEP 5



薬液が含まれた綿棒を持ちます。

STEP 6



皮膚上に塗布します。

⚠️ ご使用上の注意



薬液部分を押ししないでください。



薬液部分を上に押し、押ししないでください。