

# サージット® 10 WA

固定・記録用テープ1本



- 医療機器届出番号  
43B2X00005000109
- 医療機器クラス分類  
クラスⅠ（一般医療機器）
- 一般的名称 救急絆創膏
- エチレンオキサイドガス滅菌済み



21-071  
**NSD10 WA-1**  
(44mm×44mm)



21-072  
**NSD10 WA-2**  
(60mm×70mm)



21-073  
**NSD10 WA-3**  
(100mm×115mm)



21-074  
**NSD10 WA-4**  
(100mm×120mm)



固定・記録用テープ側から剥がします。




裏面の剥離紙（茶色テープが貼付されていない方）を剥ぎ取り、粘着面を出します。



創傷面が本品の中央にくるようにあわせま。



創傷面に貼りながら周囲を上から押さえ全体が密着するように貼付します。

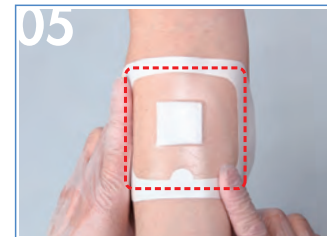

テープ周囲をしっかりと押さえながら密着させます。



本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、矢印の方向にゆっくりと剥ぎ取ります。



表面の剥離紙に付属している茶色のテープは、固定もしくは記録用テープとして使えます。

# サージット® 10 WA IV (不織布付き・スリット入り)

固定テープ2本、固定・記録用テープ1本

固定テープ1本、固定・記録用テープ1本



- 医療機器届出番号  
43B2X00005000108
- 医療機器クラス分類  
クラスⅠ（一般医療機器）
- 一般的名称 救急絆創膏
- エチレンオキサイドガス滅菌済み



21-081  
**NSD10 WA IV-1**  
(50mm×60mm)



21-083  
**NSD10 WA IV-3**  
(65mm×70mm)



21-084  
**NSD10 WA IV-4**  
(70mm×85mm)



21-085  
**NSD10 WA IV-5**  
(90mm×120mm)



21-082  
**NSD10 WA IV-2**  
(60mm×70mm)



21-086  
**NSD10 WA IV-6**  
(100mm×120mm)

WA IV-1・3・4・5



固定・記録用テープ側から剥がします。




裏面の剥離紙（3枚のテープ（白・茶色）が貼付されていない方）を剥ぎ取り、粘着面を出します。



カテーテル穿刺部位が本品フィルム部分の中央にくるように合わせ、不織布テープのスリット部分とカテーテルハブを固定させます。




カテーテル周囲を良く密着させます。

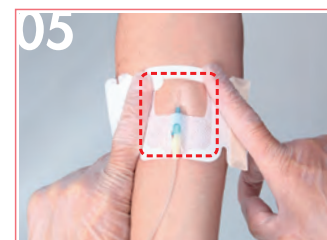

テープ周囲をしっかりと押さえながら密着させます。



本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、矢印①の方向にゆっくりと剥ぎ取ります。

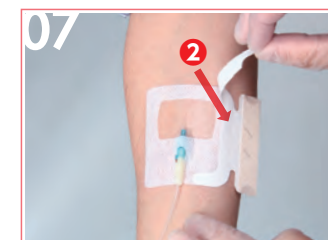

この後、残った剥離紙も同様に、矢印②の方向に剥ぎ取ります。



表面の剥離紙に付属している3枚のテープ（白・茶色）は、カテーテルラインの補強やルートの固定用テープとして、また茶色のテープについては記録用テープとして使えます。

WA IV-2・6



固定・記録用テープ側から剥がします。




裏面の剥離紙（2枚のテープ（白・茶色）が貼付されていない方）を剥ぎ取り、粘着面を出します。



カテーテル穿刺部位が本品フィルム部分の中央にくるように合わせて貼付します。



カテーテル周囲を良く密着させます。

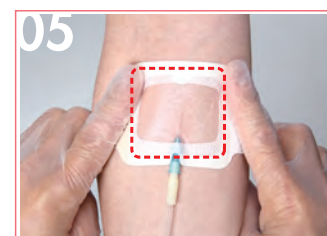

テープ周囲をしっかりと押さえながら密着させます。



本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、矢印①の方向にゆっくりと剥ぎ取ります。



この後、残った剥離紙も同様に、矢印②の方向に剥ぎ取ります。



表面の剥離紙に付属している2枚のテープ（白・茶色）は、カテーテルラインの補強やルートの固定用テープとして、また茶色のテープについては記録用テープとして使えます。