


オムロン メッシュ式ネブライザ クイックマニュアル


初めて使用する前に

初めて使用する前に: I) 取扱説明書をよくお読みください
II) 部品をはずし、洗浄・消毒してください。

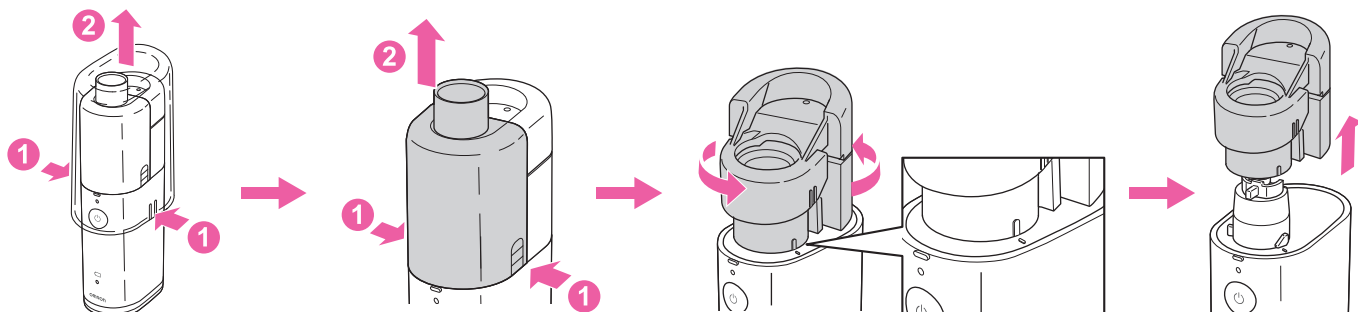


準備

1 薬液ボトルを取り付ける

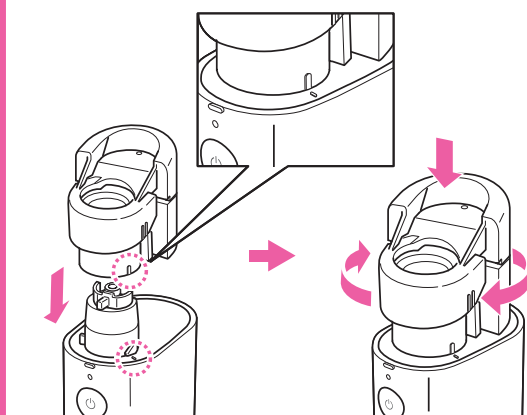


2 薬液ボトルを開ける

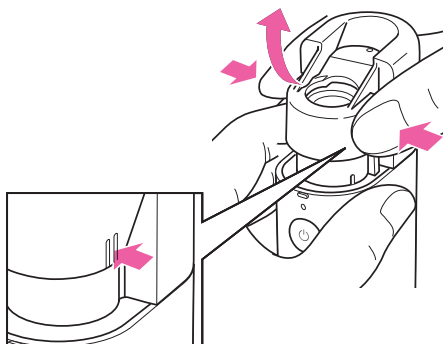


3 薬液を入れる

※最大容量は10mlです。

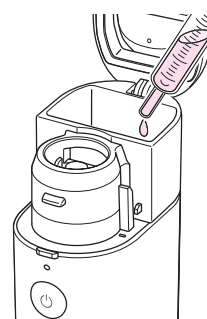

4 薬液ボトルに メッシュキャップを のせる

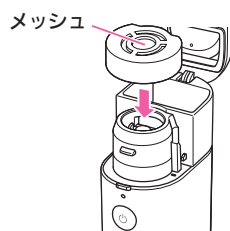


注意事項

※メッシュをさわらないでください。




5 薬液ボトルを 閉める

※メッシュキャップはふたの役目をして
います。
しっかり押さえてください。

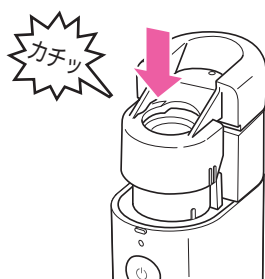


6 マスクアダプタを 取り付ける

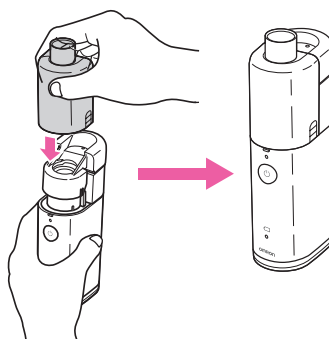

7 吸入マスクまたは マウスピースを 取り付ける

※奥まで差し込んでください。

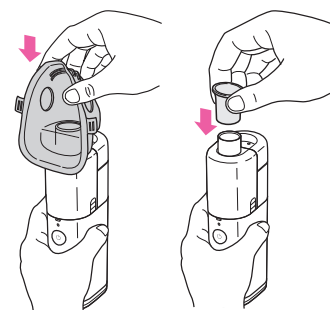

ご使用とご注意

吸入

本体を手に持ち、楽な姿勢で吸入する

振動子が薬液に浸っていますか？

振動子が薬液に浸っていないと、
噴霧しないことがあります。

電源ON/OFF (⏻) ボタンを
手前にして、軽く
傾けてください。




メッシュの上に薬液や
よだれがたまると、噴
霧が停止します。
ガーゼで液を吸い取っ
てください。

使用後のお手入れ

1 使用後は薬液を捨ててから、薬液ボトルに水を入れて1～2分水を噴霧してください

※吸入後、メッシュに薬液やよだれが残っていると、固まってメッシュの目づまりの原因になります。
※水の吸入はしないでください。

2 ためた水の中でメッシュキャップを振り洗いしてください

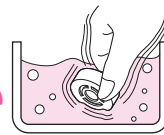



※本体は
洗浄できません

3 水分を拭き取って十分に乾燥させてください

1 メッシュは精密部品です






メッシュをさわらないでください。

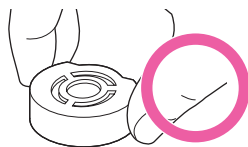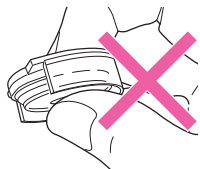

お手入れのとき、流水で洗わないでください。



※メッシュがこわれます。
水をためて軽く
ふりながらやさ
しく洗ってくだ
さい。

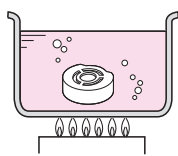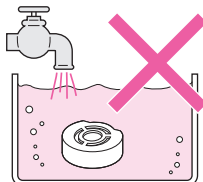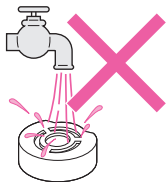

目づまりを防ぐために**毎回、吸入後に水噴霧**をしてください
また、少なくとも**週に一度は消毒**しま
しょう

2 メッシュはしっかりと取り付けてください

カチッと音が鳴るまで薬液ボトルのふたを閉めてください。

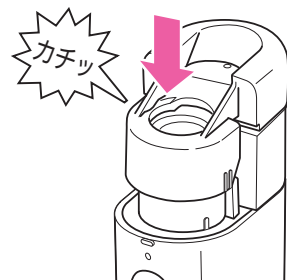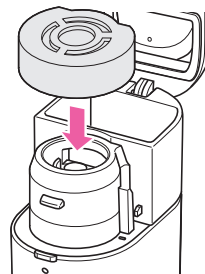

※メッシュキャップはふたの役目をして
います。
しっかり押さえてください。

しっかりと閉まっていないと霧化しなかったりこぼれたりします

4 保管

- 薬液ボトル内に薬液を入れた状態で保管しないでください。
- ご使用にならないときは確実に電源を切って、本体カバーをつけて保管してください。本体カバーは電源が入らないように保護の役目もしています。


5 空運転の注意事項

薬液ボトル内に液体が入っていない状態では電源を入れないでください。機器の破損や電池寿命の短命につながる恐れがあります。


3 普段のお手入れと消毒に関して

メッシュをティッシュ
ペーパーなどで拭かない


電子レンジや
食器洗浄機などで
洗浄、乾燥をしない

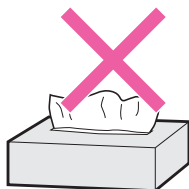

ティッシュペーパー

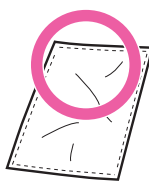

ガーゼ

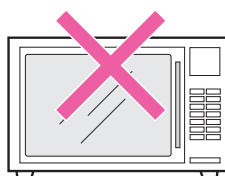

電子レンジ

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター(ネブライザ窓口)

TEL 0120-84-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料)

受付時間9:00～19:00 (土・日・祝日は、9:00～17:00年末年始を除く)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。