

ラピッドテスト hMPV 操作方法

HELLO KITTY
©1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No.G 604397



SEKISUI

体外診断用医薬品
承認番号23000EZ00065000

検体希釈液がラピッドテスト FLUスティックspと共通で使用可能

キットの中身を確認しましょう

検体希釈液 (10本)




テストスティック (10本) 綿棒 (10本) 試験管立て (1個)
(容器の中にあります)

検査の前に用意しましょう



感染性廃棄物
処理用ごみ箱


1 検体希釈液容器の蓋を開けます。

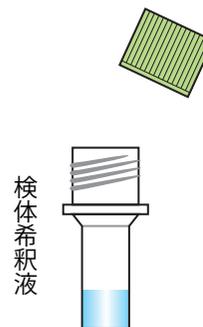


2 検体希釈液に、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液を採取した検体 (綿棒) を入れ、内壁に沿って回転させます。



3 綿棒を検体希釈液に入れ、回すようにして検体を抽出します。綿球をチューブの上から指で挟み、綿球内の検体をよく搾り出します。

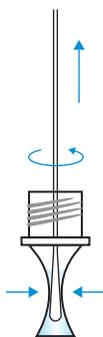


4 検体を抽出した検体希釈液の容器をキット付属の試験管立てにセットします。

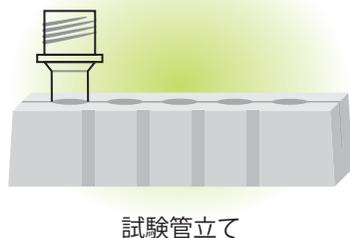

5 テストスティックを缶から取り出します。



6 テストスティックを検体希釈液容器に入れます。

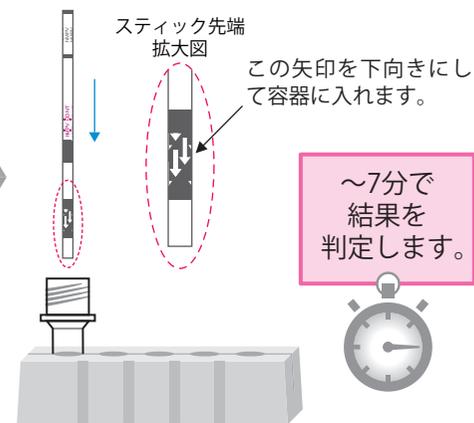

ラピッドテスト hMPV

測定結果の判定法

HELLO KITTY
©1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No.G 604397




ラピッドちゃん®

SEKISUI

体外診断用医薬品
承認番号23000EZ00065000


判定例

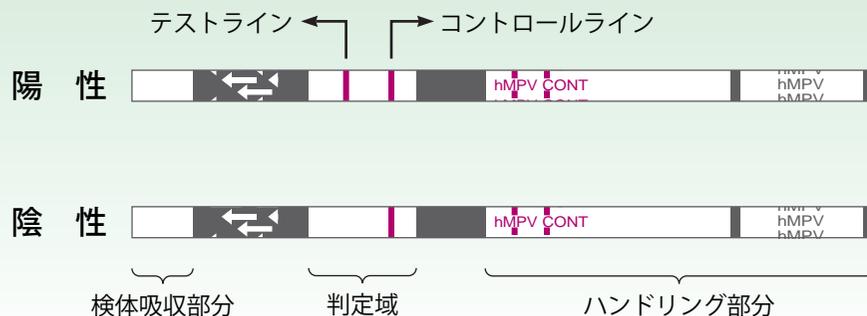

7分より以前にテストラインとコントロールラインが認められた場合、その時点で陽性と判定することができます。

無効例

① 判定域のコントロール部位にラインが認められない。

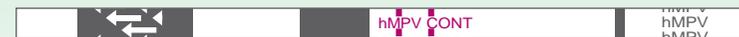

② 判定域全体が着色して、テストラインやコントロールラインが認められない。



よくあるご質問

Q：コントロールラインとテストラインの一部に欠けが見られるが、どう判定すれば良いですか？

A：コントロールライン及びテストラインの一部に欠けが認められたり、破線となる場合がありますが、有効なラインと判定します。



Q：反応ラインに白いラインが見える場合は、どのように判定すればよいのでしょうか？

A：テストスティックに含まれる空気が検体の流れと共に移動し、抗体塗布部（ライン部）前で溜まることで白く見えるものと考えられます。判定には影響がありませんので測定を継続してください。

Q：結果が無効の場合はどう対処すべきでしょうか？

A：もう一度検体を採取して別のテストスティックで再検査してください。

キットご使用の際には添付文書をよくお読みください。測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果などと合わせて担当医師が総合的に判断してください。

「ラピッドテスト」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。