

動作中エラー

エラー通知の内容	考えられるトラブルの原因	対処方法
エラー音が鳴って動作が停止	エラー#1 ゲル不足	治療用ゲルがプローブに適量塗られていない可能性があります ▶ 治療用ゲルを適量塗りなおしてください プローブが皮膚に正しく装着されていない可能性があります ▶ プローブを皮膚に正しく装着してください 1つのプローブしか使用していないのに2つのプローブが接続されている可能性があります ▶ 使用していないプローブを本体から取り外してください
	エラー#2 プローブ未接続	▶ プローブを本体に正しく接続しなおしてください
	エラー#3 プローブ混在	▶ 1種類のプローブのみを接続してください
	エラー#4 プローブ故障	▶ 当社お客様窓口または販売業者/販売店までご連絡ください
	エラー#5 バッテリー残量不足	▶ バッテリーを十分に充電するか、ACアダプタを接続して使用してください
	エラー#6 充電温度異常	▶ 適切な温度環境で充電を行ってください
	エラー#7 バッテリー交換	▶ 当社お客様窓口または販売業者/販売店までご連絡ください
	エラー#8 装置故障	▶ 当社お客様窓口または販売業者/販売店までご連絡ください
本体の電源を入れても画面に何も表示されない	▶ バッテリーの残量が不足している可能性があります	▶ バッテリーを十分に充電するか、ACアダプタを接続して使用してください

以上の確認と対処の後、エラーが表示される場合は電源をOFFにし、再び電源をONにしてください。

前述の対処を行ってもエラーが表示される、または動作しない場合は本品の故障が考えられますので、当社お客様窓口または販売業者/販売店までご連絡ください。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不良など、お気づきの点がありましたら、当社お客様窓口または販売業者/販売店までご連絡ください。

製造販売業者

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)

受付時間: 9時～17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

168033

2019.09

Accellus 2

アクセラス2 クイックガイド

機器を使用する場合は、取扱説明書を必ずご参照ください。




各部の名称



使用前の準備


- 1 本体を傾斜、振動、衝撃のない、安定した場所に設置します。本体の上に物を置いたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 2 バッテリーの充電残量が十分でない場合は本体にACアダプタを接続し、充電を行ってください。
※充電しながらでも本体の操作および治療は可能です。
- 3 本体のプローブ挿し込み口にプローブのコネクタ部を奥まで確実に挿し込み、固定します。
※プローブを2個同時に使用する場合は2個取り付けてください。
※1個で使用する場合は使用しないプローブは取り外してください。
※種類の異なるプローブは同時に使用できません。

- 4 骨折部位の真上の皮膚上にマークしたX印がプローブ固定バンドのプローブ装着部の穴の中心になるようにバンドを装着してください。
- 5 治療用ゲルのボトルから約2cmを目安に絞り出し(約1～2ml)、照射面全体に塗り広げてください。
- 6 治療部位にプローブを装着してください。プローブ固定バンドの蓋が“カチッ”と音がするまで閉めてください。

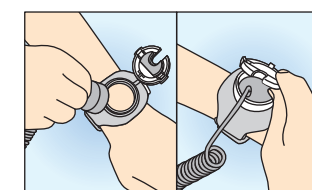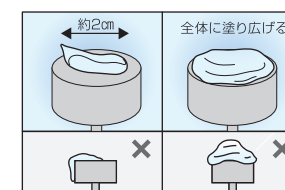
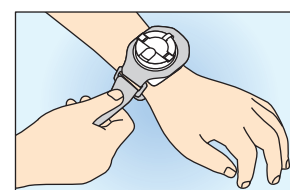


治療開始・終了

[POWER/OK] ボタンを押して本体の電源をONにします。

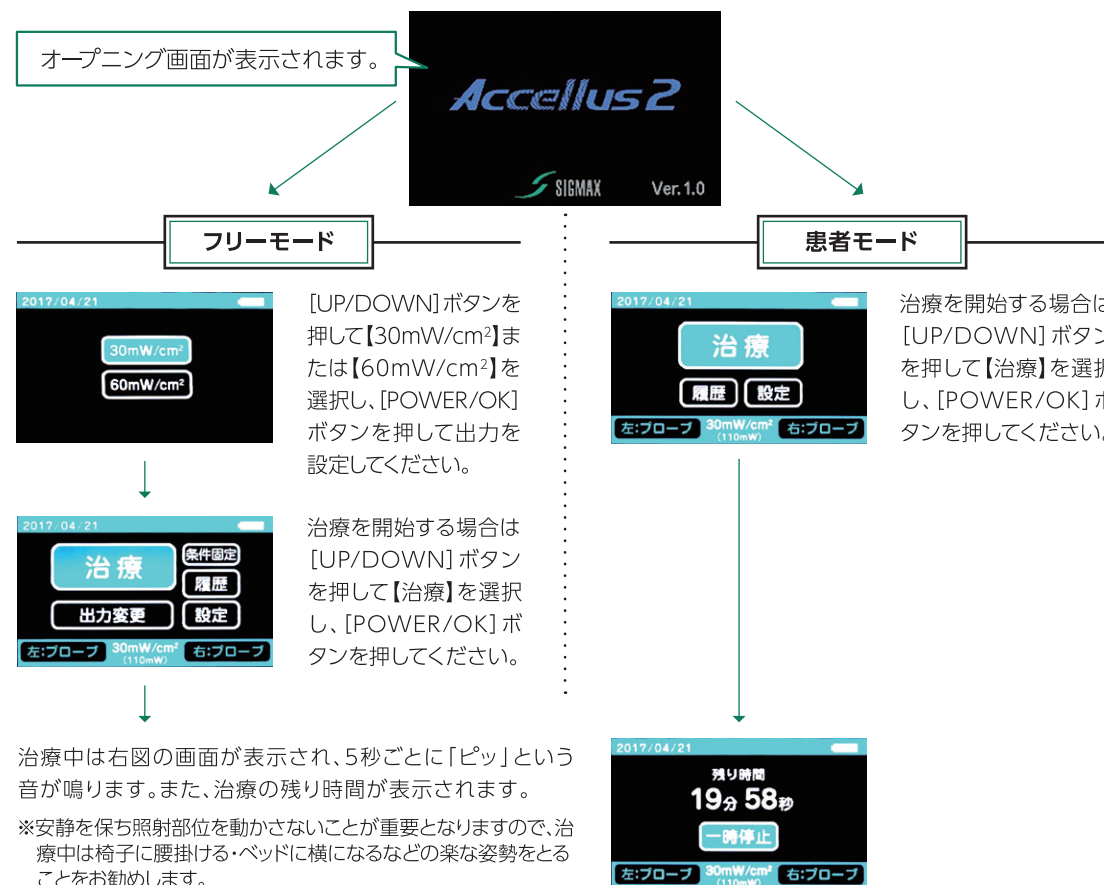

使用終了後

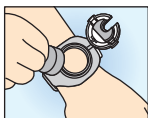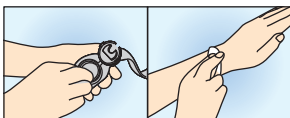- 1 治療が終了すると終了音が鳴り、下図の画面が表示され、自動的に停止します。3秒後、自動的に電源がOFFになります。
 - 2 プローブ固定バンドのプローブ装着部のキャップを開け、プローブに付着した治療用ゲルを柔らかい布やティッシュペーパーで拭き取ってください。
 - 3 プローブ固定バンドを取り外し、プローブ固定バンドと皮膚についた治療用ゲルを柔らかい布やティッシュペーパーで拭き取ってください。
- 
- 
- ※乾燥した治療用ゲルは濡れた布かティッシュペーパーで取り除いてください。
※プローブは水洗いしないでください。
※故障や感染の原因になりますので、プローブは治療のたびにお手入れを行って、清潔に保ってください。
- 
- ※故障や感染の原因になりますので、プローブ固定バンドは治療のたびにお手入れを行って、清潔に保ってください。
※プローブ固定バンドの汚れがひどい場合は交換してください。

清掃方法

本体の清掃方法

- ▶ 本体の汚れが気になる場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- また、使用中に汚れが付着したときは、そのつど清掃をするようにしてください。
- 清掃作業は必ずACアダプタを抜き、電源をOFFにした状態(液晶画面が消灯している状態)で行ってください。

プローブの清掃方法

- ▶ 治療のたびに治療用ゲルを柔らかい布やティッシュペーパーで拭き取ってください。
- ※乾燥した治療用ゲルは濡れた布かティッシュペーパーで取り除いてください。
- ※故障や感染の原因になりますので、プローブは治療のたびにお手入れを行って、清潔に保ってください。
- ※プローブを消毒する際は消毒用エタノールを使用してください。消毒用エタノール以外の薬品を使用するとプローブが劣化する可能性があり、故障の原因となります。

プローブ固定バンドの清掃方法

- ▶ 治療のたびに治療用ゲルを柔らかい布やティッシュペーパーで拭き取ってください。
- ※乾燥した治療用ゲルは濡れた布かティッシュペーパーで取り除いてください。
- ※故障や感染の原因になりますので、プローブ固定バンドは治療のたびにお手入れを行って、清潔に保ってください。
- ※プローブ固定バンドの汚れがひどい場合は交換してください。

保管方法

- ACアダプタを本体から取り外してください。
- 本体および付属品は専用のケースに入れて保管してください。
- ※プローブは折れたり、捻じれたりしないようにしてください。

その他の操作

画面の明るさと操作音の音量を設定することができます。

- 1 [UP/DOWN] ボタンを押して【設定】を選択し、[POWER/OK] ボタンを押してください。
- 2 [UP/DOWN] ボタンを押して【表示・音】を選択し、[POWER/OK] ボタンを押してください。
- 3 [UP/DOWN] ボタンを押して画面の明るさを選択し、[POWER/OK] ボタンを押して設定してください。
- 4 [UP/DOWN] ボタンを押して操作音の音量を選択し、[POWER/OK] ボタンを押して設定してください。
※音量を1に設定すると操作音が再生されなくなります。ただし、エラー音のみ音量2で再生されます。
- 5 [UP/DOWN] ボタンを押して音声ガイダンスの有無を選択し、[POWER/OK] ボタンを押して設定してください。

