

ハイコロール™規格



- ☒ 品番:HCR25
サイズ:25mm×5m
1箱:1巻
標準価格/箱(税別):1,800円
JANコード:4987167092276




- ☒ 品番:HCR50
サイズ:50mm×5m
1箱:1巻
標準価格/箱(税別):3,400円
JANコード:4987167092283



- ☒ 品番:HCR100
サイズ:100mm×5m
1箱:1巻
標準価格/箱(税別):6,200円
JANコード:4987167092290

〈原寸サイズ〉

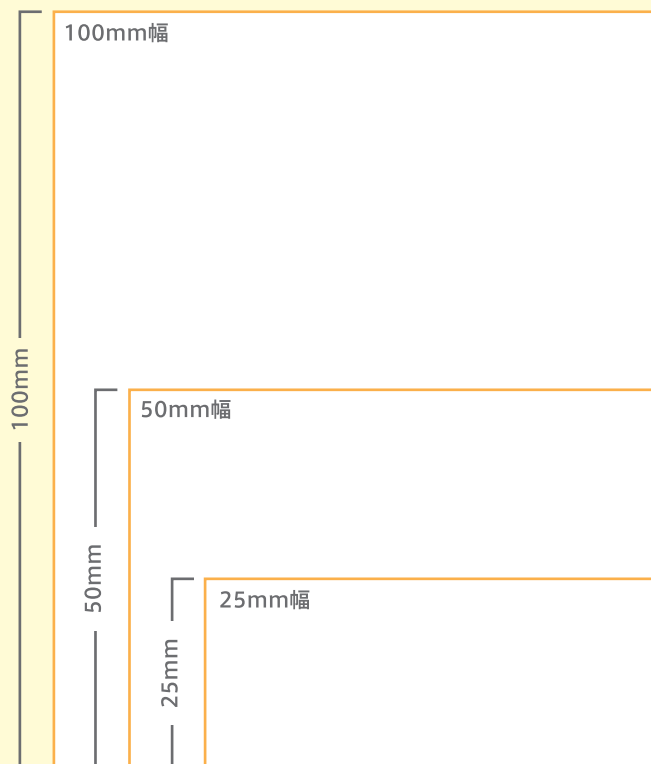

ハイコロール™ ガイドブック

HYCOROLL™
GUIDEBOOK



TMIは商標です。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3

ホームページ

<https://www.nichiban.co.jp/>

日本製
MADE IN JAPAN

お問合せ先 ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL **03-5978-5622** 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

SEN19N1ESC

手軽に、気軽に
ハイドロコロイド

ハイコロール™はこんなテープです

○ 肌にやさしいハイドロコロイドを採用したテープです

○ 半透明なので、目立ちにくいです


○ 防水性です

✕ 滅菌をしていないため、傷には貼らないでください

ハイコロール™はこんな時に使えます

面板の皮膚保護剤周囲の補強

テープの下地に

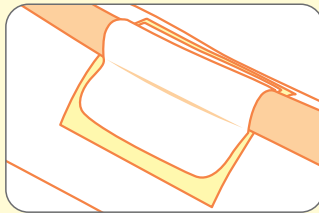

ハイコロール™を貼る時のコツ

● 引っ張って貼らない

● 貼ったらなじませる



※テープを引っ張って貼ると、水疱(水ぶくれ)などの皮膚トラブルにつながります

ハイコロール™を貼っている時の注意

● 皮膚をよく観察する




⚠ 発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合はすぐに使用を中止してください

ハイコロール™の貼り方

[面板の皮膚保護剤周囲の補強に使用する場合]


01

ハサミでハイコロール™を必要な長さにカットします

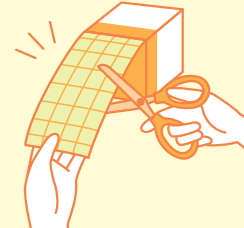

02

はく離紙をはがします

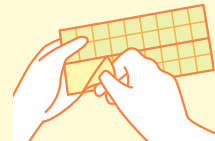

03

面板の辺縁部にハイコロール™を貼ります

ハイコロール™同士を重ねて貼ることもできます



04

しっかりと指でハイコロール™をなじませます

なじませることで密着力UP




[テープの下地に使用する場合]

腎ろうカテーテルなどの固定テープの下地として貼ることで皮膚への刺激を軽減します


01

ハサミでハイコロール™を必要な長さにカットします

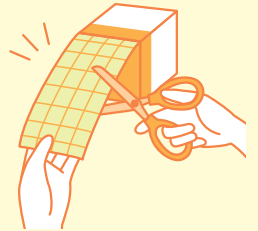

02

はく離紙をはがします

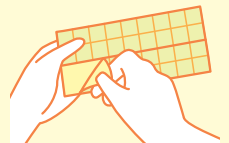

03

固定するカテーテルの下にハイコロール™を貼り、指でなじませます



04

テープでカテーテルを固定します



カテーテルを固定するテープがハイコロール™からはみ出さないようにします

ハイコロール™をはがすときは

ゆっくり、やさしく、指で皮膚をおさえながらはがします。はがしにくい場合や痛みを感じる場合は、はく離剤を使用しましょう

