



ラピッドテスト SARS-CoV-2

操作方法 と判定法

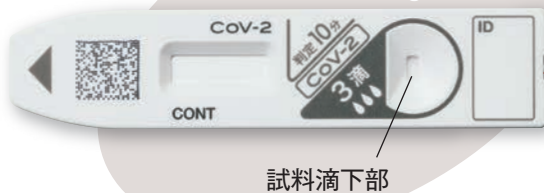

試料**3滴**を
試料滴下部に
滴下します。

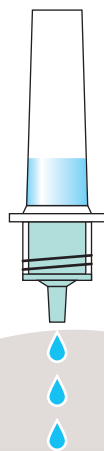

~10分

【注意事項】

1. 滴下量3滴を厳守ください。
2. 試料滴下後は動かさず静置ください。

【重要な基本的注意】

1. 本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。
2. 検査に用いる検体については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針」を参照してください。
3. 診断は厚生労働省より発表されている医療機関・検査機関向けの最新情報を参照し、本製品による検査結果のみで行わず、臨床症状も含めて総合的に判断してください。
4. 鼻咽頭ぬぐい液を検体とした場合、鼻咽頭ぬぐい液に比べ検出感度が低い傾向が認められているため、検体の採取に際して留意してください。
5. 検体採取及び取扱いについては、必要なバイオハザード対策を講じてください。

陰性



注) 陰性判定は10分まで静置してから判定してください。

SARS-CoV-2



10分より以前にコントロールラインと陽性ラインが認められた場合、その時点で陽性と判定することができます。

無効



無効



ラピッドテスト SARS-CoV-2 検体採取法

HELLO KITTY


© 2021 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. L628239



ラピッドちゃん®


▼ラピッドテスト SARS-CoV-2に使用する検体は以下のいずれかの方法で採取してください。

1 鼻咽頭ぬぐい液

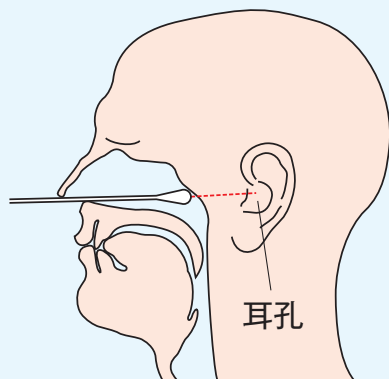

鼻腔検体採取用綿棒（キット付属品）を鼻腔から耳孔を結ぶ平面を想定し挿入します。コトンと行き止まる鼻腔の奥まで綿棒が達したら、鼻咽頭粘膜を数回こすり取ります。


2 鼻腔ぬぐい液

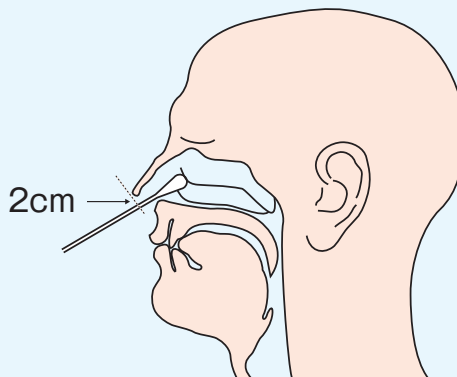

鼻腔検体採取用綿棒（キット付属品）を鼻腔に沿って2cm程度挿入し、鼻甲介付近をゆっくり5回程度回転させながら、鼻腔粘膜をこすり取ります。


すぐに測定できない場合は密閉して冷蔵(2~10℃)で保存し、24時間以内に測定してください。

検体前処理法

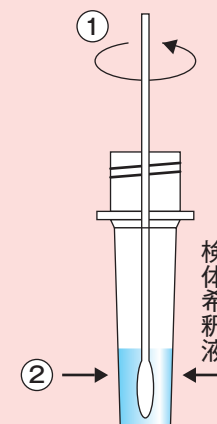

綿棒を検体希釈液に入れ、回すようにして検体を抽出します(①)。

綿球をチューブの上から指で挟み、綿球内の検体をよく搾り出します(②)。

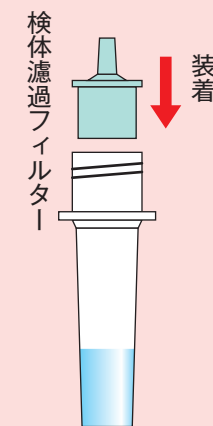

検体抽出後、検体濾過フィルターを装着します。