


フォラケア・GD40 測定手順


1 挿入

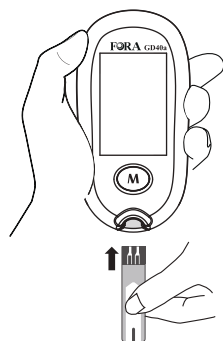


画面表示とバイアルのコード番号が同じであることを確認します。

2 コード確認

電源オフの状態
でセンサーを挿入し、
電源を入れます。

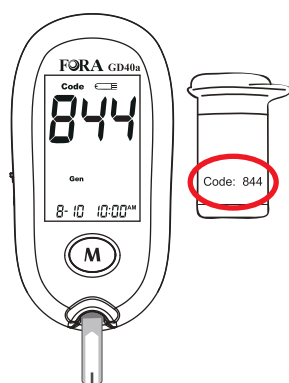

3 点着

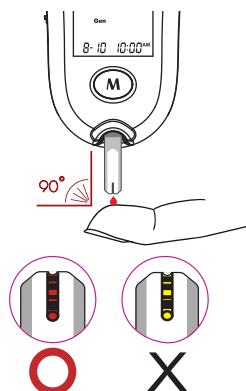


血液吸引口から血
液を吸引させます。


黄色い部分がすべ
て赤くなるまで血
液を吸引させてく
ださい。

測定終了後、結果
を確認します。

4 結果確認

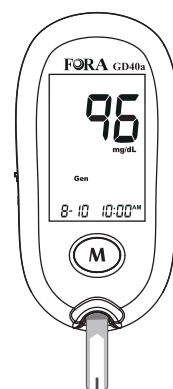


5 廃棄

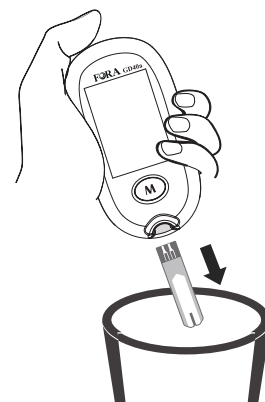

イジェクターを
押して使用済みの
センサーを廃棄し
ます。

ロット補正

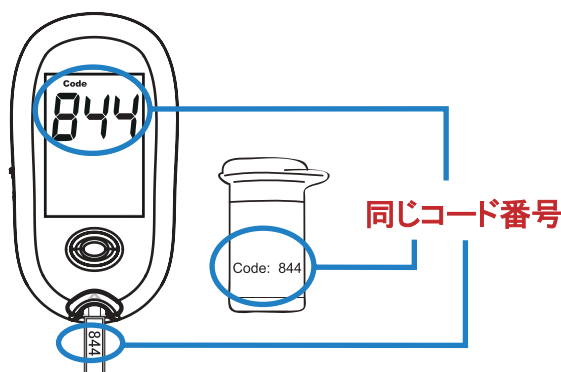

1. 本体の電源が入っていない状態で、センサー付属のコードキーを挿入してください。
2. 表示画面にコード番号が表示されます。センサーの入っているバイアルに表記されているコード番号と同じであることを確認してください。
3. コードキーを取り外し、表示画面に「OK」と表示されたことを確認してください。

測定範囲外の場合

表示	原因
Lo	測定可能範囲より低値です。
Hi	測定可能範囲より高値です。

エラーメッセージ一覧

表示	原因	対処方法
E-b △ LOW	測定に必要な電池残量がありません。	新しい電池に交換してください。
E-U △	使用済みのセンサーが挿入されました。	新しいセンサーで測定してください。
E-F △	測定中にセンサーが取り外されました。 もしくは異常な反応を検知しました。	新しいセンサーで再度測定してください。
E-C △	異なるコードキーが挿入されました。	正しいコードキーを挿入してください。 表示画面のコード番号とバイアルに表記されている番号が同じか確認し、異なる場合はロット補正を行ってください。
E-t △ LOW	測定可能な温度範囲から低く外れています。	測定可能な温度は10℃から40℃の間です。
E-t △ HIGH	温度が測定可能な範囲から高く外れています。	この温度範囲の中で機器をなじませてから再度測定してください。
E-E △	測定中にエラーが発生しました。	新しいセンサーで測定してください。