

針刺し防止機構付き留置針

スーパークラス5

内針収納型の安全留置針です。

止血弁内蔵のため片手で簡単に操作できます。

針刺し防止機構付き留置針

スーパークラス5

滑り防止リップ付きグリップ

手技中、しっかりと留置針を保持できます。

作動ボタン


安全機構を簡単に作動できます。
作動ボタンが上にあるときは、刃面は常に上向きです。

V字形状（バックカット）の針先

穿刺抵抗が低く、穿刺痛の低減が期待できます。

透明なフラッシュバックチャンバー

すばやく逆血を確認できます。

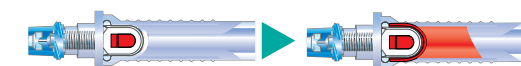

安全カバー

安全カバーに収納することで針刺しを防げます。
使用済み内針に付着した血液・体液からの曝露を防止できます。

ポリウレタン製カテーテル

X線不透過性の素材が含まれています。
留置後は体温に反応して柔らかくなります。

止血弁をカテーテルハブに内蔵

穿刺手技中の血液曝露を抑えます。
圧迫止血の必要はありません*。

*圧迫止血補助弁による止血効果は血圧20mmHgで10秒程度を目安としております。

製品規格表

カテーテルゲージ		18G	20G	22G		24G
カラーコード		深緑	ピンク	濃紺		黄色
内針ゲージ		20G	22G	24G		27G
カテーテル	外径 mm	1.3	1.1	0.9		0.7
	内径 mm	0.9	0.7	0.6		0.4
	長さ" (mm)	1・1/4" (31)	1・1/4" (31)	1" (25)	1・1/4" (31)	3/4" (19)
製品コード		HP2176	HP2177	HP2140	HP2139	HP2141
品番		18G S5 x 1・1/4" V (F)	20G S5 x 1・1/4" V (F)	22G S5 x 1" V (F)	22G S5 x 1・1/4" V (F)	24G S5 x 3/4" V (F)
JANコード		4543527222365	4543527222372	4543527221412	4543527221405	4543527221429

製品はすべて滅菌済み（1本包装 / 1箱50本入り）

販売名：スーパークラス 医療機器認証番号：15600BZZ00792000
管理医療機器 プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しくご使用ください。



メディキット株式会社

発 売 元：メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2 Tel. 03-3839-0201

製造販売元：東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川17148-6 Tel. 0982-53-8000

営 業 所：東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・松山・広島・福岡・宮崎

流 通 倉 庫：宮崎県日向市・千葉県佐倉市

URL <http://www.medikit.co.jp/>

URL <http://www.togomedikit.co.jp/>



メディキット株式会社


針刺し防止 ◀ 2つの安全機能 ▶ 血液曝露防止

内針収納型安全機能 針刺し防止 & 血液曝露防止




コンパクトな内針フルカバー機構

- 針刺し・切創のリスクを低減できます。
- 使用済み内針に付着した血液・体液からの曝露を防ぐことができます。
- 医療廃棄量の低減に貢献します。

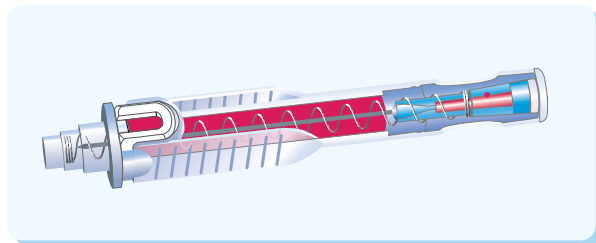


片手操作で簡単に安全機構が作動

- 安定して持ちやすく、ワンプッシュで作動します。
- 白いボタンを押すと、血液に汚染された内針は速やかに安全カバー内に収納されます。

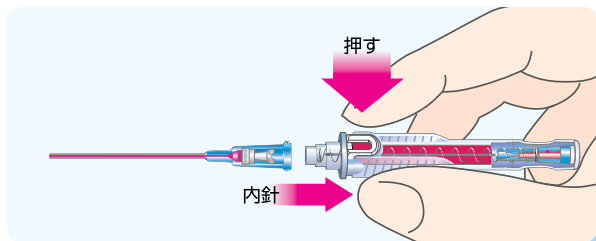


細血管に対応した側孔付内針

- 血管確保をカテーテル上ですばやく確認できます。

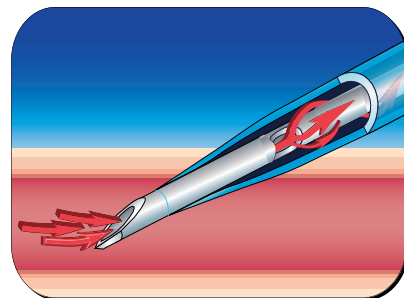


止血弁機能 血液曝露防止

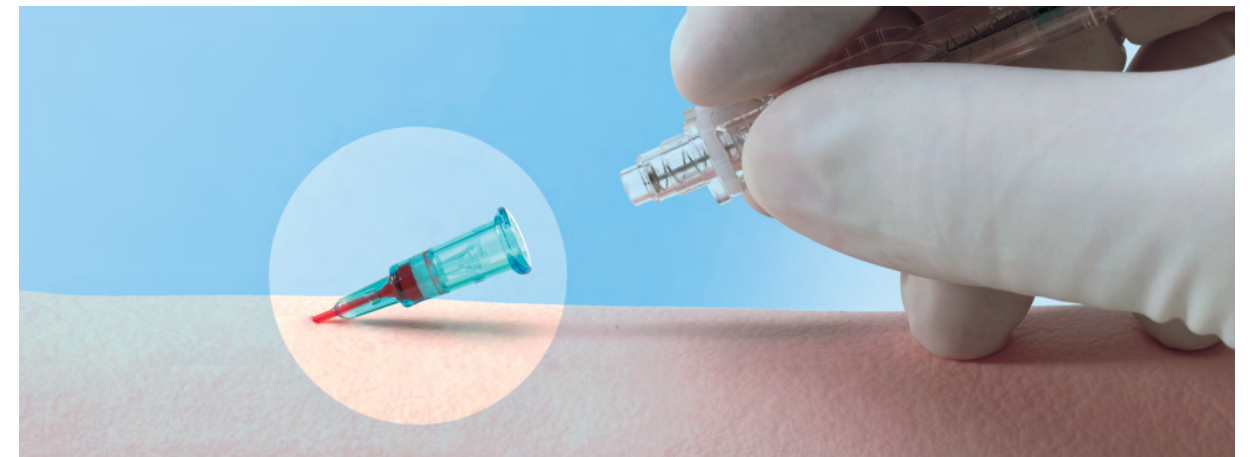

止血弁をカテーテルハブに内蔵


- 止血弁付きなので圧迫止血は不要*。
- 内針を抜去すると止血弁が閉じて血液漏れを防ぎます。
- 穿刺手技中の血液との接触を防ぎ、感染を防止します。

*圧迫止血補助弁による止血効果は血圧20mmHgで10秒程度を目安としております。

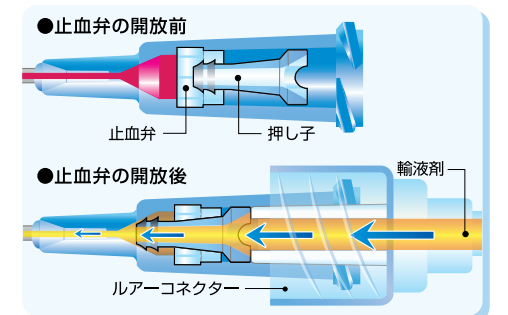

輸液セットとの接続

- 止血弁効果で血液の漏れがないため、衛生的で安心してライン接続ができます。
- ライン接続時に止血弁が開放されるため輸液・輸血をスムーズに行えます。

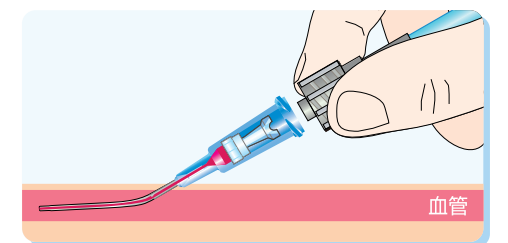

採血もできます

- シリンジを挿入して採血を容易に行うことができます。
※採血後、シリンジを外し、輸液ラインなどを接続する際は圧迫止血が必要です。
- ラテックスや可塑剤DEHPを含むポリ塩化ビニルは使用していません。

