

マイクロ繊維でスッキリふきとり

環境にやさしい生分解性不織布使用

ショードック®スーパー

アルコールタオル

消毒



環境整備用タオル使い分けのご提案

◆使用目的別に見た消毒剤・除菌剤

商品名	クリアパワー®	ショードック®スーパー	ジアワイパー®
主成分	低水準 ワイパー 【主成分】第4級アンモニウム塩	アルコール ワイパー 【主成分】エタノール76.9～81.4vol%	次亜塩素酸ナトリウム ワイパー 【主成分】次亜塩素酸ナトリウム0.1%
画像			
使用例	①アルコールでの材質変化が心配な箇所への清拭。 ②水拭きなどの日常清掃箇所への清拭。 ③タンパクや油脂汚れ箇所への清拭。	①ウイルスの伝播や耐性菌などの衛生管理を必要とする箇所への清拭。 ②接触感染リスクの高い機器や箇所への清拭。 ③高カロリー輸液の調製を行う調製台への清拭。	①トイレ回りなどの環境表面への清拭。 ②嘔吐物処理時の清拭。 ③透析装置外装への清拭。

◆微生物別による消毒薬の選択

	低水準消毒	中水準消毒	
	第4級アンモニウム塩	アルコール	次亜塩素酸ナトリウム
一般細菌	○	○	○
緑膿菌	○	○	○
結核菌	×	○	○
真菌*	△	○	○
芽胞菌	×	×	○
HBV	×	○	○

○ 有効
△ 効果は得られにくい、高温高圧の場合や時間をかければ有効となる場合がある
× 無効

*糸状真菌を含まない

参考資料：新垣増補版「消毒と滅菌のガイドライン」
編集／小林寛伊（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科教授）
へるす出版

パッケージ	商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	品番	POSレジ登録用品名略称 JANコード	ITFコード
	ショードックスーパー (ボトル) 100枚入 基布サイズ:140×200mm 中身入。詰替用があります。	単品 183×108×108	438g	オープン 価格	15	42654	ショードック:1:0:0:B 	梱 14987603426549
		梱 190×560×340	7.2kg					
	ショードックスーパー (詰替) 100枚入 基布サイズ:140×200mm 上記の詰替用です。	単品 145× 80 × 60	353g	オープン 価格	20	42655	ショードック:1:0:0:T 	梱 14987603426556
		梱 185×465×295	7.7kg					
	ショードックスーパー (ケース付) 250枚入 基布サイズ:150×300mm 中身入。詰替用があります。	単品 233×200×190	1.7kg	オープン 価格	6	42652	ショードック:S:2:5:0:K 	梱 14987603426525
		梱 245×590×395	11.2kg					
	ショードックスーパー (詰替) 250枚入 基布サイズ:150×300mm 上記の詰替用です。	単品 162×165×165	1.4kg	オープン 価格	6	42653	ショードック:S:2:5:0:T 	梱 14987603426532
		梱 185×495×285	9.3kg					

含浸薬液：エタノール(76.9～81.4vol%)、ベンザルコニウム塩化物、精製水

販売名：ショードックS

●お問い合わせは

白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

BM-48

ショードック[®]スーパーは消毒効果&高い物理的除去性能を兼ね備えたアルコールタオルです

ショードック[®]スーパーの特長

1
マイクロ繊維
タオル

2
リントの
発生が少ない

3
保液性能が
高い

4
医薬部外品

5
交換キャップ

ショードック[®]スーパーのタオルについて

ショードック[®]は、コットン生まれのキュプラ不織布・旭化成のベンリーゼ[®]を使用しています。


1 ミクロ繊維タオル

ベンリーゼ[®]は繊維が細かいので、清拭時により多くの汚れをかき取りながら除去することができます。

繊維構造比較(700倍)



ベンリーゼ[®]

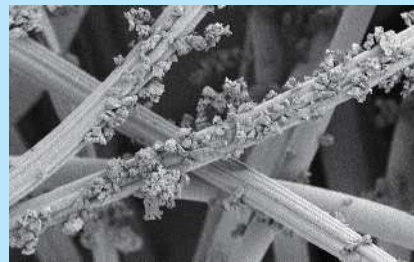

レーヨン&ポリエステル

ベンリーゼ[®]は一般的な不織布よりも、かき取り性能が高いです。

清拭比較




ベンリーゼ[®]



レーヨン&ポリエステル



1方向に
1度だけ清拭

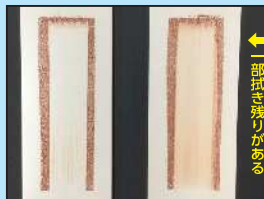

ベンリーゼ[®]



レーヨン&ポリエステル

試験方法

拭き取り対象物：JIS7種ダスト量0.015g
荷重：200g重
拭き取り速度：15cm/s
拭き取り距離：15cm
拭き取り回数：1回

学振摩擦機に摩擦子にサンプル布を取り付ける
ゴム板にダストを振り、均一に広げる
サンプル布を付けた摩擦子をゴム板の端に置き
1回拭き取る

一部拭き残りがあ

出典：旭化成株式会社

2 リントの発生が少ない

ベンリーゼ[®]は連続した長繊維不織布のため、摩擦後の毛羽立ちがほとんどありません。

摩擦強度比較



ベンリーゼ[®]



レーヨン&ポリエステル

試験方法

荷重：2N
摩擦往復速度：30回/分
摩擦台往復距離：120mm
摩擦回数：20回(10往復)

固定した不織布に摩擦子で10往復摩擦する

出典：旭化成株式会社

3 保液性能が高い

ベンリーゼ[®]は薬液の保液性能が高いので、乾燥する速度を抑えることができます。

保液性の高い不織布




ベンリーゼ[®]



レーヨン&ポリエステル

注入量：8ml
注入時間：5秒
傾斜45度の台に不織布を置き、着色した食塩水を1ヶ所に注入

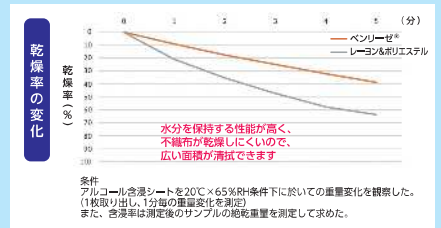


出典：旭化成株式会社

乾燥する速度を抑えることで、1枚のタオルでより広範囲面積の清拭が可能です。

清拭面積比較

清拭可能面積/m²

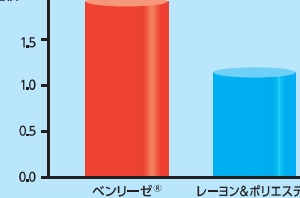

同サイズのタオルで清拭を行った場合、保液性が高いベンリーゼ[®]の方が、より広い面積の清拭が可能です。

◎清拭対象物により清拭面積の範囲も変わります。

・清拭対象：合成樹脂シート
・150mm×300mmを2つ折にして清拭
・自社試験による

清拭時における
タオルの乾燥具合は
こちらの動画から
確認できます



4 医薬部外品

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒



《ご提案》災害の備蓄に!

ショードック[®]スーパーは医薬部外品なので「手指・皮膚の洗浄・消毒」を行うことも可能なアルコールタオルです。そのため、ショードック[®]スーパーがあれば、有事の際にはアルコールや水がなくても、手指消毒を行うことも可能です。

5 交換キャップ

取り出し口が大きく開くのでタオルが通しやすく、また1枚ずつ広げやすい状態で取り出せます。

タオル取り出し口の中央凸部を表から押し込むと片側が下がり、取り出し口が大きく開きます。タオルを通した後、取り出し口を裏から押し戻すとタオルが挟まります。



取り出し口が横に広いため
タオルが丸まらずに
広げやすい状態で
取り出せます!

*詰替商品にはピンクの交換用キャップが付いています。