

メパッチ クリア SG

MEPATCH™ CLEAR SG



**低刺激性の粘着剤を採用。
はがす時の刺激が少ない、角膜保護専用テープです。**

眼部防水被覆

- 手術時に、薬液・血液から目を守ります。

角膜乾燥防止

- 意識低下時の開眼を防ぎ、角膜を保護します。
- 顔面麻痺、眼球突出症患者の睡眠時に目を守ります。



規格

品番	サイズ	1箱	価格(税別)	JANコード
M	33mm×55mm	100シート(2枚×50シート)	2,100円	4987167058722
L	43mm×80mm	100シート(2枚×50シート)	2,600円	4987167058739

取口テープ

Lサイズ

Mサイズ

実物大


メパッチ クリア SG

MEPATCH™ CLEAR SG

目元に貼るものだから、優しさにこだわりました。

はがす時の痛みが少ない

●はがす時の痛み

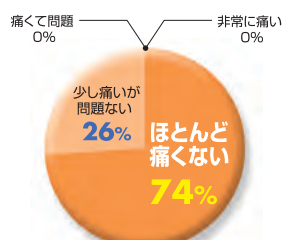


社内評価結果
(眼部10分貼付後、31名)

74%の方が
「ほとんど痛くない」と回答。
問題となる痛みは、
観察されませんでした。

皮膚刺激が少ない


実際の使用場面（1～8時間貼付、平均6時間程度）
の全例で問題のある刺激は見られませんでした。

●皮膚刺激

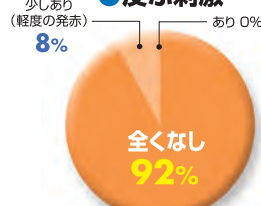

病院評価結果（5施設62例）


メパッチ クリア SG 従来品

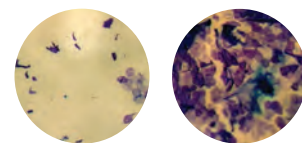

はく離角質細胞顕微鏡写真
紫に染まった細胞が角質細胞です。

十分な粘着力

●粘着力

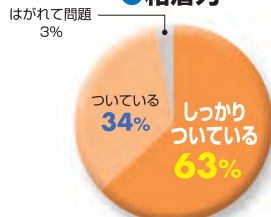


病院評価結果（5施設62例）

実際の使用場面の
(手術室・ICU)97%で、
問題ない貼付状態と
評価されました。

まつ毛・まゆ毛が抜けにくい

●体毛の抜けた本数

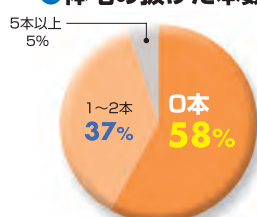

病院評価結果（5施設62例）

実施例の約6割で
体毛の抜けが0本。
2本以内の軽微な
抜けが95%でした。

こんな現場でお使いいただけます。

- ① **手術室**：手術時の、薬液・血液からの眼部保護に。
：麻酔中の、角膜の乾燥・びらん防止に。
- ② **I C U**：意識低下時の、角膜の乾燥・びらん防止に。
- ③ **耳鼻科・脳神経外科**：顔面神経麻痺による、角膜の乾燥・びらん防止に。
- ④ **眼 科**：重度ドライアイの、閉眼維持に。

■使用上の注意

- 皮ふに傷がある場合は、使用しないでください。
- 貼付部分の水分を拭き取り、乾いていることを確認してから貼付してください。
- 本品の使用中に、皮ふ障害（発疹・発赤、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品をはがすときは、皮ふを傷めないようゆっくりはがしてください。

■保管上の注意

- 水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

TM : trademark

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>