


ヘバーデン結節・ ブシャール結節・リウマチなどの 手指関節のさまざまなトラブルの緩和に！

ヘバーデン結節とは

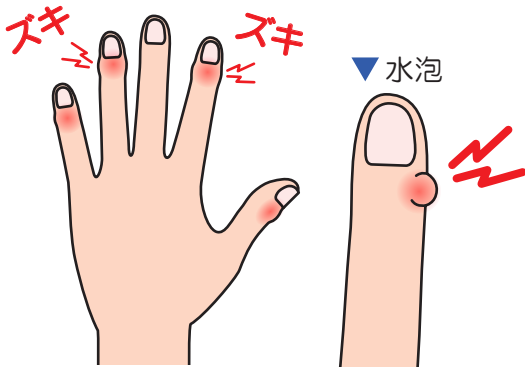


第1関節の変形、突出、痛みが出る症状。徐々に変形が進行して、横を向いてしまうことも。これは、関節の変形で軟骨が減って骨の変形が起こることにより生じるものです。安静にしていると症状は軽減しますが、時に水泡（ミューカスシスト）を伴うことがあります。

※第2関節に症状が出るブシャール結節にも効果的


女性に多い！

555例での性別の分布はグラフのようになっており、男性18.6%、女性81.4%と女性が多い傾向にあります。

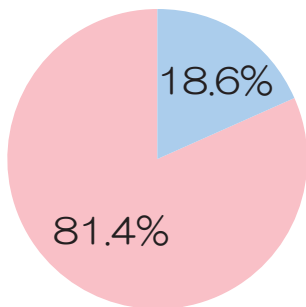

50～60代に多い！


2016年1月～2018年6月30日の新規変形性指関節症の患者年齢分布です。50歳を過ぎたところから増加傾向にあります。

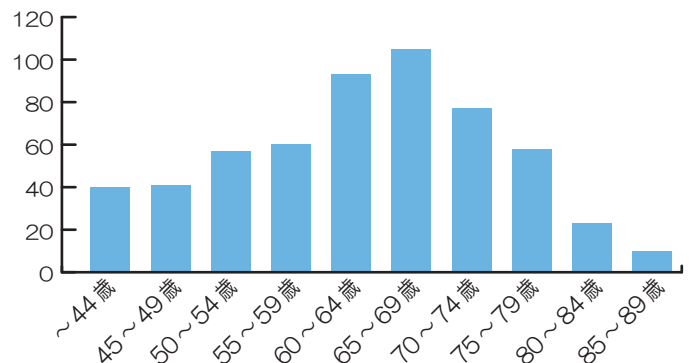

手指関節を固定することで痛みを緩和

軟骨の変性が進み、指の動く範囲が狭くなると痛みは消失することが多いです。そのため、関節を固定すると痛みが緩和されます。

原寸大

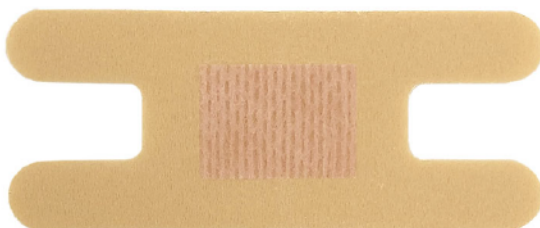

■ 貼付しやすいH型の形状

再使用禁止

未滅菌




- ヘバーデン結節やブシャール結節、リウマチなどの固定に

- 水にも強く関節をしっかりガード

やわらか素材で患部に
当てても痛くない



腫れ、変形、水泡
などにも

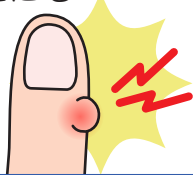

水仕事 OK !



指が痛くても水仕事をしなければならない方に

- 手指関節の運動抑制、固定に
- 手指関節用テーピングテープとしても
- どの指にも使用可能

素材に厚み、弾力性、伸縮性がある
ので運動抑制に効果的


皮膚への刺激が弱く、かぶれにくい



1枚ずつの包装で衛生的

商品番号	商品名	規格	販売単位	定価	JAN CODE	ケース単位
060151	ディップエイド® プラス	30mm×70mm 1枚入 ×30包	1箱	オープン	4958995601510	10箱

効果的な装着方法

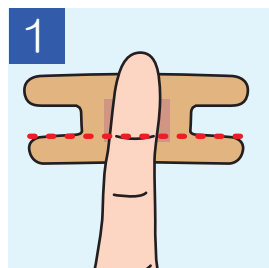

剥離紙をはがし、図の赤線の部分に第1関節がくるよう合わせて貼る




下部の粘着部分を引っ張らず指に沿うように左右とも貼る



上部の粘着部分を爪の丸みに沿って斜めに左右とも貼る



接着面に隙間がないか確認

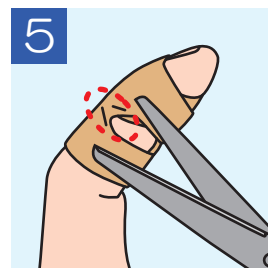

屈曲して腕にできたタワミをハサミで切除し整える

出典：手の治療専門サイト 田中利和公式サイト

詳しい情報・
装着方法はこちら▶



発売元



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101

取扱店