

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Shot Keep

穿刺部被覆保護材 / ショットキープ


滅菌済医療機器




注射・採血・点滴後の被覆保護材。穿刺部を 圧迫することにより、抜針後の止血に効果的です。

特 長

- 2層構造の吸水性の良いパッドを使用しており、適度な圧迫効果があります。
- パッド部、粘着部に触れずに簡単に貼付でき、衛生的です。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着材を線状に塗布しており、通気性を確保しています。
- 撥水作用のある不織布を基材としています。
- 1枚ずつE.O.G滅菌包装しています。

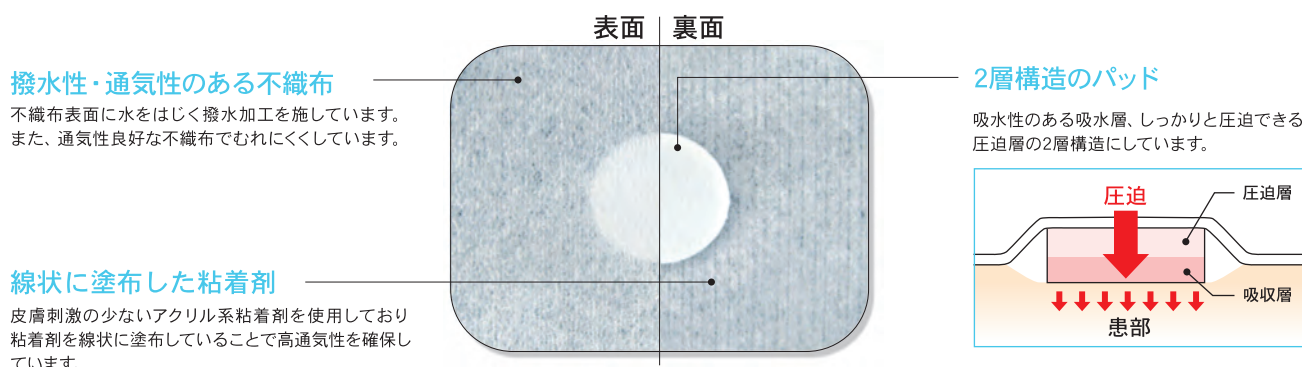

使用方法

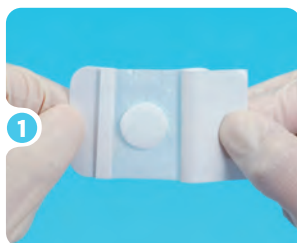

1 剥離紙の大きい方を
半分ぐらいまで剥がします。



2 両手で剥離紙を持ち、パッドを部位に
あて、大きい方の剥離紙を剥がします。



3 残りの剥離紙を剥がします。



4 そのままテープ部を押さえて
しっかりと固定してください。

■使用上の注意

● 使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるときに貼る場合があります。● 粘着部を穿刺部に貼らないでください。● 小児の使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。● 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。● 救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。● 滅菌効果が損なわれますので、テープは使用時に開封してください。● 包装が破損及び汚損している場合には、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■貯蔵及び保管方法

● 直射日光が当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。● 小児の手の届かない所に保管してください。

粘着部サイズ	パッド部サイズ	色	品名コード	内装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
				入数	標準希望小売価格	JAN	入数	GTIN
40mm×55mm	直径16mm	白	MC-KEEP-1	100袋	2,000円	874882	20箱	874889

※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



www.kyowa-ltd.co.jp

大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所：札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所：熊本

☎ お問い合わせ先

メディカルグループまで

大阪 TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101

東京 TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

XJ006 11.06-5,000 第2版