

取扱説明書

ソルボDo エルボーバンド


上腕骨内・外上顆下部圧迫固定バンド

<テニス肘・ゴルフ肘・投球肘等のトラブルの軽減>

女性やジュニア(子供)から大人まで、腱付着部を圧迫、固定することで、使いすぎによるオーバーストレスを軽減します。ソルボセインを内上顆、外上顆パッドに使用し、衝撃吸収・圧力分散が高く長時間の使用が可能になり、固定圧迫力も高く安静度合いを高めます。

テニス肘バックハンド (上腕骨外上顆炎)

バックハンド肘といわれ、バックハンドを繰り返すことによって肘の外側に付いている手首を伸ばす筋の部分に炎症を起こします。

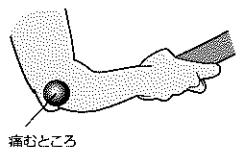

痛むところ

テニス肘フォアハンド (上腕骨内上顆炎)


サーブ、スマッシュなどのフォアハンドでの無理なフォームによって衝撃が肘の内側に過剰にかかるために、炎症を起こします。ゴルフの際にも発生する肘の障害です。



痛むところ


投球肘

使いすぎや、無理なフォームでの投球によって、腕の筋や靱帯、肘の内側関節が痛みます。

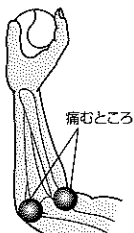


痛むところ

特長

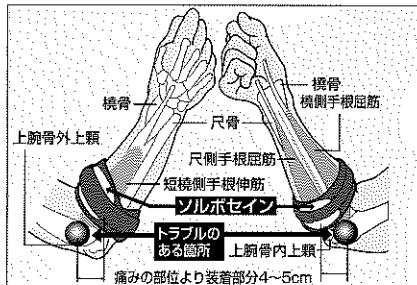

- ①前腕伸筋屈筋を押さえるので、手首からの衝撃を分散し、内外上顆を同時にサポートします。
- ②圧迫固定ベルトが前腕部を均等に圧迫します。
- ③圧迫度も面ファスナーで調節自由自在。
- ④ベルト式で装着が簡単。使用中の違和感も少なく手軽にトラブルの対策ができます。
- ⑤衝撃吸収性、圧力分散性に優れた人工筋肉「ソルボセイン」を内上顆・外上顆の加圧パッドに使用。

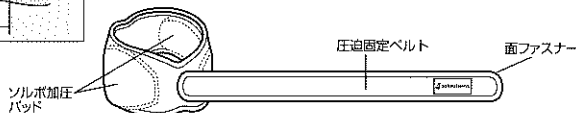



使用方法

☆トラブルが発生した場合は、すぐに専門医にご相談ください。

1. 本体内側、外側、上下を確認します。
2. 装着部位が肘の内外の痛い部分から約4~5cm手首よりソルボ加圧パッドがくるように肘の内側から外側へ向けて圧迫固定ベルトを装着します。
3. 拳を握り力を少し入れ、軽く圧迫を感じるくらいに装着します。

* 痛みのある部位は避けて装着してください。

* 締めすぎには十分ご注意ください。

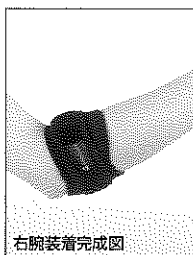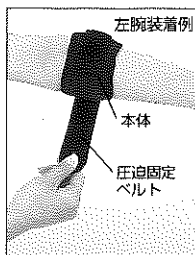


右腕装着完成図

使用上の注意

- ※ 上下、表裏を確認して使用してください。
- ※ 使用方法に従って、正しく使用してください。
- ※ ご自身の前腕に合ったサイズをお選びください。
- ※ 装着時間は、1日2~3時間から始めて、徐々に増やしてください。
- ※ 就寝中は、使用しないでください。
- ※ 本品の機能を損なわないために、正しく装着してご使用ください。
- ※ 長期間の使用や使用状況によっては、破損する場合があります。破損した場合は、すみやかに使用を中止してください。
- ※ ソルボセインを折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になる場合があります。
- ※ ゴムなどのアレルギー疾患などお肌に異常がある場合は、使用しないでください。
- ※ 痛み、発疹、かぶれ、うっ血、かゆみ、しびれ等の異常を感じた場合は、使用を中止し、専門医の指示に従ってください。そのまま使用を続けると、悪化する場合があります。
- ※ 骨折、ねんざ、靱帯損傷など発生直後は使用しないで、すぐに専門医の診断を受けてください。
- ※ 本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
- ※ 使用目的以外には使用しないでください。

サイズの選び方

前腕の一番太い部分を計測します。(計測値が重なるサイズの場合は、大きめのサイズをお選びください。)

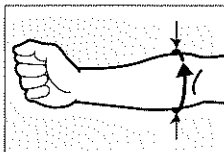


サイズ
(内外上顆下部周囲)
S 21~24cm
M 24~27cm
L 27~30cm
カラー: ブラック
左右兼用

お手入れの方法

- お洗濯は中性洗剤を使用し、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を十分にすすぎ落としてから、絞らずにタオル等で軽く水気を取って、陰干ししてください。
- 乾燥機の使用は避けください。
- 洗濯の際、色物と一緒に洗わないでください。色が染まる場合があります。

【洗濯表示】

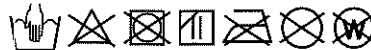

#96576

