

フットプリンターはフットケアシステムの必需品です。だれにでも正確な足底圧分布図がプリントできます。

ソルボフットケアシステムの フットプリンター 取扱い説明書



1

ローラーにインクを満
げんなく染み込ませます。
注意:インクを染み込ませ過
ぎないでください。



2

フットプリンターケー
スを開け、ラバースクリー
ン面(網状)にローラー
で均一にインクを塗りま
す。
注意:インクを塗り過ぎると足
底が全体に黒くなり、正確な
足底圧が測定できません。



3

用紙をタテに置き、フッ
トプリンターケース側に
セットし、ラバースクリー
ンを用紙の上にたおし
ます。



4

足底圧を測定する足と
は逆の足をフットプリン
ターケース側に置きま
す。



5

測定する足をラバー
スクリーンの上にそっ
と置き、まっすぐに起
立して5~10秒間静
止します。
注意:この時足が動くと、
正確な測定ができません。



6

足の外形や装具的縫
製が必要な場合等
は、付属のプラス
ティックスティックを
使いラバースクリー
ンの上からラインや
印をつけます。



7

ラバースクリーンから
足をはずす時は、
ケース側の足に重心
をかけながらそっと足
を上げ、フットプリン
ターの外側にその足
を置きます。



8

ラバースクリーンを持
ち上げ、用紙にきれ
いにプリントされてい
るか調べます。OKな
らもう片側の足も同
様に測定します。



使用上の注意

- インクが手についた時は、せっけん水で洗い流してください。
- フットプリンターはプラスチック製なのでショックを与えないよう、取扱いには十分注意してください。
- ローラーは使用後、必ずローラーに付いているフタをしてください。ヨゴレやインクの蒸発の防止になります。
- インクが無くなった場合は、市販のスタンプインクをお使いください。
- プリント用紙が無くなった場合は、100枚単位で販売していますのでご注文ください。
- 透明フィルムはプラスチックスティックの滑りを良くするものです。無くなった場合は食品用ラップフィルム等をお使いください。

三進興産株式会社

東京:東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー

〒169-0074 TEL: 03-5338-8590 FAX: 03-5338-8599

<http://www.sorbo-japan.com/>

大阪:大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー23階

〒530-0005 TEL: 06-4707-2371 FAX: 06-4707-2399

SORBOTHANE® ソルボセイン® は三進興産(株)の商標登録です。