

水や大音響から、耳をしっかりガードします。

アメリカで開発された新素材の

パティ・パディーズ

イヤークューブご使用の方におすすめします。
中耳炎・外耳炎・サーファーズイヤの予防に最適。



耳栓

最近の調査で、耳鳴り・難聴の子供が激増していることがわかりました。ゲームセンター、映画、コンサートなどの音響が悪影響を及ぼしていると考えられます。米国の医学者マルコフ博士が開発した「パティ・パディーズ耳栓」は、防水性にすぐれているのはもちろん、浅く挿入すれば音が聞こえ、少し深く挿入すれば遮音性が高まる特徴があり、医学界や教育界でも高く評価されています。柔軟なシリコン系新素材（FLO-TEK™）を用いていますので、耳孔の形を選ばず、優しい感触でフィットします。


「パティ・パディーズ耳栓」は、いままでの耳栓とこんなに違います。

耳栓といえば、フランジ型のゴムが付いた栓や、押しつぶして外耳道に入れるスポンジ状のものが一般的でした。「パティ・パディーズ耳栓」は、シリコン系の素材（FLO-TEK™）を用いた新しい形の耳栓で、防水性や遮音性が非常にすぐれています。

- 柔軟な素材で、誰でも簡単・安全に装着することができます。一人ひとりの耳孔にぴたりと合い、違和感なく、長時間の使用が可能です。
- 表面がなめらかで、脱着の際の摩擦がとてもしないため、皮膚を傷つけたり、痛みを感じることもありません。
- 深く挿入する必要がありませんので、耳垢などを奥のほうに押し込む心配がありません。
- 万一、耳栓を水中に落としても、水に浮き、鮮やかな色をしていますので、すぐにみつけることができます。



使用方法

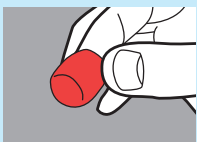

① 一粒をもみます



② 丸めます



③ 押し当てます



④ 平らに広げます



⑤ 耳穴を塞ぎます



外す時は耳の後ろから押し上げます。

注意 ●不衛生と感じたり、粘着力低下時は交換してください。●耳や髪の手から取れない場合は、ミネラルオイルで溶かすか簡単に取れます。奥に入って取れない場合は、無理せず耳鼻科にご相談ください。●水深3メートル以上の潜水や飛び込みには使用しないでください。●耳栓以外での使用はお避けください。●小児の手の届かないところに保管してください。また、お子様のご使用は、大人の監督のもとで行ってください。●急激な脱着は気圧の変化により鼓膜を痛めることがあります。●サンオイルやヘアースプレーなどが付着しますと、劣化につながります。きれいな手でお取り扱いください。●本品をちぎらないでください。●睡眠時のご使用はお避けください。

イヤークューブバンディット ウルトラ



マリンスポーツ時の耳栓のはずれを
防止するヘッドバンドがさらに進化!

耳栓の脱落を防ぐ



①保持力UP ②快適さUP ③丈夫さUP



Grip-Tek™ Neoprene

メーカーオリジナル厚さ4.0mmのネオプレン素材
従来品 (イヤークューブバンディット) より厚く柔らかく、丈夫で長持ち、裏地にエンボス加工が施され、ヘッドバンドをはずれにくくしています。額部分や耳当て部分が広くなり、強度アップと快適な装着感を生み出しています。

「パティ・パディーズ耳栓」と同じくマルコフ博士のアイデアから生まれたヘッドバンドで、すでに100万枚の販売実績があります。伸縮性のあるネオプレン素材を用い、水遊びに夢中な子供が無意識のうちに耳栓をはずしてしまうことを防止します。また保温性があるので、イヤークューブとして冬のスポーツにも最適です。マジックテープで止めるだけの簡単装着で、きつい圧迫感がありませんから、小さな子供もいやがらずに着けることができます。
「パティ・パディーズ耳栓」と併用すれば、耳への水の侵入を最大限に防止する事が可能です。

対象および用途

- 鼓膜にドレーンチューブを挿入している人
- 外耳炎 (スイマーズイヤ) の防止
- サーファーズイヤ (外耳道外骨腫) の防止
- 耳の保温

使用上の注意

ダイビングなど、頭から飛び込むとイヤークューブバンディットが外れる可能性がありますので、水に入る時は足から入ることをお勧めします。



サイズ	バンド長	頭サイズ	対象年齢
S	49.5cm	42~47cm	1~3歳
M	52cm	47~52cm	4~9歳
L	56.5cm	52~58cm	10歳以上~大人

従来品

イヤークューブバンディット

裏面は黒色でリバーシブル




《《 パティ・パディーズ耳栓1セット付属

イヤークューブバンディットとあわせてお使いください。
パティ・パディーズ耳栓の色は選び出ません。
ご了承ください。

中耳炎

定義

中耳炎は鼓膜の奥にある空洞(中耳)に炎症を起こす病気です。急性中耳炎は、風邪やのどの炎症が、耳管という管を通して中耳へ移り発症する病気です。子供の約75%が3歳までに中耳炎にかかり、その子供の半分は、4歳までに3回も中耳炎にかかります。滲出性中耳炎は、中耳に滲出液がたまる病気で子供とお年寄りが多くかかります。滲出液が溜まるため聞こえが悪くなりますが、子供の場合は、聞こえなくなっているにもかかわらず、自分で耳が聞こえないとは言わないことがほとんどで、ただ不機嫌なだけに見えたり、言葉の発達の遅れなどが唯一の症状のこともあります。慢性中耳炎は、これらの中耳炎が十分に治りきらずに、鼓膜に穴が開いた状態になった病気で、鼓膜の穴から断続的に耳漏が見られ、聞こえも悪くなります。中には、進行性を早め、脳に炎症を起こしたり、顔面神経麻痺(片方の顔が動かなくなる)を起こすことさえあります。

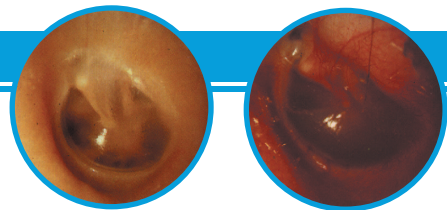

【通常】


【外耳炎】

治療

急性中耳炎・慢性中耳炎の治療は2つのステップに分けられます。

1. 感染菌を退治する。
2. 耳の中を湿らせないように気をつける。

抗生物質などで感染菌を抑えるのに加え、入浴時の水や汗などと一緒に再び細菌が耳に入らないよう、充分に注意する必要があります。そのためには耳栓をすることが最も確実です。滲出性中耳炎の場合には、抗炎症剤や点鼻薬を使って炎症で狭くなった耳管を広げ、中耳にたまった滲出液が外に流れ出るようにします。しかし、薬でも中耳にたまった滲出液が外に流れ出ないことも多いため、ほとんどの場合、病院では、滲出液を出すために鼓膜を切開したり、鼓膜に小さいチューブを挿入したりします。その際に必ず病院で“耳に水が入らないよう注意すること”と言われるはずです。細菌をたくさん含んだお風呂の水や汗が耳に入ると、病気はさらに悪化します。必ず耳栓をさせる必要があります。たとえ中耳炎にかかっているにもかかわらず、しっかりした耳栓とヘッドバンドで保護すれば、耳の中に水が入ることはないため水泳をしても大丈夫です。

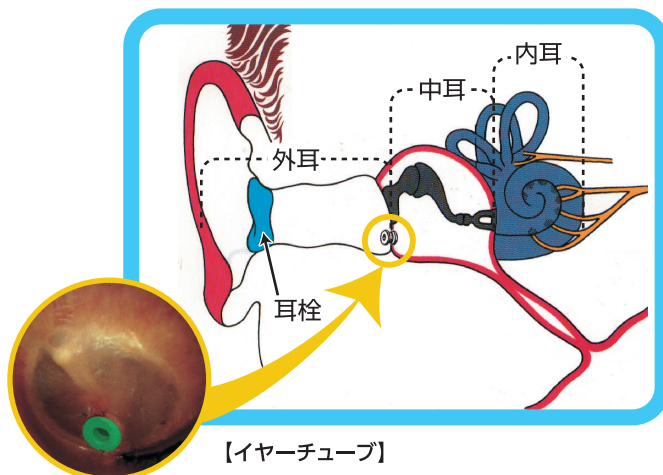


【イヤータブ】

外耳炎 【スイマーズ・イヤー】

定義

外耳炎の多くは水泳や入浴などで入った水が外耳道に残り、その中に含まれるバクテリアやカビ(真菌)が増殖することにより起こるため、スイマーズ・イヤーと呼ばれています。また、耳掻きや耳掃除によって外耳道に傷がついたり、プールの塩素による炎症が原因になることもあります。

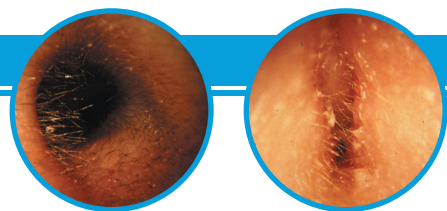

【通常】

【外耳炎】

治療

一般的には耳穴から抗生物質の点耳をしたり、抗真菌剤を耳の中へ塗ることにより治療されます。炎症を悪化させないためには、耳を濡らさないことが大切です。そのためには水泳・入浴・シャンプーの際にはシリコン製の耳栓とヘッドバンドを用いることが奨められています。



【パティ・バディーズ】を耳に浅く押し込めば、水泳の授業などで、外部からの声や音が充分聞こえます。少し深めに挿入すれば遮音性が高くなります。



水遊びをしても、苦しい中耳炎が再発しないので、子供は【イヤータブ】が気に入ります。

～ 文献 ～

1. 総合荻窪病院耳鼻咽喉科 菅家 元 「小児科診療」1998年8号 夏と小児疾患
2. Recent Prog Med 2002 Feb;93(2):104-7.
3. Br J Gen Pract. 2001 Nov;51(472):930.
4. *Gates GA, Cost-effectiveness Considerations in Otitis Media Treatment, Otolaryngol Head Neck Surg. 114(4), April 1996, 525-530.
5. Practical Otolaryngology, Daniel J. Pender, J. B. Lippincott Company, 1992.



輸入販売元

株式会社 エントリージャパン

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-12-5 新宿松喜ビル

Tel. 03-5362-3383 Fax. 03-5369-8330

Mail: info@entry-japan.com

耳のケアについての細心の医学情報を、エントリージャパンのウェブサイトでご紹介しています。

www.entry-japan.com

※商品の内容及びパッケージは、予告なく変更する場合がございます。
最新情報はウェブサイトにてご確認ください。