

ステッキ（伸縮式）

取扱説明書



はじめに

この度は、ステッキ（伸縮式）をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、ステッキ（伸縮式）の正しい取扱方法について説明しています。

ステッキ（伸縮式）を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、使用する際にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意

使用する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁止、注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁止」「注意」の三つに区分して示しています。


図記号の例	
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 禁忌・禁止	人が死亡または重症を負うことが想定されるため、避けるべき患者や使用方法を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
 ポイント	使用上のポイントや、確認いただきたいことを示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 注意

1. 本品は、歩行補助具です。使用目的以外に使用しないでください。
2. 本品は歩行を補助するためのものですので、全体重を支えることはできません。
3. 使用する前に各部を点検してください。亀裂や変形、ガタつきがある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
4. 身体に合った長さに調節して使用してください。
5. 使用中も、長さを調節するプッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていること、ガタつき防止ネジにゆるみがないことを確認してください。
6. 斜めに杖をついたり、濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところで杖をついたりすると転倒し負傷するおそれがあるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。
7. 道路の側溝や凹みがある箇所では杖の先端がはまり込む場合があるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

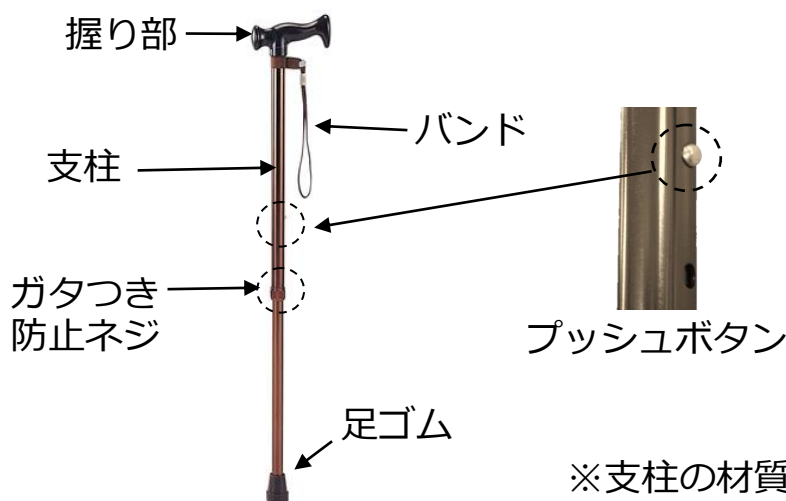

※支柱の材質はアルミニウム合金

注文コード	品番	商品名		
	全長	杖先径	握り部材質	重量
502-012-03	PW-239	アルミ製伸縮式ステッキ,バンド付き, プラスチック握り,(10 段階調節 25mm ピッチ)		
	670～895mm	φ19mm	プラスチック	335g
502-012-04	PW-222B	アルミ製伸縮式ステッキ,バンド付き, 木製握り,(7 段階調節 30mm ピッチ)		
	705～885mm	φ17mm	木製	305g
502-012-31	PW-228-129SH	アルミ製伸縮式ステッキ,ストロベリー柄, バンド付き,木製握り,(10 段階調節 25mm ピッチ)		
	715～940mm	φ16mm	木製 (楓)	285g
502-012-34	PW-228P	アルミ製伸縮式ステッキ,パープル, バンド付き,木製握り,(11 段階調節)		
	620～940mm	φ16mm	木製	280g
502-012-35	PW-228R	アルミ製伸縮式ステッキ, レッド, バンド付き,木製握り,(11 段階調節)		
	620～940mm	φ16mm	木製	280g
502-012-36	PW-228G	アルミ製伸縮式ステッキ, グリーン, バンド付き,木製握り,(11 段階調節)		
	620～940mm	φ16mm	木製	280g
502-012-42	PW-228-CHERRY	アルミ製伸縮式ステッキ, チェリー柄, バンド付き,木製握り,(11 段階調節)		
	620～940mm	φ16mm	木製(天然木)	295g
502-012-52	PW-802SBK	アルミ製伸縮式ステッキ, ブラック, バンド付き,ソフトグリップ,(10 段階調節 25mm ピッチ)		
	710～935mm	φ19mm	TPR	350g

補充品

注文コード	品番	商品名
502-012-09	-	足ゴム, ダークブラウン, ステッキ・杖先径φ19mm 用
502-012-19	-	足ゴム, ブラック, 先径φ19mm 用
502-012-86	-	足ゴム, ダークブラウン, 先径φ16mm 用
502-012-87	-	足ゴム, ダークブラウン, 先径φ17mm 用
502-012-96	-	足ゴム, ブラック, 先径φ16mm 用


3. 一般的な使用方法とその注意事項

1) ガタつき防止ネジを時計回りに回してゆるめ、プッシュボタンを押し込み、支柱を上下にスライドさせて長さを調節します。

- ・ 502-012-04 : 固定穴は 30mm 間隔で 7 段階調節
- ・ 502-012-04 以外 : 固定穴は 25mm 間隔で 10 段階調節

※502-012-34～502-012-36、502-012-42 は、更に 1 段階短くなる収納用の調節穴があります。

- ① 自然な姿勢で立ち、腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- ② 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40°になるようにします。

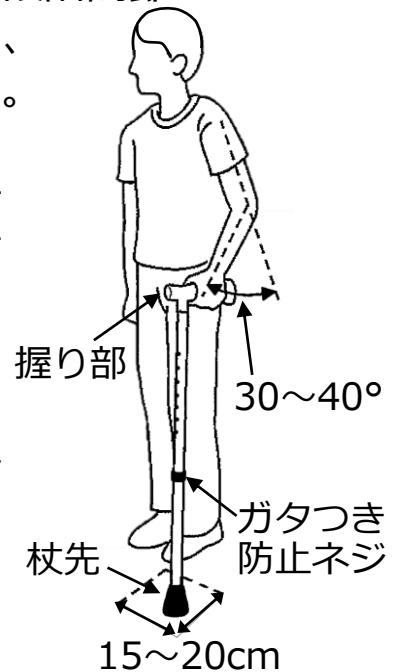

ポイント

1. 固定穴に指等を挟まないように注意してください。
2. 腰の曲がった方や前傾姿勢の方は、その姿勢で立ち、床から頭までの高さの約半分の位置に握り部がくるよう調節してください。
3. プッシュボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。押し込みすぎた場合は、一旦支柱を引き抜き、プッシュボタンを支柱の中から押し出してから再度調節してください。
4. 調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。

2) ガタつき防止ネジを反時計回りに回してしっかりと締めます。

ポイント

ガタつき防止ネジにゆるみがないことを確認してください。

4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

- 1) 使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどい場合や落ちにくい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。
- 3) 足ゴムがすり減ったり、抜けやすくなったりしている場合は、新しい足ゴムに交換してください。
足ゴムを交換する際は、足ゴムをねじりながら引き抜き取り外します。交換用の足ゴムを取り付ける際は、ねじりながら確実に奥まで差し込んでください。
- 4) 本品が倒れない安定した場所で保管してください。
- 5) 耐用期間：1年〔自己認証（当社データ）による〕。

5. アフターサービスとその連絡先に関する事項

輸入業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>