


# 4点支持杖 取扱説明書

## 1. 安全上の警告・注意

- 1) 杖としての用途以外に使用しないでください。また、本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。
- 2) 杖に亀裂や変形がある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
- 3) お使いになる前に各部を点検してください。
- 4) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなった場合は、新しい足ゴムと交換してください。
- 5) 斜めに杖をついたり、濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところでは、じゅうぶん気をつけてご使用ください。

## 2. 製品概要

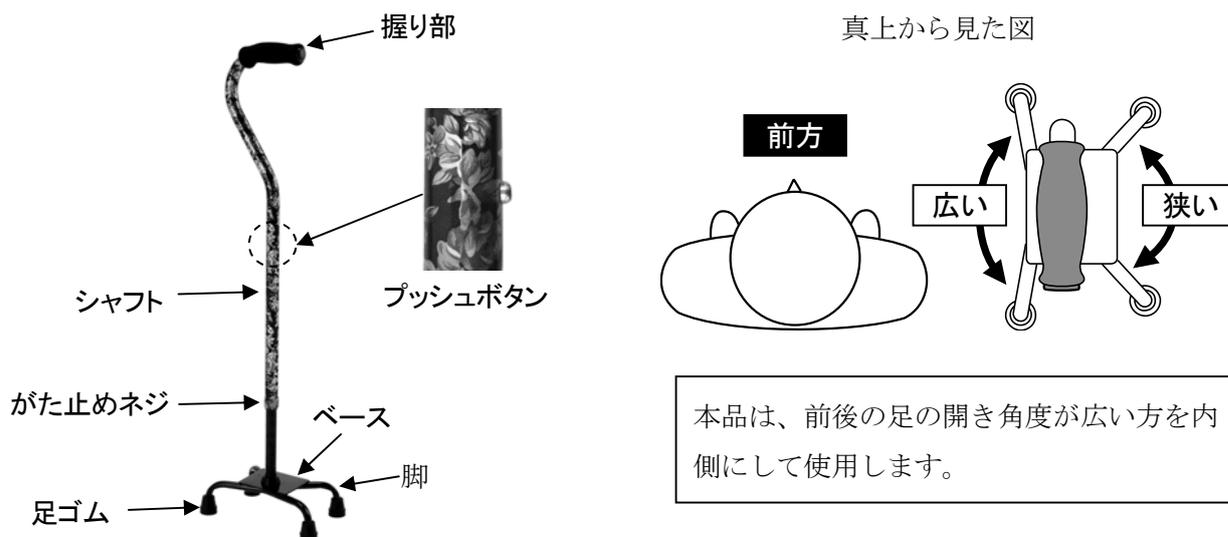

品名	4点支持杖, 小, フラワー
注文コード	502-012-50
品番	PW-113-BK FLORAL
全長	740~965mm
脚サイズ	約 140×190mm
杖先径	φ 12mm
材質	シャフト : アルミニウム合金 握り部 : エチレン酢酸ビニル ベース、脚 : スチール
重量	800g
耐荷重	150kg

### 3. 杖の長さの調節

- 1) がた止めネジを時計回りに回してゆるめます。
- 2) プッシュボタンを押し込み、シャフトを上下にスライドさせて長さを調節してください。(25mm ピッチで 10 段階調節)


#### ⚠ 注意

調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。

- 3) がた止めネジを反時計回りに回してしっかりと締めます。

#### 【杖の高さの目安】


- 腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- 腰の曲がった方は、曲がった状態で合わせてください。
- 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。

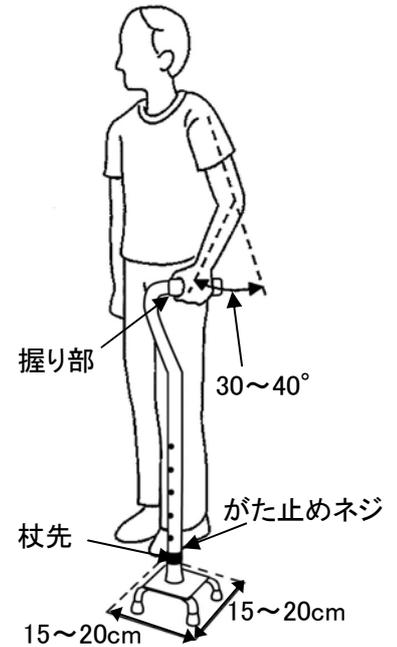

### 4. ベースの向きの変え方

反対側の手で使用する場合は、ベースの向きを変えてください。

- 1) がた止めネジを時計回りに回してゆるめます。
- 2) プッシュボタンを押さえながらベースを 180° 回転させます。
- 3) プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認し、がた止めネジを反時計回りに回して締めます。

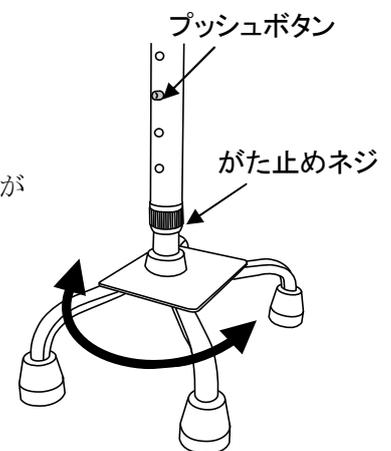

### 5. お手入れ

- 1) ご使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭してください。

### 6. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>