


## ハイネ mini 3000 クリップランプ取扱説明書

### 【安全上の警告・注意】

1. アルカリ乾電池をご使用ください。
2. 電球の過熱を避けるため、使用後は電源を切ってください。
3. 使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検してください。
4. 本品は、アルコールで湿らせた柔らかい布で清拭してください。

### 【一般的な使用方法】

1. ハンドルの底蓋を外し、単3アルカリ乾電池2本をプラス (+) 側より入れます。
2. ハンドルのクリップ部分のスイッチを下側に下げて点灯させます。使用しないときは、スイッチを上側に上げて消灯させます。
3. 電球を交換する場合は、電球が冷めてからキャップを回して外し、使用済みの電球を引き抜いて、新しい電球と交換してください。

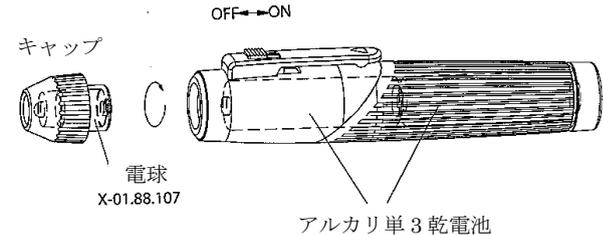

### 【アフターサービスとその連絡先】

製造販売業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>