

provita[®] 上肢・下肢台
medical

(角度自在タイプ)高さワンタッチ調節式

取扱説明書



はじめに

この度は、プロビタ上肢・下肢台(角度自在タイプ)をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、プロビタ上肢・下肢台(角度自在タイプ)の正しい取扱方法について説明しています。

プロビタ上肢・下肢台(角度自在タイプ)を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、使用する際にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

目次

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意.....	2
2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造	4
3. 組立方法	4
4. 一般的な使用方法とその注意事項.....	5
5. 清掃に関する事項.....	6
6. 保守点検に関する事項	6
7. 技術仕様	6
8. アフターサービスとその連絡先に関する事項	6
9. 保証.....	7

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意

使用する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁止、注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁止」「注意」の三つに区分して示しています。

図記号の例	
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 禁忌・禁止	人が死亡または重症を負うことが想定されるため、避けるべき患者や使用方法を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
 ポイント	使用上のポイントや、確認いただきたいことを示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 注意

1. 本品は、上肢及び下肢に注射や採血を行う際、支持台として使用します。それ以外の目的で使用しないでください。
2. 分解や修理、改造を行わないでください。事故や故障の原因になります。
3. 使用前に各接続部の固定がゆるんでいないことを確認し、万一ゆるんでいる場合には、締めなおすなどの対応を行ってください。
4. 使用前に必ず本品が正常にかつ安全に作動することを確認してください。
5. 台部の耐荷重約 15kg を超える力がかからないようにしてください。破損又は転倒するおそれがあります。
6. 当社指定の組立部品 (4 ページ参照) 以外の組み合わせで使用しないでください。
7. 平らな場所に置いてご使用ください。
8. 強い衝撃を与えたり、台部以外に物を乗せたりしないでください。故障するおそれがあります。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

本品は上肢及び下肢に注射や採血を行う際、支持台として使用します。台の高さ、角度を任意に設定できます。


構成品




注文コード	品番	商品名
030-121-35	211457	プロビタ 上肢・下肢台（角度自在タイプ）高さワンタッチ調節式

3. 組立方法

- 1) プラスチックベースを逆さにし、各足ゴム付脚を図のように穴の開いた側を上にした状態で、プラスチックベースの各スリット部へ奥までしっかり挿入します。

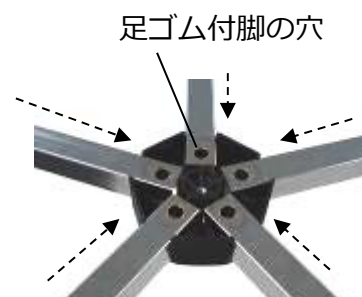


- 2) 穴に脚固定用スチールプレートの凸部（5箇所）を合わせ、しっかりと手で保持します。

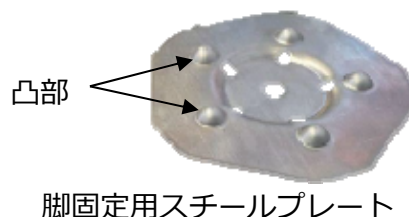

- 3) プラスチックベースの反対側（本来は上部）の中央穴に支柱を差し込みます。その際、脚の穴と脚固定用スチールプレート上の凸部がはずれないようじゅうぶん注意してください。




- 4) 下図のようにスチールプレート用固定ボルトとワッシャーを使用し、脚固定用スチールプレート、プラスチックベース、支柱を固定します。六角レンチで最後までしっかりと締めます。支柱が上になるよう本品をひっくり返し、組み立ては完成です。

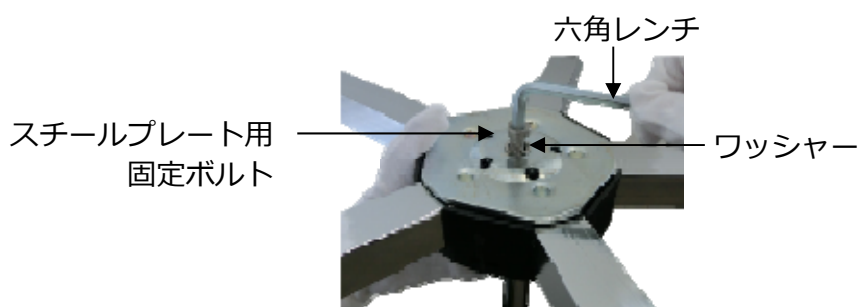

4. 一般的な使用方法とその注意事項


1) 台部の角度調整

角度を設定し、レバーを矢印方向に回して固定します。反対に回すとゆるみます。

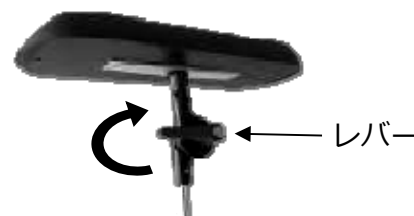

2) 高さの調節

高さを調節する際は、支柱が落下しないように一方の手でしっかりと支柱を持ちます。もう一方の手でノブ（ワンタッチ）を上げてロック機能を解除し、支柱を必要な高さに調節してからノブを離すとロック機能が働きます。

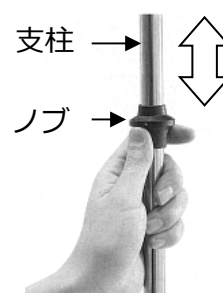

⚠ 注意

患者の上肢又は下肢を台部に乗せるときには、全体の重心バランスがとれるよう台部の中央部に乗せてください。

ポイント

台部は横方向に回転しますが、上肢・下肢を台部に乗せる等、上から負荷をかけるとある程度回転が固定されます。ただし一番低い位置では、上から負荷をかけても回転は固定されません。

5. 清掃に関する事項

アルコールで湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

6. 保守点検に関する事項

ご使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認してください。

7. 技術仕様

寸法：W430×D430×H635～865mm

台部；W125×D350mm

支柱径；φ 25mm

材質：台部；ウレタンフォーム

支柱・脚；クロムメッキ

重量：約 2.6kg

8. アフターサービスとその連絡先に関する事項

輸入業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

9. 保証

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、プロビタ 上肢・下肢台（角度自在タイプ）をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります

This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: プロビタ 上肢・下肢台
(角度自在タイプ)

製造番号/記号:

ご芳名

ご住所

TEL. ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ()

お買い上げ日 年 月 日

輸入業者: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546