

provita[®] カラーガートル台
medical

取扱説明書



はじめに

この度は、プロビタ カラーガードル台をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、プロビタ カラーガードル台の正しい取扱方法について説明しています。

プロビタ カラーガードル台を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、お使いになるときにいつでも見られるよう、大切に保管してください。

目次

1.	安全上の警告・注意	1
2.	製品概要と各部・付属品の名称・構造	2
3.	使用前の準備 [組み立て]	3
4.	使用方法とその注意事項	4
5.	清掃に関する事項	5
6.	保守点検に関する事項	5
7.	技術仕様	5
8.	アフターサービスとその連絡先に関する事項	5
9.	保証	6

1. 安全上の警告・注意

使用する前に、この「安全上の警告・注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の二つに区分して示しています。

図記号の例	
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	強制（必ず守ること）や指示を示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

	1. 本品は点滴用の薬剤が入ったボトルやバッグを吊るすためのスタンドとして使用します。それ以外の目的で本品を使用しないでください。 2. 分解や修理、改造を行わないでください。事故や故障の原因になります。 3. フック一個当たりの耐荷重約 20N（2kg）を超える力がかからないようにしてください。本品が転倒するおそれがあります。 4. 当社指定の組立部品（2 ページ参照）以外の組合せで使用しないでください。
	平らな場所においてご使用ください。




注意

	強いショックを与えたり、落としたりしないでください。故障するおそれがあります。
	1. 使用前には各接続部の固定が緩んでいないことを確認し、万一緩んでいる場合には、締め直すなどの対応をしてください。 2. ご使用前に必ず本品が正常にかつ安全に作動することを確認してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

本品は点滴を行う際、点滴用の薬剤が入ったボトルやバッグを吊るすためのスタンドとして使用します。フックは 7 色の種類があり、任意の用途に応じて使い分けができます。本品は、下記の通りの組立部品から構成されています。

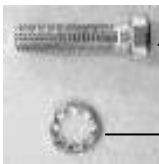番号	形状	部品名	説明	数量
①	 A B	ボトルフック A・B	一組 (フック 4 個)	1
②		支柱 (伸縮タイプ)	—	1
③		キャスター付脚	—	5
④		プラスチックベース	真上から見た図	1
⑤		脚固定用スチールプレート	—	1
⑥		スチールプレート用固定ボルト	—	1
⑦		ワッシャー	—	1
⑧		六角レンチ	—	1

注文コード	品番	商品名
030-121-01	177764	プロビタ カラーガートル台 グリーンフック付
030-121-02	177773	プロビタ カラーガートル台 ブラックフック付
030-121-03	177782	プロビタ カラーガートル台 ブルーフック付
030-121-04	177791	プロビタ カラーガートル台 グレーフック付
030-121-05	177807	プロビタ カラーガートル台 レッドフック付
030-121-06	177825	プロビタ カラーガートル台 イエローフック付
030-121-07	177816	プロビタ カラーガートル台 ピンクフック付


補充品(保守部品)

注文コード	品番	商品名
030-121-40	141097	プロビタ ネジ式高さ調節ノブセット
030-121-46	186470	プロビタ ガートル台用 ϕ 50mm キャスター

3. 使用前の準備 [組み立て]

- 1) プラスチックベースを逆さにし、各キャスター付脚を図のように穴の開いた側を上にした状態で、プラスチックベースの各スリット部へ奥までしっかり挿入します。

キャスター付脚の穴

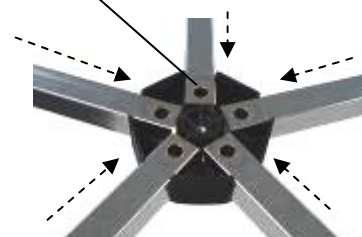


- 2) 穴に脚固定用スチールプレート(五箇所)を合わせ、しっかりと手で保持します。

凸部



脚固定用スチールプレート

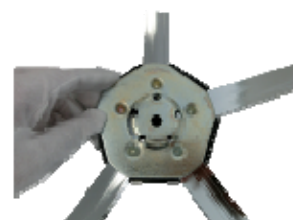


- 3) プラスチックベースの反対側(本来は上部)の中央穴に支柱(太い方の端)を差し込みます。その際、キャスター付脚の穴と脚固定用スチールプレートの凸部が外れないよう十分注意してください。


支柱



- 4) 下図のようにスチールプレート用固定ボルトとワッシャーを使用し、脚固定用スチールプレート、プラスチックベース、支柱を固定します。六角レンチで最後までしっかり締め付けてください。

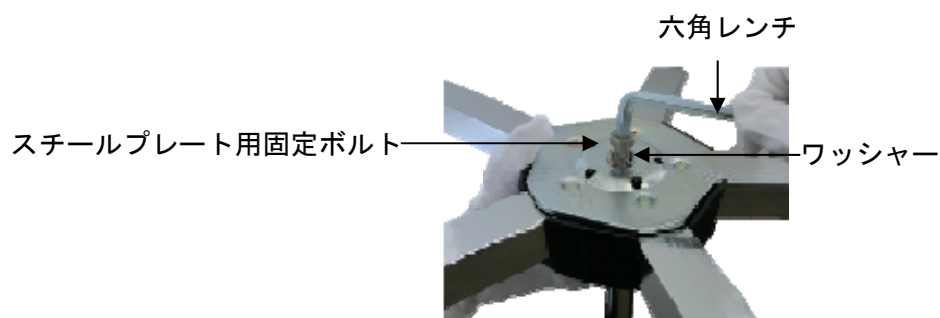

- 5) 一旦本来の向きに戻して置き、ボトルフックをボトルフック B→ボトルフック A の順番で支柱先端に差し込みます。

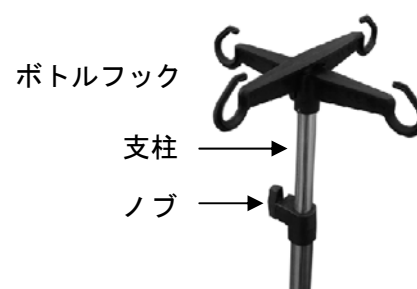

本品の組み立ては完了です。

4. 使用方法とその注意事項

1) 高さの調節

高さを調整する際は、支柱が落下しないように一方の手でしっかりと支柱を持ち、もう一方の手でストッパーネジを反時計回りに回してゆるめ、支柱を必要な高さに調整してから、ストッパーネジを時計回りに回して固定します。



2) ボトルフック

ボトルフック両端のフックにボトルやバッグを吊してください。フック一個当たり約 2kg 取付けが可能です。

注意

ボトルやバッグを吊るしたままで高さを調整しようとする場合、支柱には最大約 80N (8kg) の荷重がかかっています。ノブをゆるめる操作の前に、あらかじめ荷重を軽減する処置をとる、あるいは協力者を要請するといった対応を講じてください。

3) 支柱への他の機器の取付け

輸液ポンプ等の他の機器を取付ける場合には、全体の重心が可能な限り低くなるよう、また水平方向の重量バランスが可能な限り均等になるように取付けてください。

4) 移動

移動する際は、支柱の高さを最も低い位置まで下げてください。特に、段差、柔らかな床面、傾斜のある場所を移動する際は、本品が転倒しないよう保持してください。

なお、キャスターにロック機能はありません。

注意

ご使用前に、各接続部がしっかり固定されていること、各部品に破損等がないことをご確認ください。

5. 清掃に関する事項

アルコールで湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

6. 保守点検に関する事項

ご使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認してください。

7. 技術仕様

寸法：ベース $\phi 470\text{mm} \times \text{H}1260 \sim 2100\text{mm}$ 、支柱径： $\phi 25\text{mm}$ 、キャスター： $\phi 50\text{mm}$

材質：ボトルフック（ポリプロピレン）、支柱・脚（ステンレス）

重量：約 3kg

8. アフターサービスとその連絡先に関する事項

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

9. 保証

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
- 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、**プロビタ カラーガードル台**をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: **プロビタ カラーガードル台**

ご芳名

ご住所

TEL. ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ()

お買い上げ日 年 月 日

販売元: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546