

アンシルク®・ビバナス

Ansilk-Vivanurse

C&Gストッキング
C&G Stockings

Vivanurse

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《アンシルク・ビバナス》は、日本人体型データに基づいて設計された『C&Gストッキング』です。足首から大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression & Gradation)設計により、快適なフィット感で脚をサポートします。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意



警告

人身事故につながるおそれのある注意事項

- 次の方は、ご使用にならないでください。
 - 高血圧、心臓病など血行に障害のある方
 - 脚に何らかの障害をお持ちの方(神経障害・糖尿病など)
 - 現在、ケガや病気などでむくみを感じる方
 - 装着部位に傷や炎症がある方
- 本品はナイロンとポリウレタンを使用しています。これらの素材に過敏症のある方はご使用にならないでください。
- 使用中、使用後に、痛みやしびれなどの違和感、皮膚などに異常が生じた場合は使用を中止し医師にご相談ください。
- 装着により気分が悪くなった場合は使用を中止し医師にご相談ください。
- 適切な圧迫圧を得るために、正しいサイズをお選びください。
- 過剰な圧迫による血行障害や神経障害を防ぎ、安全にご使用いただくために、以下のような状態での着用はおやめください。
 - ストッキングの上端を折り返しての着用
 - シワ・たるみ・すり落ちのある状態での着用
 - かかとの位置をずらしての着用
- ハイソックスタイプは大変伸縮性が高いので引き上げ(引っ張り)過ぎに注意し、必ずひざ下丈で着用してください。すり落ちによるひざ周囲の生地のたるみやシワが、かぶれや血行障害の原因となることがあります。
- 伝線、ほつれが見られた場合は、使用を中止してください。
- 本体は、ハサミなどで加工、改造を行わないでください。
- 就寝中には使用しないでください。
- 使用期限(パッケージに記載)を過ぎての使用は行わないでください。
- 圧迫圧のあるストッキングと重ね履きはしないでください。

注意

物損事故につながるおそれのある注意事項


- 爪や指先の荒れ、指輪などで伝線する場合がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。必要に応じて手袋をご利用ください。
- 繊維の劣化を避けるため、軟膏などの油脂類がストッキングに付着しないようにご注意ください。

使用方法


※着用前に必ず、伝線や破れ、ほつれなどが無いことを確認してください。

※イラストはハイソックスタイプの場合です。


履き方

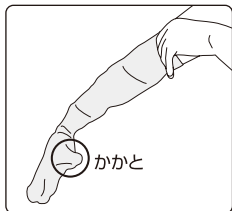

① スtockingの中に手を入れ、かかとの部分を内側からつまみます。

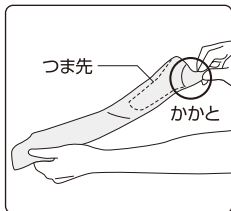


② かかとをつまんだまま手を引き抜き、かかとかかとの部分を中に残して裏返しにします。

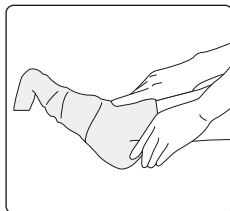


③ つま先をstockingの中に入れ、かかとの位置をしっかり合わせるようにstockingを引き上げます。




④ 裏返したstockingを表向きになるように反転させます。

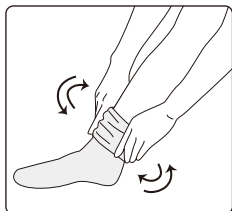


⑤ 親指をstockingと足の間に入れ、半円を描くように動かしながら少しずつ均一に引き上げていきます。

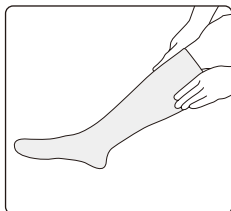

⑥ 全部上まで引き上げたら、かかとの位置のずれ、シワやたるみ、ねじれなどが無いことを確認してください。

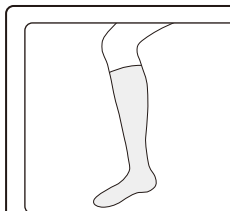


ハイソックスタイプは伸縮性が高いので引き上げ過ぎに注意し、必ずひざ丈で着用してください。

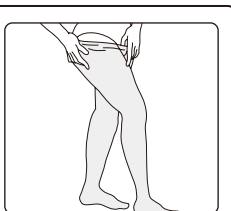

パンティースtockingタイプは、股下に隙間をつくらぬよう確実に引き上げてください。
※強く引っ張り上げての装着はしないでください。

脱ぎ方

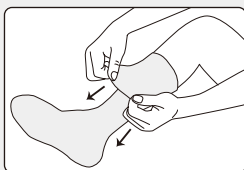

① stockingを上端から足首まで裏返しながらかき下ろします。



② 足首とstockingの間に親指を引っかけてかかとの部分を抜き、裏返しのまま最後までstockingを引き抜きます。

保管および取扱上のご注意

- 直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。
- 本品は伸縮性に富んでいるため、商品により長さ(置寸法)に若干の差がありますが、圧迫圧には影響ありません。
- 本品は黄変することがありますが、商品の機能には問題ありません。

洗濯方法

- 洗濯の際は中性洗剤を使用し、30℃以下の水で手洗いしてください。洗濯機で洗う場合は洗濯ネットを使用してください。
- 洗濯後は乾いたタオルで挟み、軽くたたいて水気を切った後、直射日光を避けて陰干ししてください。
- 繊維の劣化の原因となりますので、熱湯や塩素系漂白剤、消毒剤、アイロン、乾燥機の使用およびドライクリーニングは避けてください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp