

ファインガード®
誤刺防止機構付


医療廃棄ボトル

取扱説明書


ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、使用方法に従って使用してください。

形状、品種


ファインガード® 医療廃棄ボトル
(丸型/角型)

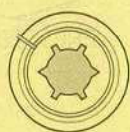

丸型

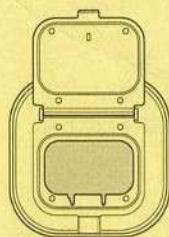

角型

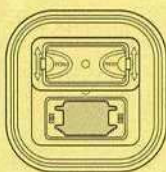

角型スライドロックタイプ

※本品は滅菌されておりません。

<品種>

1L 丸型 (C-10)
3L 角型 (S-30)
5L 角型 (S-50)
10L 角型 (S-100)
3L 角型スライドロックタイプ
5L 角型スライドロックタイプ

使用目的

シリンジから使用済みの注射針を直接手で触れることなく外すことができる、廃棄ボトルです。

適用

シリンジ及びシリンジ注射針付に使用することができます。

※ロックタイプのシリンジは使用できません。

フタの仮止および開閉方法

仮止時はパチンと音がするまで矢印のフタが閉まる方向にフタを動かしてください。その際、角型についてはフタのツマミ周辺を指で押し込んで閉めると仮止し易くなります。仮止状態で閉めれば何度でも開閉できます。

完全ロック方法 (3L・5L・10Lのみ) ※仮止後

完全ロックの際は、まず仮止して仮止できたことを確認した後、矢印の方向にしっかりと押し込んでください。

丸型



角型



角型スライドロックタイプ



角型



角型スライドロックタイプ



使用済み注射針廃棄方法


注射針用廃棄口に対し、平行に針基を奥まで挿入し、垂直にシリンジを引き抜きます。

丸型



注射針用
廃棄口

角型

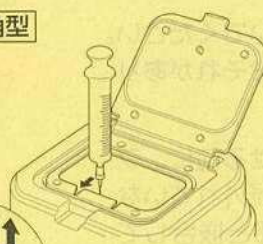

注射針用
廃棄口

針基

角型スライドロックタイプ



注射針用
廃棄口

針基

<詳細な使用方法に関しては、裏面をご覧ください>

使用方法および注意

- ① 収納容器下部に上部を取り付けます。
(角型のみとなります。)

注意 ● 取っ手がしっかり付いているか確認してください。

[角型(S-30、S-50、S-100)使用の場合]
上部を下部に取り付ける際、廃棄口フタ部分のロックピンを強く押さないよう注意してください。強く押すとロックされ、フタが開かなくなります。

- フタの仮止の際も、誤ってロックピンを押し込まないように、フタのツマミ周辺を指で押し込むようにしてください。

[角型スライドロックタイプ使用の場合]
上部を下部に取り付ける際、廃棄口フタ部分のPRESS表記部を強く押さないよう注意してください。強く押すとロックされ、フタが開かなくなります。

- ② 使用済みの注射針をシリンジにセットしたままの状態
で注射針用廃棄口に対し、平行に針基を奥まで挿入し、垂直にシリンジを引き抜きます。

注意 ● 注射針用廃棄口に手を入れないでください。

- ③ 注射針がシリンジから外れ、収納容器内に収納されます。

注意 ● 収納後、容器を振ったり、無理に詰め込む操作はしないでください。収納容器から使用済み針が飛び出したり、針が突き抜けるおそれがあります。

- シリンジに注射針をセットしたまま、収納容器に収納しないでください。収納容器から針が突き抜けるおそれがあります。

- ④ 廃棄口フタを閉じてから、収納容器ごと廃棄を行います。

注意 ● [角型(S-30、S-50、S-100)使用の場合]
ロックピンがパチンと音がするまで押してください。

[角型スライドロックタイプ使用の場合]
PRESS部分をカチッと音がするまで押してください。

- 容器には8分目以上、詰めないでください。収納容器から針が突き抜けるおそれがあります。

- 廃棄物が入った容器を移動させる前に、フタが開かないか、また取っ手が外れていないか(しっかりと収納容器下部と嵌合しているか)を必ず確認してください。

