



誤穿刺防止機構付

セーフティSVセット



輸液終了後から廃棄までの翼状針の針刺し事故を防止します。



SAFETY SV SET

誤穿刺防止機構付 セーフティSVセット

特 長

- 使用後、チューブを引くことにより針先が本体内に収納され、廃棄時の針刺し事故を防止します。
- リキャップは不要で、液ダレ防止機能としてチューブをストッパーにかけることによりチューブ内の血液、薬液の液ダレおよび飛沫を軽減します。
- フラッシュバックの確認が容易です。
- 接続部（メスコネクタ）は、ソフトタイプ（キャップ付）とロック接続可能なロックタイプの2種類を取り揃えています。




ソフトタイプ



ロックタイプ


使用方法

1 穿刺の方法

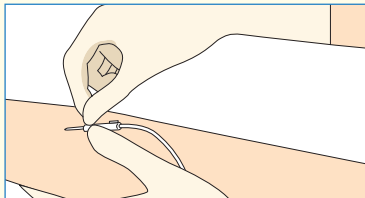

ウイングをつまむようにして持ち穿刺してください。

2 固定の方法

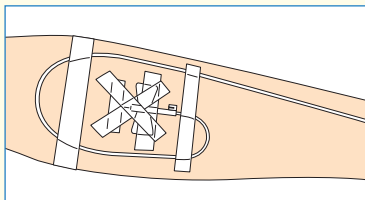

テープ等で固定してください。

3 A 抜針時（片手操作の場合）

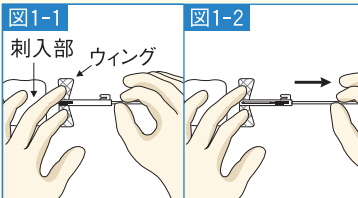


図1-1
刺入部

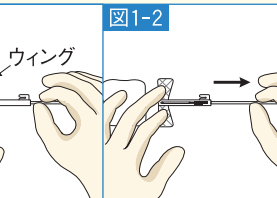


図1-2
ウイング

- 1) 穿刺状態のまま刺入部とウイングを動かさないように片手で固定し、もう一方の手でチューブを握ります（図1-1）。
- 2) チューブを後方に引張って、針を抜きながら収納ホルダー（シース）内に完全に収納させます（図1-2）。

“カチッ”という感触があるまで

3 B 抜針時（両手操作の場合）

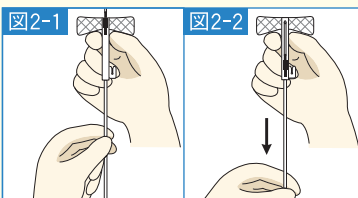


図2-1
針を抜いた後

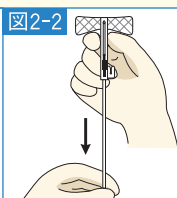



図2-2
チューブを後方に引張る

- 1) 針を抜いた後、収納ホルダー（シース）を片手に持ち、もう一方の手でチューブを握ります（図2-1）。
- 2) チューブを後方に引張って、針を収納ホルダー（シース）内に完全に収納させます（図2-2）。

“カチッ”という感触があるまで

※誤穿刺防止のため、手の持ち替えは避けください。

4 液ダレストッパー

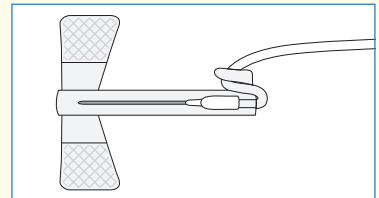

針を収納した後、ウイング後方にある液ダレ防止ストッパーにチューブを挟み（閉塞）、使用後の液ダレ、飛沫軽減にご利用ください。



規格一覧

セーフティSVセット

医療機器認証番号:15700BZY00102000

品 番	JANコード	ゲージ	針の長さ	接続部(メスコネクタ)	梱包単位
JV-SV21LS	4987494055234	21G(0.8mm)	3/4”(19mm)	ソフトタイプ	50本×20箱=1,000本
JV-SV22LS	4987494055241	22G(0.7mm)			
JV-SV23LS	4987494055258	23G(0.6mm)			
JV-SV25LS	4987494055265	25G(0.5mm)		ロックタイプ	
JV-SV21LSL	4987494055272	21G(0.8mm)			
JV-SV22LSL	4987494055289	22G(0.7mm)			
JV-SV23LSL	4987494055296	23G(0.6mm)			

セーフティSV付輸液セット

医療機器認証番号:21800BZZ10107000

品 番	JANコード	点滴量	側 管	先 端	びん針・エア針	翼状針	全長(cm)	備 考	梱包単位
JY-SS343C21	4987494060610	1mL≒ 20滴	なし	タコ管	びん針 中間チューブ型 ・ エア針なし	21G	194	-	20本×10箱= 200本
JY-SS343C22	4987494060627					22G			
JY-SS343C23	4987494060634					23G			
JY-SS343L21	4987494060559			21G		187			
JY-SS343L22	4987494060566		22G						
JY-SS343L23	4987494060573		23G						
JY-SS343Y21	4987494060580		あり	混注 アダプタ		21G	190	ト型混注	
JY-SS343Y22	4987494060597					22G			
JY-SS343Y23	4987494060603					23G			



製造販売業者

株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<http://www.jms.cc/>

2002.04.10XA079-LP
2018.07.02XA079-RA