



使用方法

1 穿刺の方法

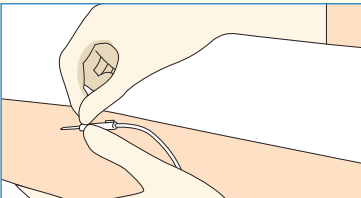


ウイングをつまむようにして持ち穿刺してください。

2 固定の方法

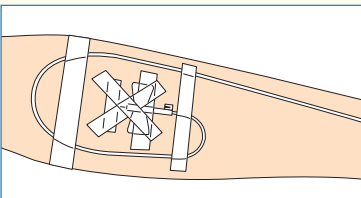

テープ等で固定してください。


3 A 抜針時 (片手操作の場合)

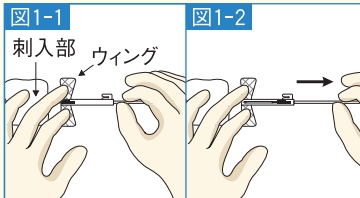

- 1) 穿刺状態のまま刺入部とウイングを動かさないように片手で固定し、もう一方の手でチューブを握みます (図1-1)。
- 2) チューブを後方に引張って、針を抜きながら収納ホルダー (シース) 内に完全に収納させます (図1-2)。

“カチッ”という感触があるまで

3 B 抜針時 (両手操作の場合)

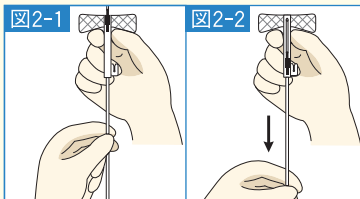


※誤穿刺防止のため、手の持ち替えは避けください。

- 1) 針を抜いた後、収納ホルダー (シース) を片手に持ち、もう一方の手でチューブを握みます (図2-1)。
- 2) チューブを後方に引張って、針を収納ホルダー (シース) 内に完全に収納させます (図2-2)。

“カチッ”という感触があるまで

4 液ダレストッパー

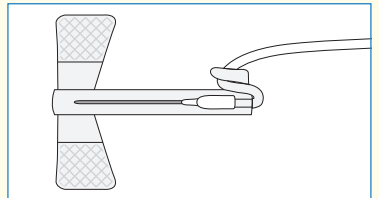

針を収納した後、ウイング後方にある液ダレ防止ストッパーにチューブを挟み (閉塞)、使用後の液ダレ、飛沫軽減にご利用ください。

