



BD マイクロティナ[®] セーフティランセット



穿刺器具と穿刺針を一体化した
完全ディスポーサブルタイプのランセット

BD マイクロティナ® セーフティ ランセットの 4 つの特徴

より持ちやすく

- 人間工学に基づき使いやすい形と大きさを追求して設計されました。
- 持ちやすく、滑りにくくデザインされたホルダーが、確実な穿刺を可能にします。

より簡単に

- キャップを外し、ホルダーの先端を皮膚に押し付けるだけで作動します。
- 針の交換や煩雑な操作が不要で、誰でも簡単に穿刺できます。


より正確に

- 皮膚に触れる部分が狭いので、容易に穿刺部位を確認できます。
- 安定した穿刺深度を確保できるよう、皮膚に押し付けた時のみ作動します。


より安全に

- 針（刃）は穿刺直後に自動的にホルダー内に格納され、針刺し損傷を防ぎます。
- 再使用できない構造で、使い回しによる交差感染を防止します。


使用方法

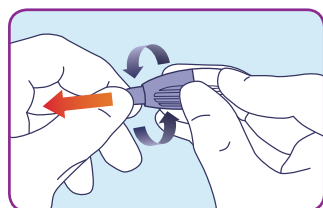


- ① 穿刺する部位を消毒し、保護キャップをねじって引っ張り、ホルダーから取り外します。

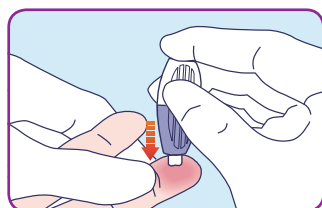

- ② 穿刺部位周辺を圧迫し、皮膚を張らせた状態で、ホルダーの先端を穿刺部位に押しあてます。(この時ホルダーの先端が少し引っ込みます。)

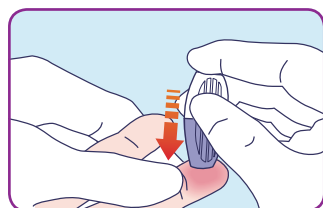


- ③ 作動音がするまでさらに押し付け、すぐに離します。

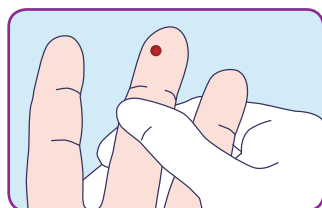


- ④ 血液を必要量採取します。


使用方法（自己採血用）

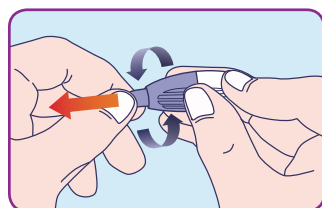


- ① 穿刺する部位を消毒し、保護キャップをねじって引っ張り、ホルダーから取り外します。

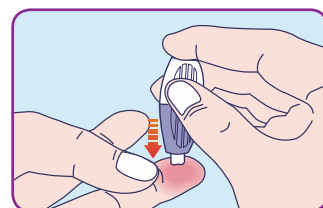

- ② 穿刺部位周辺を圧迫し、皮膚を張らせた状態で、ホルダーの先端を穿刺部位に押しあてます。(この時ホルダーの先端が少し引っ込みます。)

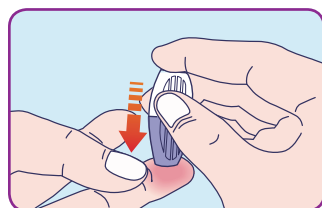

- ③ 作動音がするまでさらに押し付け、すぐに離します。

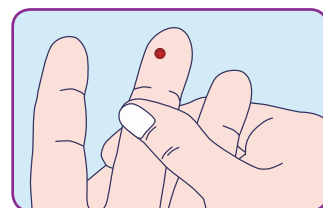

- ④ 血液を必要量採取します。

BD マイクロティナ® セーフティ ランセット

カタログ番号	ホルダーカラー	ランセットタイプ	穿刺の深さ	使用例	出荷単位	統一商品コード
366597		■ 30G 針	1.5 mm	血糖値測定	30 個／箱	555397822
366592		■ 30G 針	1.5 mm	血糖値測定	200 個／箱	555387915
366593		■ 21G 針	1.8 mm	ヘマトクリット管への血液採取	200 個／箱	555387922
366594		■ 1.5 mm 幅刃	2.0 mm	微量採血管への血液採取	200 個／箱	555387953

販売名：BD セーフティ ランセット 医療機器承認番号：21900BZX00737000

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2019 BD. All rights reserved. 62-032-04

