



## BD マイクロティナ<sup>®</sup> 微量採血管 BD マイクロガード<sup>™</sup> キャップ付き

血液量が少ない、あるいは通常の採血が困難な患者さんの大切な検体を無駄にしないための微量採血管です。

血液曝露をしっかりと防ぐキャップデザインを採用しており、用途に合わせてお選びいただける幅広いラインナップを揃えております。

# BD マイクロティナ® 微量採血管 BD マイクロガード™ キャップ付き

開けやすく、開閉時の血液曝露・飛散を防ぐ  
BD マイクロガード™



取付型チューブエクステンダーによりラベリング可能

チューブエクステンダー装着時

原寸大



チューブエクステンダー

転倒混和しやすい広い内腔



1本1本にロット番号、フィルライン、使用期限の記載

| 包装単位      | 50本         |                     |                         |              |                     |                            |             |                   |           |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| カタログ番号    | 365963      | 365967              | 365978                  | 365965       | 365985              | 365987                     | 365974      | 365992            | 365976    |
| キャップカラー   | ■           | ■                   | ■                       | ■            | ■                   | ■                          | ■           | ■                 | —         |
| 添加剤等      | 添加剤なし       | 凝固促進剤／血清分離剤         | 凝固促進剤／血清分離剤<br>— 遮光チューブ | ヘパリンリチウム     | ヘパリンリチウム／血漿分離剤      | ヘパリンリチウム／血漿分離剤<br>— 遮光チューブ | EDTA 2K     | フッ化ナトリウム／EDTA 2Na | —         |
| 外径×長さ(mm) | 10×46       |                     |                         |              |                     |                            |             |                   | 10×43     |
| 採血量(μL)   | 250-500     | 400-600             | 400-600                 | 200-400      | 400-600             | 400-600                    | 250-500     | 400-600           | —         |
| 転倒混和回数    | 不要          | 5回                  | 5回                      | 10回          | 10回                 | 10回                        | 10回         | 10回               | —         |
| 遠心条件      | 2000G<br>3分 | 6000G-15000G<br>90秒 | 6000G-15000G<br>90秒     | 2000G<br>90秒 | 6000G-15000G<br>90秒 | 6000G-15000G<br>90秒        | 2000G<br>3分 | 2000G<br>3分       | —         |
| 統一商品コード   | 555620630   | 555620739           | 555620661               | 555620647    | 555620746           | 555620654                  | 555452392   | 555621101         | 555452385 |

※チューブエクステンダー(#365976)は、BD マイクロティナ® 微量採血管 BD マイクロガード™ キャップ付き専用です。

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ  
カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

[bd.com/jp/](http://bd.com/jp/)

