

## 閉鎖式導尿バッグ

シリーズ品番：

- UB-25S ベルト
- UB-25S スtring
- UB-25PC ベルト
- UB-25PC スtring



# ニプロ ユローズバッグ®



# 特 長

- バッグ全長は 300mmで低床タイプです。
- バッグ容量は 最大2500mLです。
- 導尿チューブは、十分な内径と程良いチューブ厚で尿の流れを確保します。
- 接続コネクタは、「ストレートタイプ」と「ニードルレス採尿ポート付」の2種類を品揃えています。
- 吊り下げ部は、ベルトタイプとストリングタイプの2種類をご用意しました。
- EOG滅菌済みです。


## 構 成

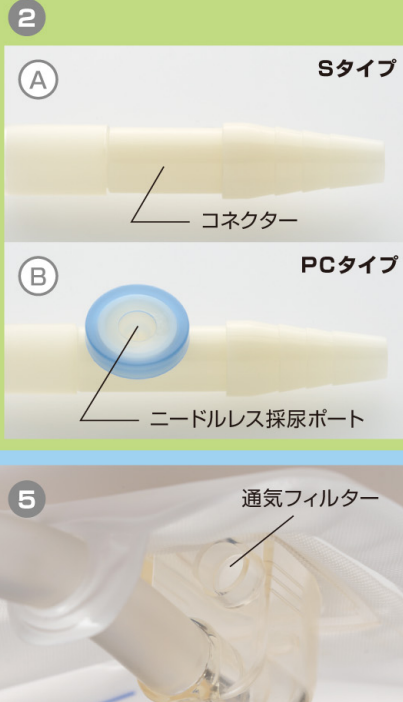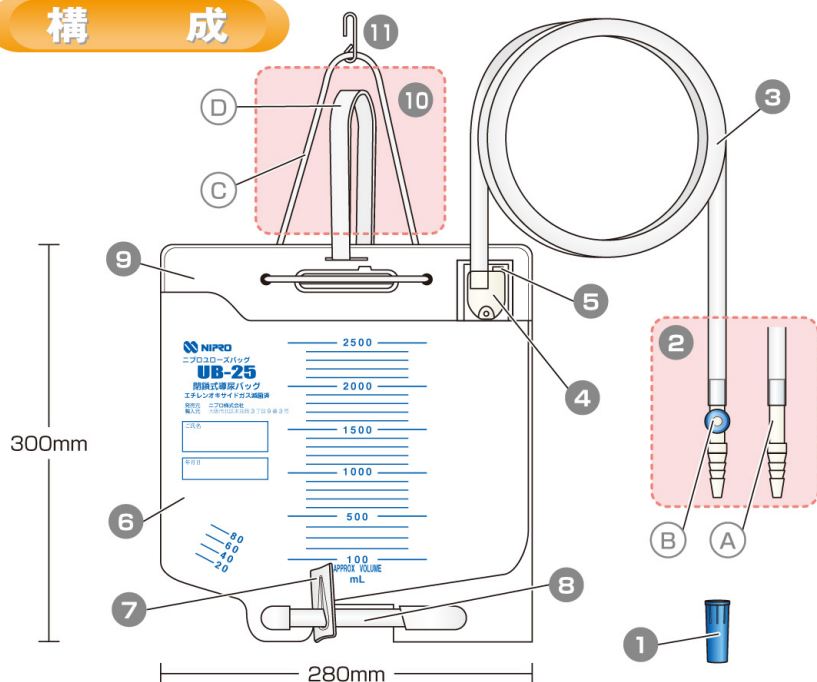

- |                                                     |                                                |          |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| ① コネクターキャップ                                         | ③ 導尿チューブ<br>(外径) (内径) (長さ)<br>11mm×8mm×1,100mm | ⑥ 本体バッグ  | ⑩ ① 吊り具(ストリングタイプ)<br>② 吊り具(ベルトタイプ) |
| ② ① Sタイプ:コネクター<br>② PCタイプ:<br>ニードルレス採尿ポート付<br>コネクター | ④ ドリップチャンバー                                    | ⑦ ストッパー  | ⑪ 吊り具補助クリップ<br>(ストリングタイプのみ)        |
|                                                     | ⑤ 通気フィルター(除菌用)                                 | ⑧ 排尿チューブ |                                    |
|                                                     |                                                | ⑨ 補強プレート |                                    |

## 吊り具の使用法

### ストリングタイプ使用方法

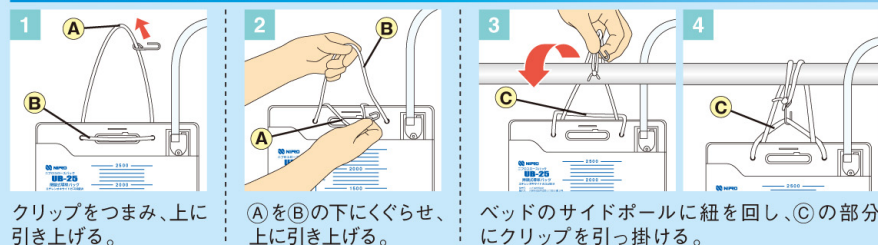


クリップをつまみ、上に引き上げる。

①を②の下にくぐらせ、上に引き上げる。

ベッドのサイドポールに紐を回し、③の部分にクリップを引っ掛ける。

### ベルトタイプ使用方法

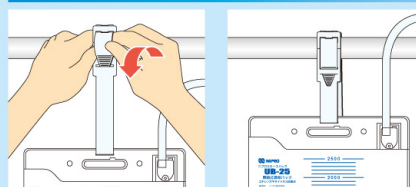

## 規 格

| 商品コード  | 品名      | 品番            | 容量(mL) | 採尿ポート | 梱包単位            | JANコード        |
|--------|---------|---------------|--------|-------|-----------------|---------------|
| 27-025 | ユローズバッグ | UB-25S ベルト    | 2,500  | なし    | 50枚<br>(5枚×10箱) | 4987458270253 |
| 27-027 | ユローズバッグ | UB-25S ストリング  |        |       |                 | 4987458270277 |
| 27-028 | ユローズバッグ | UB-25PC ベルト   |        | あり    |                 | 4987458270284 |
| 27-029 | ユローズバッグ | UB-25PC ストリング |        |       |                 | 4987458270291 |