


ニチバン

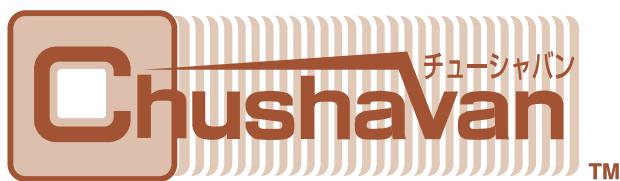


チューシャバン™



一般医療機器 救急絆創膏 医療機器届出番号 13B2X00218131180 JMDNコード 34864000

## 穿刺部の被覆保護に

ベージュ色で目立ちにくく、  
パッド面・粘着面に触れずに衛生的に  
貼付できます。

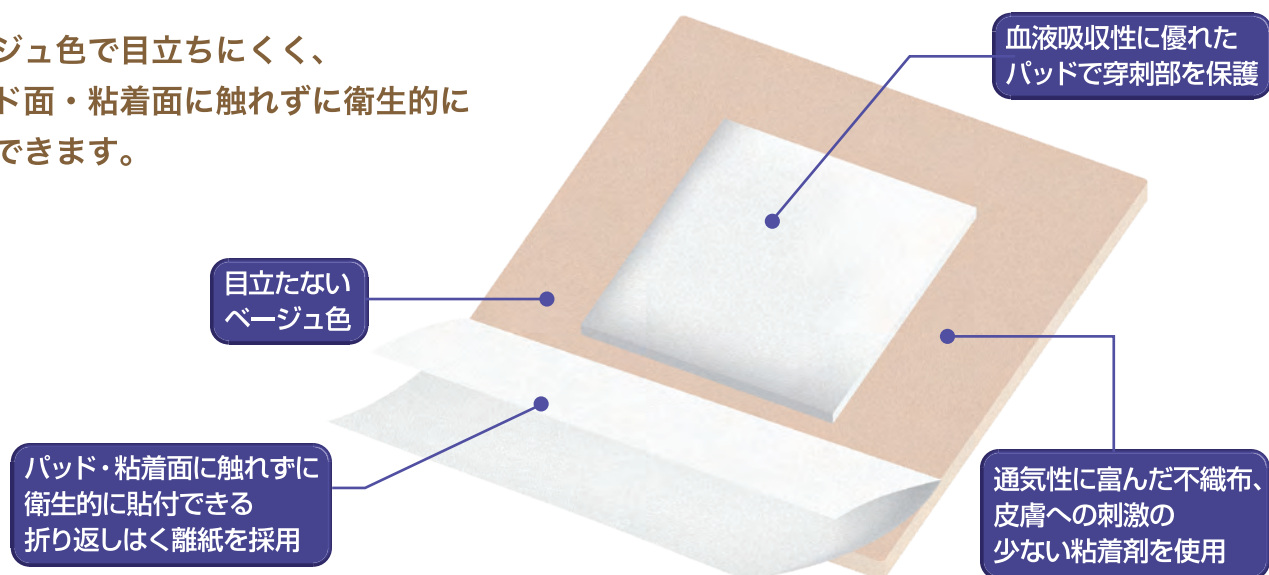

ニチバン



チューシャバン™




### 優れた固定性と 低刺激性

しなやかで通気性に富むパルプ・ポリエステル主体の不織布に、皮膚へよくなじみ良好な接着性・固定性を発揮する、皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。

### 吸収性に 優れたパッド


吸収性に優れたセルロース系積層不織布パッドで、穿刺部をやさしく保護し、血液の衣類への付着を防ぎます。

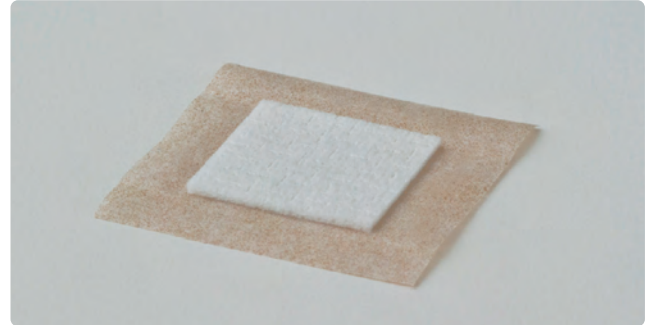


**用途** ●静脈注射、採血、予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護

**禁忌** ●再使用禁止


#### 使用法

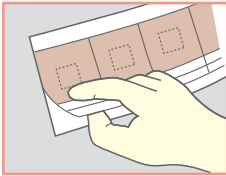


①はく離紙(折り返しされている上・下片とも、もしくは上片のみ)をベージュ色のテープと一緒に台紙からはがしてください。

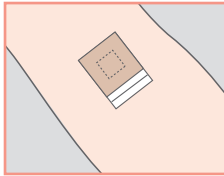

②穿刺部にパッドをあて、はく離紙が付いていない粘着面を貼付してください。

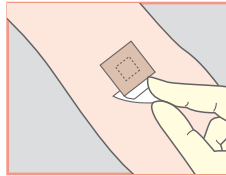


③はく離紙の下片(皮膚に近い方)をつかみ粘着剤面よりはがし、この部分の粘着部を貼付してください。

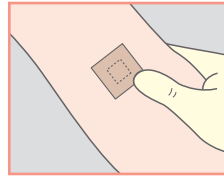

④ベージュ色のテープ部分を押さえてしっかり固定してください。

#### 構成

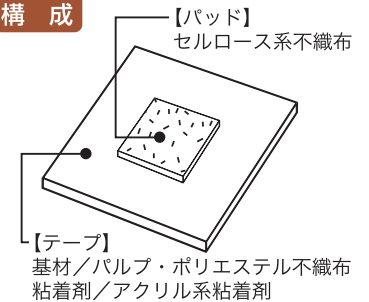

#### 使用上の注意

- 本品の使用中に、創部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に皮膚障害(発疹・発赤、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、血液や滲出液などのじみがみられた場合には、直ちに新しいものと貼りかえてください。
- 使用時に包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないでください。
- 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 保管上の注意

- 水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

|    | 品番   | サイズ       |           | 1袋  | 1箱     | 標準価格/箱<br>(税別) | JANコード        |
|----|------|-----------|-----------|-----|--------|----------------|---------------|
|    |      | 粘着部       | パッド部      |     |        |                |               |
| 規格 | Sサイズ | 20mm×20mm | 8mm×8mm   | 10枚 | 1,000枚 | 3,300円         | 4987167029555 |
|    | Mサイズ | 27mm×27mm | 13mm×13mm | 8枚  | 480枚   | 3,000円         | 4987167029562 |
|    | Lサイズ | 35mm×35mm | 20mm×20mm | 6枚  | 480枚   | 3,300円         | 4987167029579 |

TMは商標です。

日本製  
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

●ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>